


# Vad är nytt?

MiniMed™ 780G-systemet med Simplera Sync™-sensorn

Ändringar tillgängliga efter mjukvaru-uppdatering.



## Nya funktioner med mjukvaruuppdateringen:

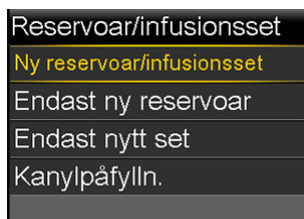

### Menyn Reservoar/infusionsset

Endast ny reservoar och Endast nytt set har lagts till i menyn Reservoar/infusionsset

- Om ditt insulin tar slut innan ditt rekommenderade setbyte kan alternativet Endast ny reservoar användas för att byta reservoar.
- Välj alternativet Endast nytt set om ditt infusionsset avlägsnas av misstag eller behöver flyttas.



### Meddelandet Sensorn uppdateras

Meddelandet ger information om hur lång tid det kan ta att uppdatera sensorn. "Sensorn uppdateras" är systemets sätt att bekräfta sensorns tillförlitlighet. De flesta sensorer återupptar normal funktion utan att du behöver göra något. Om uppdateringen pågår i mer än tre timmar ska du byta sensor för att maximera tiden i SmartGuard™-läget.



### Nedräkningsvisare vid sensoruppvärmning

Med Simplera Sync™ och Guardian™ 4-sensorn räknar en timer ner medan sensorn värmer upp. Nedräkningen startar vid 2 timmar och räknar ner till 0 minuter.



### Med bolusfunktionen kan BS\* anges manuellt

Färre steg för att ange BS-värden i pumpen. BS kan nu anges i Bolus Wizard™ och SmartGuard™.



### Påminnelsen Byte av set

Oavsett vilket infusionsset du använder kan pumpen nu påminna dig när det är dags att byta infusionsset. Ett vanligt set byter du efter 2-3 dagar.

Medtronic Extended™ infusionsset och reservoar kan bäras i upp till 7 dagar. Nu kan du ändra påminnelsen Byte av set från 2 till 7 dagar.



### Gå till huvudmenyn

1. Inställningar
2. Varningsinställningar
3. Påminnelser
4. Byte av set

\* BS = Blodsocker



## Simplera Sync™-sensorn


- Allt-i-ett: appliceringsenhet, sändare och sensor
- Appliceras lätt under 10 sek<sup>1</sup>
- Kräver ingen övertejp

1. Ett blodsockervärde (BS) krävs för användning av SmartGuard™-läget. Om glukosvarningar och CGM-värden inte stämmer överens med symtomen måste du använda en BS-mätare för beslut om diabetesbehandlingen.



## Appliceringsställen för Simplera Sync™-sensorn

7-17 år

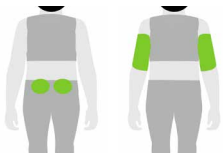

Skinkans övre del

Överarmens baksida

Applicering på buken för åldrarna 7-17 år har inte utvärderats för noggrannhet.

18 år och äldre



Överarmens baksida

Applicering på buken och skinkans övre del för åldersgruppen 18 år och äldre har inte utvärderats för noggrannhet.

## Steg för att applicera sensorn

Börja med att rengöra huden.



Säkerhetsband

Vrid på appliceringsenheten för att öppna den och kontrollera att säkerhetsbandet är intakt.



Placera appliceringsenheten mot kroppen och tryck bestämt tills du hör ett klick. Dra bort appliceringsenheten rakt ut från kroppen.



Slåta ut tejpens med fingret.


## Radera kopplingen till din befintliga Guardian™-sändare

1. Gå till huvudmenyn 2. Välj Kopplade enheter 3. Välj Sensor 4. Välj Koppla bort och Ja

## Koppla din nya Simplera Sync™-sensor

Varje gång du byter din Simplera Sync™-sensor kopplas den använda sensorn bort automatiskt.

Du behöver inte koppla bort den manuellt.

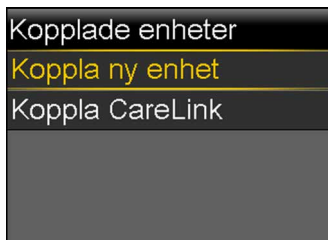


Gå till huvudmenyn  
1. Välj **Kopplade enheter**  
2. Välj **Koppla ny enhet**



Välj den CGM-enhet som motsvarar det serienummer som finns längst upp på appliceringsenheten.



Bekräfta **CODE**

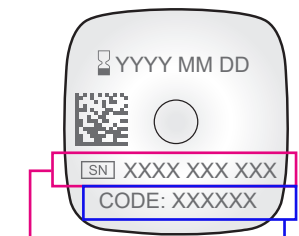

SN: XXXX-XXX-XXX  
CODE: XXX XXX

Den information som tillhandahålls häri utgör inte medicinsk rådgivning och bör inte användas som ett alternativ till att tala med din läkare. Diskutera indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder, möjliga biverkningar och all annan information med din vårdgivare.

SE-IPT-2400002 ©2024 Medtronic. Medtronic, Medtronic-logotypen och Engineering the extraordinary är varumärken som tillhör Medtronic. Alla andra märken är varumärken som tillhör ett Medtronic-företag.

**Medtronic**