

Upphandlade blodgassprutor – vilken spruta ska man beställa?

Blodgassprutorna finns i olika utförande, självfyllande för artärprover med eller utan kanyl (grå ihålig kolv) och aspiratorspruta (vit kolv) för venösa blodgaser men passar även för arteriella där infart finns.

Merparten av blodgaserna i Skåne tas utan kanyl, ur artäringång eller venöst.

Hur tas blodgaser?

Vanligast är att ta en blodgas ur en artär- eller veningång.

Tar man blodgasen venöst, genom att aspirera ur en veningång eller genom venös provtagning, är det en aspiratorspruta med blandningskula som ska väljas.

BLODGASSPRUTA UTAN KANYL - Safe PICO-Aspirator (Radiometer) Triolab

Engångs. Steril. För aspiration. Med blandningskula och streckkod.
För användare **med** FlexQmodul (kömodul).

ART NR LEV ART NR

19075 956-622 spruta 1,7 mL utan kanyl



Tar man blodgasen arteriellt ur en infart är det en självfyllande spruta med blandningskula som ska väljas.

BLODGASSPRUTA UTAN KANYL - Safe PICO (Radiometer) Triolab

Engångs. Steril. Självfyllande. Med blandningskula och streckkod.
För användare **med** FlexQmodul (kömodul).

ART NR LEV ART NR

19076 956-610 spruta 1,5 mL utan kanyl



Tas blodgasen genom artärpunktion ska det vara en självfyllande spruta med blandningskula och kanyl samt kanylskydd. Sprutan finns med två olika kanyllängder. Själva sprutan är samma som ovan, 956-610.

BLODGASSPRUTA MED KANYL - Safe PICO (Radiometer) Triolab

Engångs. Steril. Självfyllande. Med blandningskula, streckkod och kanylskydd.
För användare **med** FlexQmodul (kömodul).

ART NR LEV ART NR

19078 956-615 spruta 1,5 mL med kort kanyl

24455 956-614 spruta 1,5 mL med lång kanyl



OBS! Sprutor utan blandningskula är endast för provtagning i samband med MR och för Neonatalvården som kräver mindre volym.

BLODGASSPRUTA - Safe PICO70 (Radiometer) Triolab

Engångs. Steril. Självfyllande. Med kanylskydd. För användare **utan** FlexQmodul (kömodul).

ART NR LEV ART NR

24453 956-609 spruta 1,5 mL med kort kanyl

24452 956-608 spruta 1,5 mL med lång kanyl



~~BLODGASSPRUTA UTAN KANYL - PICO 50 (Radiometer) Triolab~~

~~Engångs. Steril. För aspiration. För användare **utan** FlexQmodul (kömodul).~~

~~ART NR LEV ART NR~~

~~6654 956-552 spruta 2 mL utan kanyl~~



~~Produkten återkallad, får ej användas. Utgår ur sortimentet 19 april 2022.~~

BLODGASSPRUTA - Safe PICO (Radiometer) Triolab

Engångs. Steril. För neonatalavdelningar.

ART NR LEV ART NR

24560 3100-25 spruta 1,0 mL utan kanyl

