




## Kort bruksanvisning

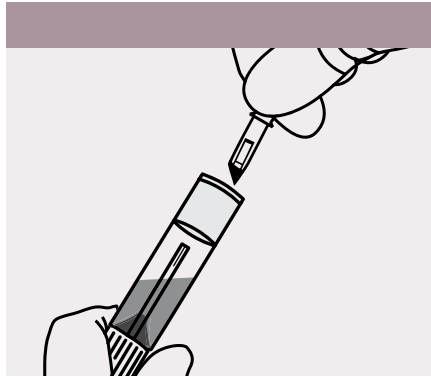

**1** Rumstemperera teststickorna samt röret med prov före analys. Blanda provtagningsröret. Tryck provstickans vassa del genom perforeringen i provrörets botten tills det tar stopp.

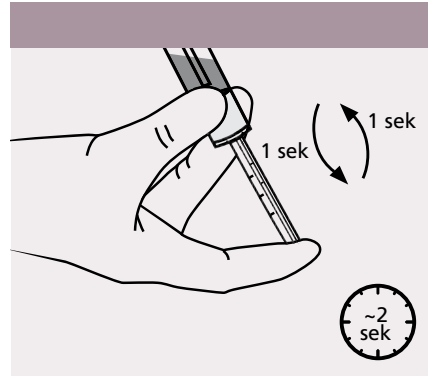


**2** Vänd **sakta** upp och ner på provtagningsröret. Vänd tillbaka provtagningsröret och ställ ner det på arbetsbänken. Hela proceduren ska ta 2 sekunder. Provtagningsröret får bara vändas en gång.

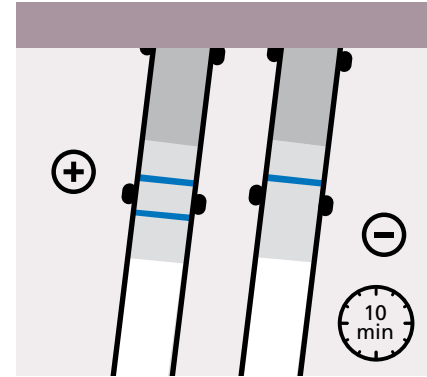


**3** Avläs vid 10 minuter, se **Tolkning av resultat**. Linjer som framträder senare än 10 minuter ska inte tolkas.

## Tolkning av resultat

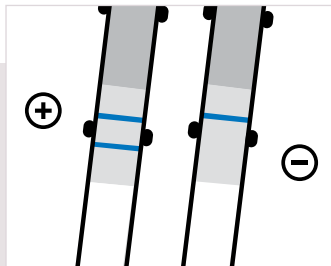

**Positivt resultat**  
Två blå linjer i avläsningsfältet

**Negativt resultat**  
Endast kontrollinjen (den övre linjen) i avläsningsfältet.

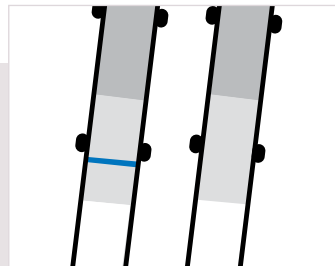

**Ogiltigt resultat**  
Ingen kontrollinje (den övre linjen) ses i avläsningsfältet. Testet ska göras om med en ny teststicka.

*För utförlig metodbeskrivning, se inlagen i förpackningen.*

## Reagensförvaring



### Kit (teststickor och provtagningsrör)

Förvaring av öppnat kit i 2–30°C: till utgångsdatum



### Teststickor

Förvaring av öppnat rör i 2–30°C: till utgångsdatum

Förvaring av öppnat rör i 2–30°C: hållbart i 4 månader, dock ej efter utgångsdatum



### Provtagningsrör

Förvaring i 2–30°C: till utgångsdatum

Provtagningsrör med feces tillsatt kan förvaras i 2–25°C (2–8°C rekommenderas) i en vecka innan analys utförs




Orion Diagnostica Oy / Sverige  
Box 520, 192 05 Sollentuna  
Tel. 08-623 64 40, Fax 08-623 64 80  
www.oriondiagnostica.se

8025-04SE, 02/2017


Produkt	Art.nr
Actim Fecal Blood kit, 20 test	30331ETAC
Actim Fecal Blood provtagningsrör, 20 st	30372ETAC
Actim Fecal Blood teststickor, 10 st	30361ETAC
Actim Fecal Blood kontrollset » Stark positiv, svag positiv och negativ kontroll	30300ETAC

Läs mer på [www.oriondiagnostica.se](http://www.oriondiagnostica.se)



## Provtagningsanvisning

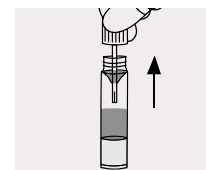



1. Skruva av korken med provtagningspinnen. Lämna avföring på ett toalettpapper eller i ett rent engångskärl.

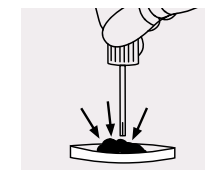

2. Stick ner och rotera pinnen på olika ställen i avföringen så att fårorna i änden av pinnen fylls. **Stick ej ner pinnen där blod är synligt.** Torka bort överskott av avföring.

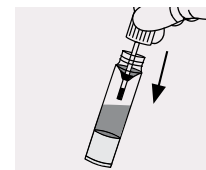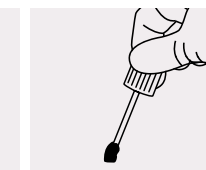

3. Sätt tillbaka korken med pinnen i röret och skruva fast den.

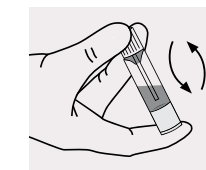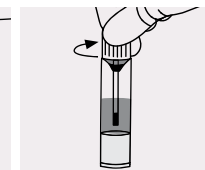

4. Skaka därefter röret så att avföringen löses upp.

### Efter provtagning

Röret kan förvaras i kylskåp (rekommenderas) eller i rumstemperatur. Skicka/lämna röret snarast till laboratoriet för analys. Provet ska analyseras inom en vecka efter provtagningen.