

Analys kontrolltest Glukos HemoCue



Intern kontroll

HemoCue Glukos instrument kontrolleras med internkontroll i två nivåer (Gluko Trol, nivå 1 och 2). Kontroller analyseras två dagar/vecka enligt följande: Nivå 1 på måndag och Nivå 2 på torsdag.

Kontrollen förvaras i kyl och skall vara rumstempererad vid analys. Öppnad flaska är hållbar i en månad.

Resultaten skall ligga inom ett förutbestämt intervall, se gränser på flaskan. Alla som använder instrumentet skall analysera intern kontroll regelbundet. Detta är ett sätt att kontrollera instrument, kuvett och handhavande. Kontrollvärdet ska dokumenteras och signeras på kontrollblad. Kontrollbladen sparas i minst 4 år.

Analys/Kontrolltest

- Tryck på knappen På/Av på instrumentet
- Dra ut kuvetthållaren
- Ange ditt Användar-ID (RS-ID) 
- Tryck på knappen QC-Test 
- Välj nivå 1 eller 2
- Fyll och lägg i en kuvett, för in kuvetthållare i mätläge
- Ange kontrollens LOT-nummer
- Resultat visas, tryck OK för att lagra information. Dokumentera resultatet på kontrollbladet