



## Analys Kontrolltest Glukos HemoCue

### Intern kontroll

HemoCue Glucose 201 RT DM är fabrikskalibrerad, en Intern kontroll (Glucotrol, nivå 2) skall analyseras dagligen eller när instrumentet används, dock minst 1 gång/vecka. Kontrollen förvaras i kyl och skall vara rumstempererad vid analys. Öppnad flaska är hållbar i en månad.

Resultaten skall ligga inom ett förutbestämt intervall, se gränser på flaskan. Alla som använder instrumentet skall analysera Intern kontroll regelbundet. Detta är en kontroll på handhavande och instrument/reagens. Kontrollvärdet ska dokumenteras och signeras på ett kontrollblad. Kontrollbladen sparas i minst 4 år.

### Analys/Kontrolltest

- Tryck på knappen På/Av
- Dra ut kuvetthållaren
- Ange ditt Användar-ID (RS-ID) 
- Tryck på knappen QC-Test 
- Välj nivå 2
- Fyll och lägg i en kuvett, för in kuvetthållare i mätläge
- Ange kontrollens LOT-nummer
- Resultat visas, tryck OK för att lagra information. Dokumentera kontrollens resultat på kontrollbladet