




Analys Patienttest Glukos HemoCue

Analys/Patienttest

- Tryck på knappen På/Av
- Dra ut kuvetthållaren
- Ange ditt Användar-ID (RS-ID) 
- Fyll och lägg i en kuvett, för in kuvetthållare i mätläge
- Ange patient-ID (streckkod patientens ID-band) 
- Vid fråga om Lab-ID, ange eventuellt ansvarig läkares RS-ID eller så kallat Lab-nummer (PV) 
- Kontrollera Patient-ID och eventuellt Läkar-ID, tryck OK
- Resultat visas, tryck OK för att lagra information
- Sätt Glukosinstrumentet i dockningsstationen

Obs! Det måste vara i På-läge för att skicka resultat till journalsystemet.