

Afinion™ HbA1c Kontrollkit består av HbA1c kontroller i två nivåer, 1 flaska av vardera nivå. Öppnad kontroll förvaras i kylskåp och är hållbar till utgångsdatum Öppnad kontroll är hållbar i 60 dygn i kylskåp.

OBS! Rumstemperera flaskan ca 1 timme och skaka den sedan kraftigt innan användandet.

Förklaring till schemat:

Datum	Kassetter lot	Kontroll lot	Facit Gränsv	Resultat	Analysresultat											Sign								
					- 8	- 6	- 4	- 2	0	2	4	6	8											
	Tryckt på kassettförp.	Tryckt på kontrollflaskan	Tryckt på kontr. bruksanv.		Markera med kryss. Värdet mitt emellan gränsvärdena = 0																			
9/3-14	11094885	11093570	45 - 55	49											X									GG
11/3-14	---- ☒----	---- ☒----	---- ☒----	48											X									GG

Facitvärdet för Afinion™ HbA1c kontrollerna finns angivet på första sidan i bruksanvisningen som medföljer varje kontrollförpackning. OBS! I Sverige gäller värdena markerade med SE.

Hur ofta ska kontrollen analyseras?

Följande rekommendationer gäller för analys av kontroller:

- För varje ny leverans av Afinion™ HbA1c kassetter.
- För varje ny lot av Afinion™ HbA1c kassetter som tas i bruk.
- Om testkassetterna inte har förvarats enligt föreskrifterna i bruksanvisningen.
- Om man får oväntade patientresultat.
- Vid upplärning av ny personal i användandet av Afinion™ instrumentet.
- Enligt lokala bestämmelser.

Analysresultaten ska inte skilja för mycket från varandra (ge en så rak linje i schemat som möjligt). Om resultaten avviker mer än tillåtet se avsnitt "Felsökning" i bruksanvisningen. Hjälper inte detta, kontakta Alere.

Öppnad kontroll är hållbar i 60 dygn i kylskåp.

