



Antigen snabbtest covid-19 (SARS-CoV-2)-PMO/ Avd Cov-19 Snabb Ag-Melior – Panbio, Abbott

OBS! Om du använder Covid-19 Ag rapid test device NASAL – kasta pinnarna som medföljer kitet och använd istället nasofarynxpinne från Sun Trine (ref 905101).

Testprocedur

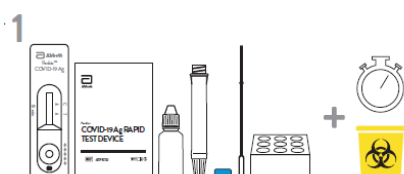

Ta fram det du behöver för att utföra testen:
Testkit + timer + behållare för smittförande avfall.
Ta ut testkassetten ur foliepåsen och lägg den på en plan och ren yta. Märk rör och testkassett med patientens ID.
Förvara alltid kitet i rumstemperatur.

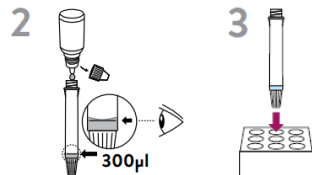

Håll buffertflaskan vertikalt ovanför röret och fyll upp till den streckade linjen vilket motsvarar ca 10 droppar.





Placera röret i provrörsstället.



Provtagning från nasofarynx:
Följ Vårdhygiens riktlinjer för skyddsutrustning vid provtagning [Välj rätt skyddsutrustning](#).

Använd provtagningspinnen som följer med kitet.

- Tryck patientens nästipp uppåt för att se bättre.
- För in pinnen genom ena näsöppningen, horisontellt långt in längs näsbotten tills du känner att pinnen har nått nasofarynx, i höjd med ytterörat.
- Snurra pinnen 1 varv och låt den vara kvar 5 sekunder.
- Dra pinnen rakt ut med en jämn rörelse utan att vidröra huden i näsöppningen.

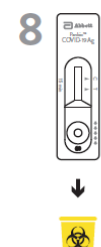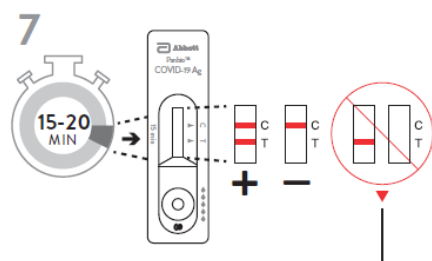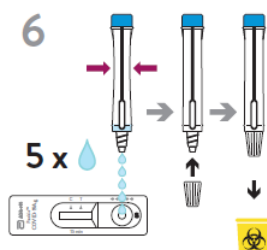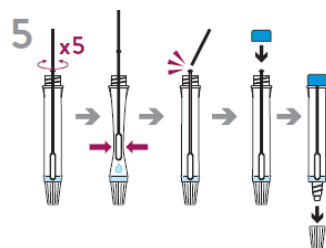

Sätt ner pinnen i röret.

För att få ut så mycket som möjligt av provmaterialet ner i vätskan roterar du pinnen fem gånger och tryck spetsen mot rörets vägg.

Dra sen upp pinnen så långt att du kan krama ur dess spets genom att trycka med fingrarna på provrörets yttersida. Bryt av pinnen vid brytskåran och låt pinnen vara kvar i röret, allt kasta pinnen i smittförande avfall. Sätt på den medföljande korken så att röret försluts ordentligt. Skruva hårt!

Skruva av det nedre munstycket och droppa 5 droppar ner i den runda brunnen på testkassetten. Skruva på munstycket igen. Hantera eller flytta inte testkassetten förrän testet är utfört och avläst. Kasta röret i behållare för smittförande avfall.

Sätt timern på 15 minuter. Läs av testresultatet direkt när tiden är ute. Avläsning får EJ göras efter 20 minuter.

Om testet är **Positivt** syns två band, ett vid T (test) och ett vid C (kontroll). Även ett svagt band vid T räknas som positivt resultat.

Om testet är **Negativt** syns endast ett band vid C, kontrollstrecket.

Om testet inte visar ett kontrollstreck vid C, är testet **ogiltigt (Ej bedömbart)**.

Kasta testkassetten i behållare för biologiskt avfall.

Utförlig information hittar ni i bruksanvisningen. Läs ALLTID bruksanvisningen innan du gör testet för första gången.

I Analysportalen ([SARS-CoV-2 \(SARS-coronavirus-2\) Antigen-påvisning \(PNA\)](#)) kan du läsa mer om användningsområden, indikationer, metodens prestanda och analysprincip.

Resultatregistrering

Två analyser är valbara

- I Melior:
 - Avd Cov-19 Snabb Ag – väljs när provet tas på patient
 - PERS Cov-19 Snabb Ag – väljs när provet tas på personal
- I PMO:
 - Antigen snabbtest covid-19 (SARS-CoV-2) – väljs när provet tas på patient
 - Antigen snabbtest covid-19 (SARS-CoV-2) Personal – väljs när provet tas på personal

All provsvar ska registreras i Melior eller PMO enligt instruktion på sid 4-8. Det är oerhört viktigt att alla resultat registreras, även ett ogiltigt (Ej bedömbart) resultat, då det ligger till grund för bland annat statistiken.

Det är av yttersta vikt att resultatet registreras med korrekt benämning. Skriv in exakt rätt ord:

Positivt

Negativt

Ej bedömbart

Om man fyller i felaktigt kommer verksamheten att bli kontaktad så att man får korrigera felet.

Alla positiva svar ska meddelas direkt till patienten, alternativt via telefon.

Både positiva och negativa svar ska dokumenteras i aktuell journalanteckning så att patienten kan läsa svaret via 1177.se.

Covid-19 är en anmälningspliktig sjukdom och vid positivt resultat på testet måste smittskyddsanmälan göras.

Smittskyddsanmälan består av en klinisk anmälan och en laboratorieanmälan.

Medicinskt ansvarig läkare gör en klinisk anmälan och laboratorieanmälan görs automatiskt via inmatat värde i journalsystemets lablista.

Kvalitetskontroller

Kontroll av kit:

Varje gång en ny kartong öppnas ska kontroll utföras för att kittet ska vara godkänt för användning. Testpinnar för positivt och negativt utfall medföljer varje kartong. Anteckna resultat, datum och signatur på kartongen. Om testpinnarna ger felaktigt resultat ska kittet inte användas.


I utbildningssyfte:

Innan en ny medarbetare utför testet på patientprover bör hen testa de medföljande kontrollerna för att säkerställa att hen utfört testet på ett korrekt sätt.

Registrering i Melior

Ordinera och skriva in svar på analysen **Avd Cov-19 Snabb Ag** (provtagning patient) eller **PERS Cov-19 Snabb Ag** (provtagning personal) på labblistan i Melior


Börja med att klicka på den röda listan som heter **Avd Regio**. Denna är placerad direkt efter de blåa listorna. Tryck därefter på knappen Nytt. Välj ansvarig och tryck på OK.

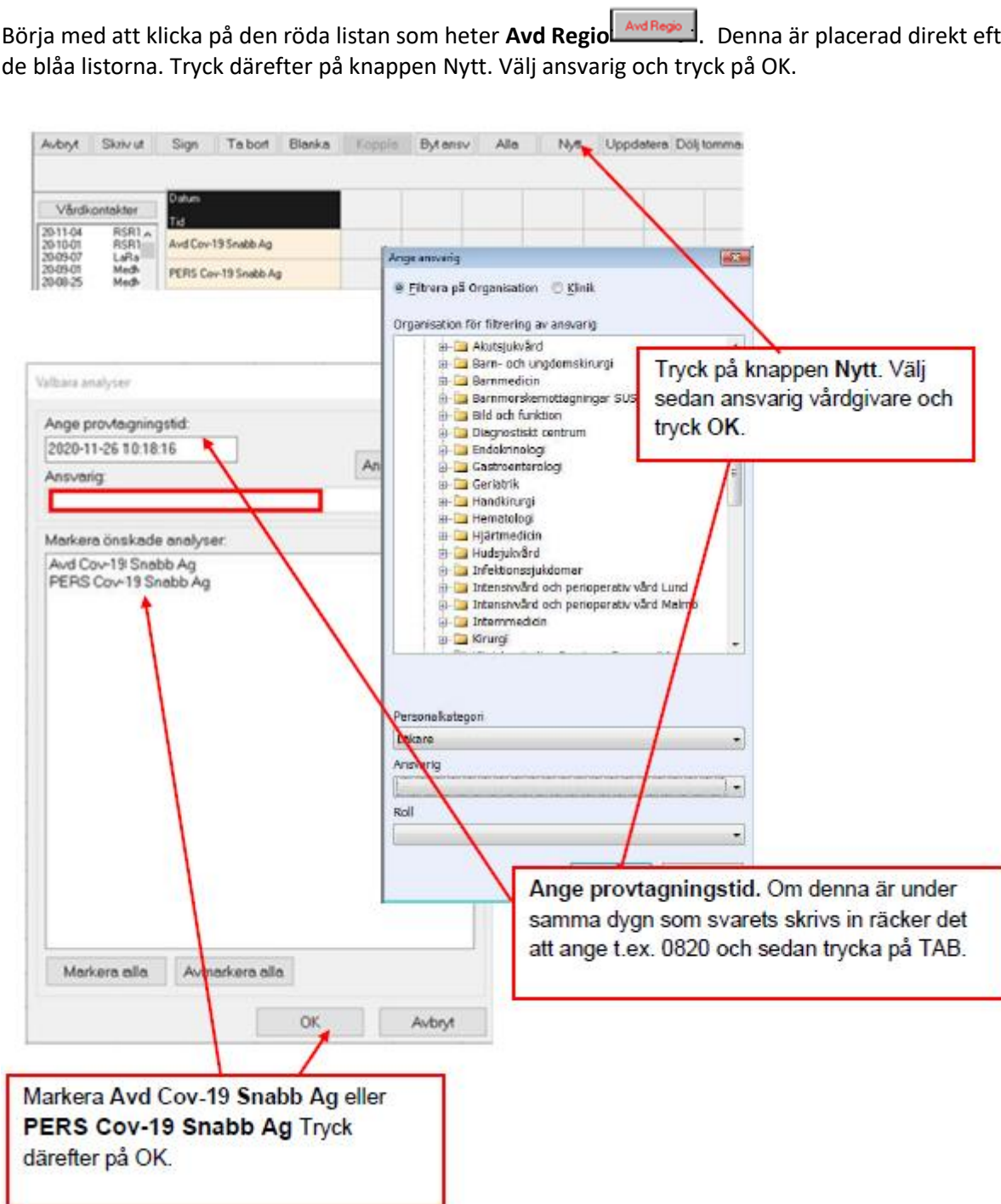

Tryck på knappen **Nytt**. Välj sedan ansvarig vårdgivare och tryck OK.

Ange provtagningstid. Om denna är under samma dygn som svarets skrivs in räcker det att ange t.ex. 0820 och sedan trycka på TAB.

Markera **Avd Cov-19 Snabb Ag** eller **PERS Cov-19 Snabb Ag** Tryck därefter på OK.

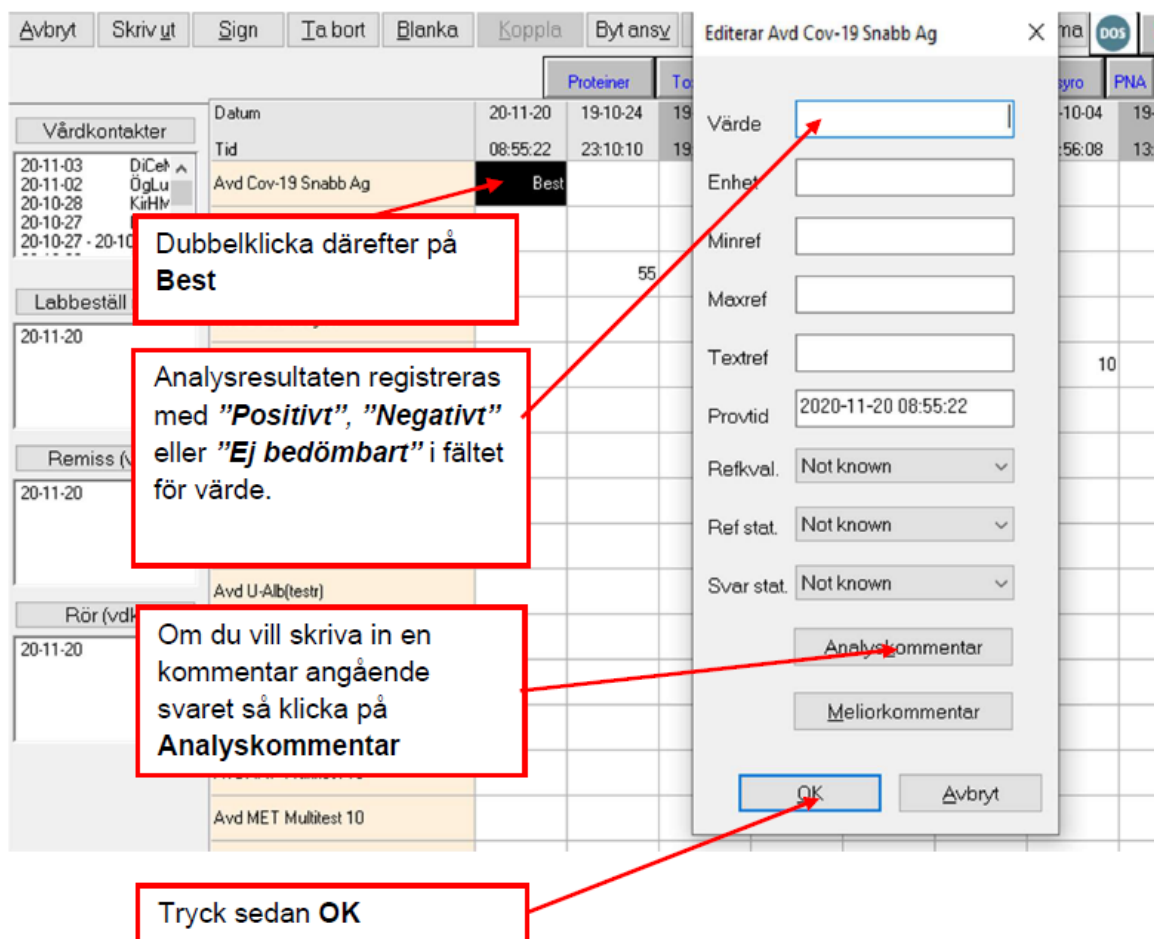

The screenshot shows a software interface for editing COVID-19 test results. A red box highlights the 'Best' button in the main table, with a callout: "Dubbelklicka därefter på **Best**". Another red box points to the 'Analyskommentar' field in the editor, with a callout: "Om du vill skriva in en kommentar angående svaret så klicka på **Analyskommentar**". A third red box points to the 'OK' button at the bottom of the editor, with a callout: "Tryck sedan **OK**".


Analysresultaten registreras med **"Positivt"**, **"Negativt"** eller **"Ej bedömbart"** i fältet för värde.

Registrering i PMO

Antigen snabbtest ligger i *Lokalt lab – Lokala analyser*. Det finns två analyser för antigen snabbtest, en för patienter och en för personal, det är viktigt att du väljer rätt.


- *Antigen snabbtest covid-19 (SARS-CoV-2)*
- *Antigen snabbtest covid-19 (SARS-CoV-2) Personal*

I analysrutan kan du via beskrivningsrutan längst ner se den vilken som är markerad.

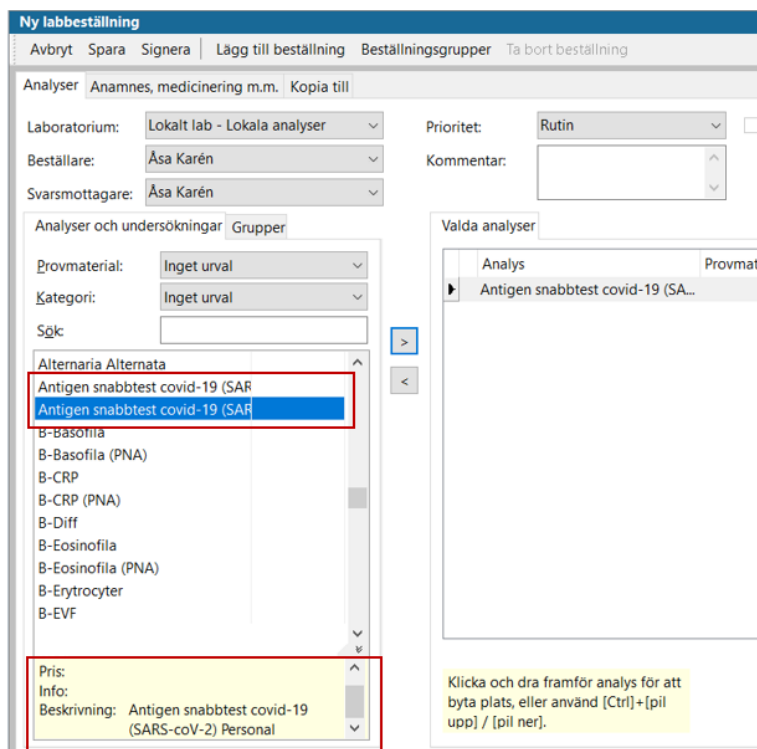

Inmatning av resultat


Markera analysen och välj *Resultat – Enkel inmatning*.

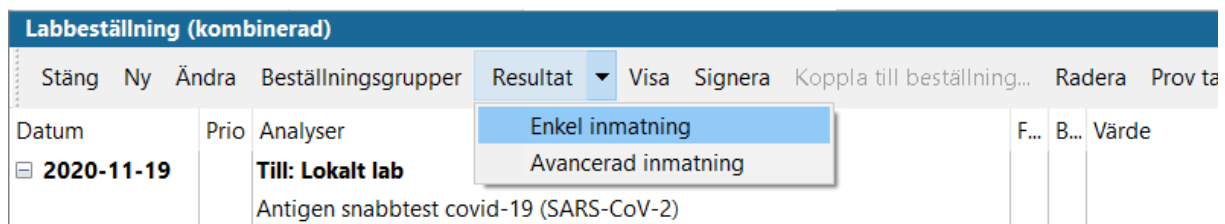

Positivt utfall

Positivt resultat skrivs in i rutan för *Resultat* och markeras med patologiskt "Ja".

OBS! Det är mycket viktigt att markera patologiskt "Ja" eftersom det triggar funktionen för automatisk överföring till Laboratorieanmälan hos SmiNet.

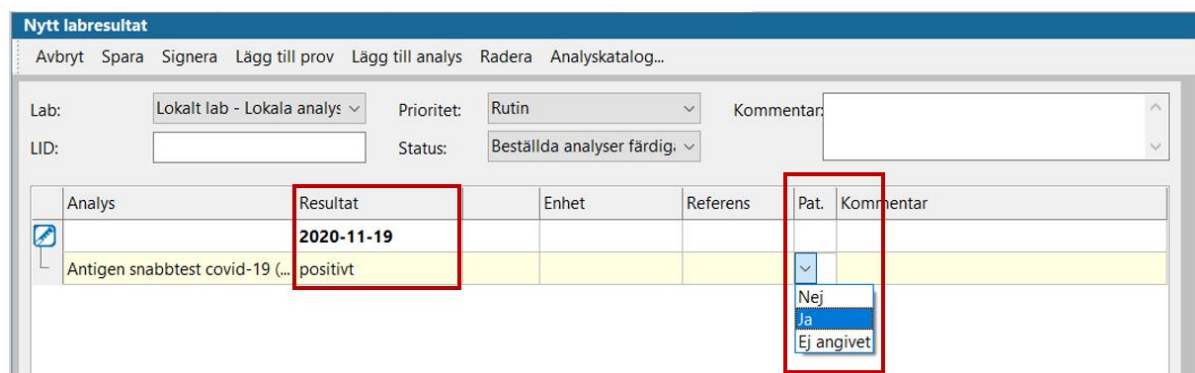

Nytt labresultat

Avbryt Spara Signera Lägg till prov Lägg till analys Radera Analyskatalog...

Lab: Lokalt lab - Lokala analys ▼ Prioritet: Rutin ▼ Kommentar:

LID: Status: Beställda analyser färdig, ▼

Analys	Resultat	Enhet	Referens	Pat.	Kommentar
Antigen snabbtest covid-19 (...)	positivt			▼ Nej Ja Ej angivet	

Patologiskt "Ja" rödmarkerar även provsvaret i Labresultat för ökad synlighet.

Labresultat									
Stäng Ny ▼ Ändra ▼ Visa Signera Koppla till beställning... Koppla isär Radera Tidsserie Inställningar...									
Provdatum	Prio	Prov, lokalisation, undersökning	Värde	Referens	B...	Be...	Init	Si...	Kommentar
2020-11-19		Resultat från Lokalt lab				✓	ASA		
		*Antigen snabbtest covid-19 (SAR... positivt							

Vid positivt resultat ska patienten kontaktas via telefon av hälso- och sjukvårdspersonal och dokumenteras i PMO.

Observera att dokumentation i Anteckning blir synlig i eJournal på 1177 när du sparar anteckningen.

Negativt utfall

Resultatet skrivs in enligt samma princip som ovan manuellt i rutan för resultat, då med ett negativt värde.

Labbeställning (kombinerad)												
Stäng	Ny	Ändra	Beställningsgrupper	Resultat	Visa	Signera	Koppla till beställning...	Radera	Prov taget	Tidsserie	Inställningar...	Endast beställ
Datum	Prio	Analyser					F...	B...	Värde	Referens	Status	Init
2020-11-19		Till: Lokalt lab										ASA
2020-11-19		Antigen snabbtest covid-19 (SARS-CoV-2)							negativt		*Beställda a...	

Negativt resultat dokumenteras i Anteckning som patienten kan ta del av via eJournal på 1177. Observera att dokumentation i Anteckning blir synlig i eJournal på 1177 när du sparar anteckningen.

Ej bedömbart

Om det inte går att utläsa något resultat markeras analysen med *Ej bedömbart*.

Labbeställning (kombinerad)												
Stäng	Ny	Ändra	Beställningsgrupper	Resultat	Visa	Signera	Koppla till beställning...	Radera	Prov taget	Tidsserie	Inställ	
Datum	Prio	Analyser					F...	B...	Värde	Referens	Status	
2020-11-12		Till: Lokalt lab										
2020-11-12		Antigen snabbtest covid-19 (SARS-CoV-2)							Ej bedömbart		*Beställda a.	

Klinisk anmälan

Vid positivt resultat ska elektronisk Smittskyddsanmälan göras av ansvarig läkare.

<http://www.sminet.se/>

För elektronisk anmälan krävs lösenord som du får av Smittskydd Skåne. All information hittar du via länken

<https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/#26198>