

OSOM Strep-A

Sensitivitet: 96 %
Specificitet: 97,80
Antal reagenser: 2
Antal Test: 50+2
Artikelnr.: 22472-05
Utestad av SKUP
FDA godkänd
Utvärderad i Jönköping




Kontakt:
Thomas Berg
+45 45765425
thomas@medigroup.dk

1 Droppa först 3 fritt fallande droppar av reagens 1 i provröret. Rosa färg.

2 Droppa därefter 3 fritt fallande droppar av reagens 2 i röret. Ljusgult färgomslag.



3 Ta provet med den medföljande provtagningspinnen. Blanda provet med reagenset genom att kraftigt röra runt provtagningspinnen i provröret minst 10 gånger. Vänta 1 minut. Tryck ihop provröret om provtagningspinnen och vrid ur all reagens. Kasta provtagningspinnen.

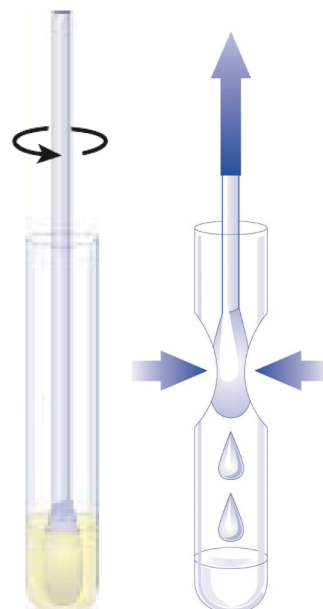

1 minut

4 Placera en testremsa i provröret. Läs av resultatet efter 5 minuter och senast inom 6 minuter.

Positiva resultat kan avläsas tidigare, när både en blå testlinje och en röd kontrollinje framträder.



5-6 minuter

5 Avläsning/resultat


Positivt:

En **blå** testlinje och en **röd** kontrollinje.

OBS: den **blå** testlinjen kan ha vilken **blå** nyans som helst. Ljusare eller mörkare än bilden

Negativt:

Endast **röd** kontrollinje

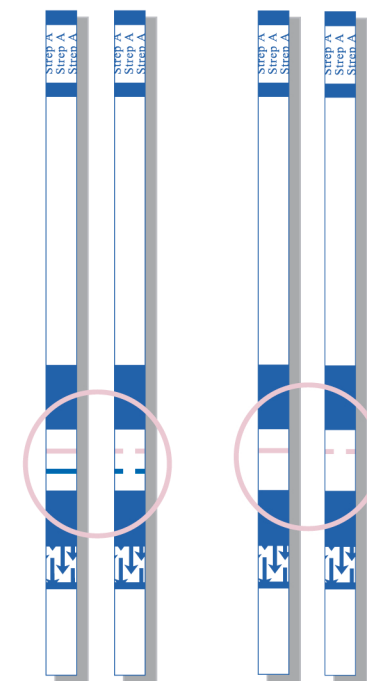

Positivt

Negativt



Tel.: +45 45765425
Fax: +45 45765725
info@medigroup.dk