

Provtagning från bakre svalgvägg - för viruspåvisning

Provtagaren bör bära plastförkläde, engångshandskar, munskydd samt skyddsglasögon/ visir.

1. Pinnen pressas och skrapas lätt mot den bakre svalgväggen och halsmandlarna så att celler och sekret fastnar på pinnen.
2. Dra pinnen över bakre svalgväggen 3 gånger för att få med tillräckligt med provmaterial.
3. Undvik att vidröra tungan och slemhinnor med provtagningspinnen.
4. Sätt ner pinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken ordentligt.
5. Pinnen ska vara kvar i röret under transporten till laboratoriet.
6. Provet förvaras kylt i avvaktan på transport.

Korrekt provtagning är avgörande för analysresultatet.

