

## Råd och stöd vid användande av provtagningsset för mikrobiologisk diagnostik

**För pinnprov till odling och direktpåvisning av bakterier och jästsvamp ska eSwab med ROSA eller BLÅ kork användas.**

Endast för analyser på remiss **Mikrobiologi** eller remiss **Multiresistenta bakterier/Hygien**. Undantaget analys för Chlamydia trachomatis/Gonokocker och Mycoplasma genitalium som har speciella provtagningsset. Se Analysportalen för respektive analys.

Det finns tre varianter av eSwab provtagningsset, alla rören innehåller flytande Amies' medium, det är pinnstorleken som skiljer:

- ROSA KORK med pinne för svalg, sår, MRB, genital- och faecesodling
- BLÅ KORK med pinne för nasofarynx och uretra
- BLÅ KORK med pediatrik pinne för nasofarynx på små barn

Provpinnen ska inte vara kvar i röret när det skickas in till laboratoriet. Se speciell anvisning i Analysportalen för respektive analys där dessa provset används.

Art nr 24433



Art nr 24432



Art nr 24431



## För pinnprov till virologisk diagnostik (viruspåvisning) ska $\Sigma$ -VCM-rör med RÖD kork användas

Endast för analyser under rubrik Viruspåvisning på remiss **Serologi/Virologi**.  
Se Analysportalen för respektive analys.

Det finns tre slags  $\Sigma$ -VCM provtagningsset att välja mellan, alla rören innehåller VCM-medium och har RÖD kork:

- STANDARD TJOCK PINNE: hud, slemhinna och svalg
- NASOFARYNX PINNE: nasofarynx
- PEDIATRISK NASOFARYNX PINNE: nasofarynx på små barn

Pinnen ska vara kvar i provröret när det skickas in till laboratoriet.

Art nr 25841



Art nr 25482



Art nr 25483

