

## Prov i Grå transportbox via Regionservice

**Från:**

Vårdenhet utanför sjukhusområdet



**Till:**

Labmedicin

Grå box finns i två varianter, en med **blått** vred som ska användas för provtransport till Klinisk kemi (inkl. Klinisk immunologi och transfusionsmedicin) och en med **grönt** vred som ska användas för transport till Klinisk Mikrobiologi.

Prov till övriga laboratorier får inte placeras i Grå transportbox.

### Prov som ej kan placeras i provrörsställ

Placera i mugg eller där det finns plats, men inte i remissfickan.

### Remisser

Får ej vikas.

Lägg remisserna i plastficka som placeras ovanpå proverna.

### Kylklamp

Placera en fryst kylklamp på avsedd plats vid packning.

### Tom box från Regionservice Transport

Transport lämnar lika många tomma boxar som de hämtar.

Ta ut kylklampen och frys den.

### Rengöring

Görs månadsvis den första måndagen i månaden och vid spill/läckage.

Sprittorka boxen, diska och sprittorka ställen. Byt absorbent (art nr 24470)

### Märkning på boxen

Röd tejprensa på lockets utsida betyder att boxen är tom.

Ta bort tejpens när proverna är packade.

Transport hämtar inga boxar märkta med röd tejp.

### Kontakt

labmedicin@skane.se

#### Klinisk kemi och Klinisk immunologi/Transfusionsmedicin Blått vred



#### Prover till Klinisk kemi

Placera akuta prover längst fram.

Placera övriga prover därefter.

Sortera remisserna i samma ordning.

#### Prover till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin/Blodcentral

Placera proven bakom prover till Klinisk kemi.

Sortera remisserna i samma ordning.

#### Klinisk mikrobiologi Grönt vred



Placera proven i löpande ordning.

Sortera remisserna i samma ordning.

Lägg burkprover eller prov som inte kan placeras i stället i lådan där det finns plats och sortera remisserna för sig.