

Prov med transport via Regionservice

Inom:

Sydvästra Skåne
Skånes universitetssjukhus Malmö



Till:

Labmedicin

Transportförpackningen skall alltid vara komplett och består av, wellåda med absorbent och inredning. Remisserna ska förvaras åtskilda från proven i särskilt fack.

Transporttjänsts hämtar provlåda/or och lämnar samtidigt samma antal tomma lådor.

Lägg inga lådor på lager.



Tänk på att:

- Vända remisslådans hål mot framkanten.
- Använda rörförlängare till mikroprov eller stoppa proven i ett större rör.
- Skruva åt korkarna ordentligt på urinrören.

Klinisk kemi låda


- Sortera proven i lådan enligt skiss.
- Lägg remisser som inte är Klinisk kemi Malmö eller icke dataremisser överst.
- Transportera i rumstemperatur 20-24°C.

Klinisk mikrobiologi låda

- Lägg inte för många prov i lådan, använd hellre två lådor.
- Placera blododlingar i därför avsedd låda.
- Transportera i kylådor med temperatur 4-10°C. Temperaturkontroller utförs i transportbilens lastutrymme och i kylåda.

Klinisk patologi låda

- Lägg inte utstryksglas till cytologi tillsammans med PAD-prover, glasen kontamineras av formalin.
- Transportera i rumstemperatur ca 20-24°C.

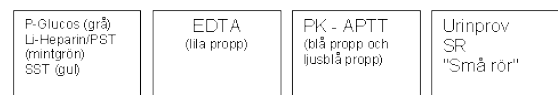

Eller ett område fullt går. Det bra att blanda rör med olika proppfärger

