

## Prov i Blå transportbox via Regionservice

**Från:**

Vårdenhet utanför sjukhusområde



**Till:**

Labmedicin



### Remisser

Placera remisser i avsett fack.  
Sortera i samma ordning som proverna.  
Får ej vikas.

### Provrör

#### **Klinisk mikrobiologi**

Placeras i raden längst bak.

#### **Klinisk immunologi och transfusionsmedicin/Blodcentral**

Placeras i mitten.

#### **Klinisk kemi**

Placera rör med specialremiss och akuta prover längst fram.

Prover sorteras därefter efter korkens färg, avsluta med PK-rören.

När två ställ packas ska PK-rören placeras i det understa stället.

#### **Prov till Klinisk Genetik och Patologi**

Får inte placeras i Blå transportbox utan skickas direkt till respektive laboratorium i Lund.

### Urinprov, burkar och objektglasbehållare.

Fördela, om möjligt, prover till olika laboratorier i separata muggar.

### Prov som inte kan placeras i provrörsställ eller mugg

Lägg proverna där det finns plats, men inte i remissfickan.

### Kylklamp

Placera en fryst kylklamp på avsedd plats i locket vid packning.

### Märkning

Röd tejprens på lockets utsida betyder att boxen är tom.

Ta bort tejpren när proverna är packade.

Transport hämtar inga boxar märkta med röd tejp.

### Tom box från Regionservice

Transport lämnar lika många tomma boxar som de hämtar.

Ta ut kylklampen och frys den.

### Rengöring

Vid spill/läckage sprittorkas boxen och absorbent byts.

Rengör de boxar som finns på plats första måndagen i månaden.

Sprittorka boxen och byt absorbent