

## Enstaka prov via Regionservice

**Från:**

Vårdenhet utanför sjukhusområdet



**Till:**

Labmedicin

Skicka enstaka prover i transporthylsa i provpåse.

Märk med returadress i de fall stor transportburk och kyltransportförpackning önskas i retur.

Kyl eller frystransport - se Analysportalen under Analyser och anvisningar, Laboratoriemedicin på webbplatsen Vårdgivare i Skåne.

Adressera provet direkt till analyserande laboratorium enligt Analysportalen.

Adressuppgift - se Laboratoriemedicin på webbplatsen Vårdgivare i Skåne.

### Transportförpackning för transport av enstaka prov

Artikelnummer (Art nr) nedan avser Skåneförrådet/OneMed.

#### Provpåsar

- Provpåse 220x330 (Bild 1) Art nr. 23598
- Provpåse vadderad 200x270 Art nr. 12094

#### Transporthylsor

För blodrör, sterila rör, övriga mindre rör. (Bild 3) Art nr. 3475

För sputumprov. (Bild 4) Art nr. 19088

För faeces på burk. (Bild 5) Art nr. 19530

Behållare för objektglas. (Bild 6) Art nr 2364

#### Kylda prover

Kyltransportförpackning. (Bild 7) Art nr. 17245

### Transportlådor (provbox) för cervixcytologi – VS

[www.provboxen.se](http://www.provboxen.se) (Bild 8)

### Transportsystem för flera prov/större volym (Bild 9)

Transportkartong. Art nr 26 069

Stor transportburk. Art nr 12 562

Absorbent. Art nr 12 560

Stödkors. Art nr 26 070

