

Prov med Posten eller annat ombud

Från:
Vårdenhet



Till:
Labmedicin eller annat laboratorium

Prov skickas som 'Biologiskt ämne, kategori B, UN 3373.

Vissa prov måste transporteras kylda eller frysta, se Analyser och anvisningar under Laboratoriemedicin på webbplatsen Vårdgivare i Skåne.

Ange korrekt adress. Felaktig eller ofullständig adress försenar leverans och svar. Uppgift om adress till Labmedicin se Laboratoriemedicin på webbplatsen Vårdgivare i Skåne.

Artikelnummer (Art nr) nedan avser Skåneförrådet/OneMed.

Provpåse

Art nr 12094



Etikett

Används propåse utan förtryckt etikett 'Biologiskt ämne, kategori B' ska etikett klistras på påsen innan transport.

Transporthylsor

1. För prov i sterilt rör, blodrör, övriga mindre rör. Art nr 3475.
2. För sputumprov, Ar nr 19088.
3. För faeces på burk. Art nr 19530.
4. Behållare för objektglas. Art nr 2364



För mer information, se Folkhälsomyndighetens "Packa provet rätt".