

Prov via Rörpost i Helsingborg, Kristianstad och Lund

Från:

Vårdenhet inom sjukhusområdet



Till:


Labmedicin

Skicka INTE följande prov med rörpost

- Likvor
- Aspirin effekt
- Prov på is eller i vattenbad
- Blodgaser i spruta
- P2Y12- hämning
- Vävnadsprov i formalin

Använd transporthylsa till:

1. Sputumburk
2. Glasrör och urinprover
3. Faeces på burk
4. TB-prover
5. Objektglas

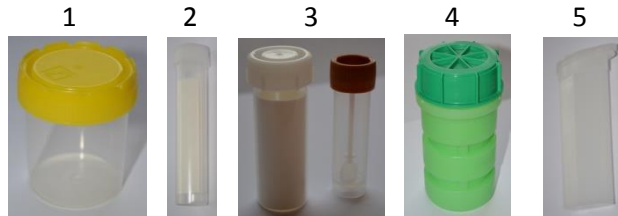

Packa övriga prov i plastpåse med fyra fickor:

- Vid ett fåtal rör läggs dessa i mittfickan.
- Max två blododlingsflaskor i varje påse.
- Om provförpackning inte får plats i små fickor läggs provet i den stora fickan för remiss.



Tänk på att

- Alla prov i påsen ska åtföljas av remiss i samma påse
- Remiss får inte vikas innan den läggs i remissfickan
- Vika ner "locket" på plastpåsen ordentligt
- Papperskuvert ska läggas i plastpåsen
- Påsen rullas ihop från kortsidan och omsluts av gummiband

