

Prov i Pappkartong via Regionservice

Från:

Skånes universitetssjukhus Malmö



Till:

Labmedicin i Malmö

Transportförpackningen skall alltid vara komplett och består av wellpapplåda med absorbent och inredning. Remisserna ska förvaras åtskilda från proven i särskilt fack.

Regionservice hämtar provlåda/or och lämnar samtidigt samma antal tomma lådor.

Lägg inga lådor på lager.



Tänk på att:


- Vända remisslådans håll mot framkanten.
- Använda rörförlängare till korta kapillärrör eller stoppa rören i ett större rör.
- Skruva åt korkarna ordentligt på urinprov i sterilt plaströr.

Låda till Klinisk kemi och Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

- Sortera proven i lådan enligt skiss.
- Lägg remisser till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin samt icke dataremiss till Klinisk kemi överst.
- Transportera i rumstemperatur 20-24°C.

P-Glucos (grå) Li-Heparin/PST (mintgrön) SST (gul)	EDTA (lila propp)	FK - APTT (blå propp och ljusblå propp)	Urinprov SR "Små rör"
---	----------------------	---	-----------------------------

Eller ett område fullt går det bra att blanda rör med olika proppfärger

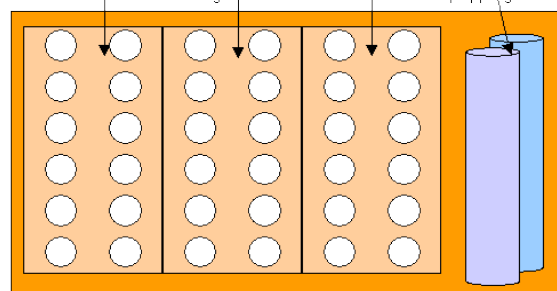

Låda till Klinisk mikrobiologi

- Blododlingar, provrör och burkar läggs i egen låda märkt Klinisk mikrobiologi.

Låda till Klinisk patologi

- Transportera i rumstemperatur ca 20-24°C.
- OBS – cytologiprover adresseras och skickas direkt till Klinisk patologi Lund.