

## Förbrukningsmaterial Enteral Nutrition- Lathund

De flesta enterala infarter, aggregat och övrigt förbrukningsmaterial som produceras i dagsläget har ENFit-koppling. Enterala infarter som producerats tidigare kan ha ENLock-koppling vilket innebär att en adapter krävs för att aggregat och förbrukningsmaterial ska passa. Vygon, som tillverkar sonden "Nutrisafe 2", har en egen "säkerhetskoppling" och förbrukningsmaterial med ENFit eller ENLock passar därför inte direkt i Vygons egna sonder.

### Enteral infart med *ENFit*

#### Sondmatsaggregat

Nestlés sondmatningsaggregat till Compat Ella (*artnr. 26330*) har ENFit-koppling och passar därför direkt i enterala infarter med ENFit-koppling:



Enteral infart (ENFit)




Sondmatsaggregat  
(*artnr. 26330*)

#### Enteral spruta

Vygons enteralsprutor *Nutrifit* passar direkt i enterala infarter med ENFit-koppling:



Enteral infart (ENFit)

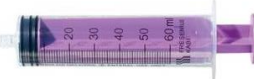

Nutrifit enteralspruta  
(*artnr. 26543 (20ml)/ 26544 (60ml)*)

## Enteral infart med *ENLock* (konisk)

### Sondmatsaggregat

Nestlés sondmatningsaggregat till *Compat Ella* (artnr. 26330) har *ENFit*-koppling och adapter till *ENLock* medföljer *inte*. För att *Compat Ella*-aggregatet ska passa behövs därför en adapter (artnr. 25183 (10-pack) eller 26780 (50-pack)) som beställs separat:



Enteral infart (ENLock)



Adapter ENFit- ENLock  
(artnr 25183/ 26780)



Sondmatsaggregat  
(artnr. 26330)

### Enteral spruta

Enteralsprutorna *Nutrifit* har en *ENFit*-koppling och någon *ENLock* adapter medföljer *inte*. Därför behövs en adapter (artnr. 25183 (10-pack) eller 25183 (50-pack)) som beställs separat för att sprutorna ska passa i enterala infarter med *ENLock*:



Enteral infart (ENLock)



Adapter ENFit- ENLock  
(artnr 25183/ 26780)



Nutrifit enteralspruta  
(artnr. 26543 (20ml)/ 26544 (60ml))

## Enteral infart "Nutrisafe 2" utan ENFit (Vygon)

### Sondmatsaggregat

För att använda Nestlés sondmatsaggregat till Compat Ella i en Vygonsond krävs en adapter (*artnr. 26326*) som omvandlar ENFit till Vygons säkerhetskoppling:



Nutrisafe 2-sond  
(Vygon)



Liten lila Vygon adapter  
(*artnr. 26326*)



Sondmatsaggregat

### Enteral spruta

*Alternativ 1.* Vygons enteralsprutor "Nutrisafe" (*t.ex. artnr. 22650*) passar direkt i en Vygonsond. Ingen adapter behövs:



Nutrisafe 2-sond  
(Vygon)



Nutrisafe enteralspruta  
(*artnr. 22649 (20ml)/ 22650 (60ml)*)

*Alternativ 2.* Vygons enteralsprutor "Nutrifit" (*t.ex. artnr. 26544*) med ENFit kan användas med Vygons adapter (*artnr. 26326*):



Nutrisafe 2-sond  
(Vygon)



Liten lila adapter  
(*artnr. 26326*)



Nutrifit enteralspruta  
(*artnr. 26543 (20ml)/ 26544 (60ml)*)



Johanna Lundin,  
Leg. Dietist.  
[johanna.lundin@skane.se](mailto:johanna.lundin@skane.se)  
044-3092477

2018-07-09

## Sammanställning av artikelnummer

### *Enteral infart med ENFit/ENLock*

#### **Spruta**

26543 Enteralspruta Nutrifit 20ml (ENFit)  
26544 Enteralspruta Nutrifit 60ml (ENFit)

#### **Aggregat**

26330 Sondmatningsaggregat till Compat Ella, spike set (ENFit)

#### **Adapter**

25183 Vit adapter mellan ENFit och ENLock (10- pack)  
26780 Lila adapter, samma användningsområde som 25183 (50-pack, 50 öre billigare/styck)

### *Enteral infart "Nutrisafe 2" utan ENFit/ENLock (Vygon)*

#### **Spruta**

22649 Nutrisafe enteralspruta 20ml (Vygons säkerhetskoppling)  
22650 Nutrisafe enteralspruta 60ml (Vygons säkerhetskoppling)

#### **Adapter**

26326 Liten lila adapter mellan ENFit och Vygons säkerhetskoppling  
23796 Lila adapter mellan ENLock och Vygons säkerhetskoppling

#### **Övrigt**

#### **Ryggsäck till Compat Ella (både ryggsäck och bordsstativ krävs!)**

26327 Bordsstativ till Compat Ella. Används som insats i ryggsäcken.  
26328 Ryggsäck utan bordsstativ

#### **Flexibaggle**

16171 Compat Flexibaggle 500ml