

Lathund – Förbrukningsmaterial vid enteral nutrition

De flesta enterala infarter, aggregat och övrigt förbrukningsmaterial som produceras i dagsläget har ENFit-koppling. Enterala infarter som producerats tidigare kan ha en konformad koppling vilket innebär att en adapter krävs för förbrukningsmaterial ska passa. Vygon, som tillverkar sonden "Nutrisafe 2", har en egen "säkerhetskoppling" och förbrukningsmaterial med ENFit eller konform passar inte direkt i Vygons egna sonder.

Enteral infart med *ENFit*

Sondmatsaggregat

Nestlés sondmatningsaggregat är det aggregat som passar i pumpen Compat Ella. Aggregatet Standard Spike-set har en ENFit-koppling och passar direkt i enterala infarter med ENFit-koppling.



Enteral infart (ENFit) → Standard Spike-set (Nestlé) ENFit
t.ex. sond/gastrostomi
Artnr. 26330

Enteral spruta

Följande sprutor passar direkt i enterala infarter med ENFit-koppling. Sedan september 2020 beställs flergångssprutor till patienter med enteral nutrition i hemmet:



Enteral infart (ENFit) → Nutrifit ENFit (Vygon), enteralspruta
t.ex. sond/gastrostomi
Artnr. 26543 (20ml) / 26544 (60ml)
Enångspruta, används på sjukhus
och på särskilt boende/vårdinrättning

eller

Enteral ISAsaf Home (Mediplast), enteral flergångsspruta
Artnr. 27424 (20ml) / 27425 (60ml)
Flergångspruta, används i hemmet
Obs! Rengöringsinstruktioner ska följas:

https://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/nutritionsportalen/enteral_nutrition_instruktion_flergangsspruta.pdf

Enteral infart med *konform* (konisk)

Sondmatsaggregat

Nestlés sondmatningsaggregat till Compat Ella har ENFit-koppling och adapter till konform *medföljer inte*. För enteral infart med konform behövs en mellankoppling, den beställs separat.



Enteral infart (konform) → Adapter ENFit till Konform → Standard Spike-set (Nestlé) ENFit
t.ex. sond/ gastrostomi
50-pack
Artnr. 26780
Artnr. 26330

Enteral spruta

Enteralsprutorna Nutrifit och Enteral ISAsaf Home har en ENFit-koppling och adapter till konform *medföljer inte*. För enteral infart med konform behövs en mellankoppling, den beställs separat.



Enteral infart (konform) → Adapter ENFit till Konform → Nutrifit ENFit (Vygon), enteralspruta
t.ex. sond/ gastrostomi
50-pack
Artnr. 26780
Artnr. 26543 (20ml) / 26544 (60ml)
Enångspruta, används på sjukhus
och på särskilt boende/vårdinrättning
eller

Enteral ISAsaf Home (Mediplast), enteral flergångsspruta
Artnr. 27424 (20ml)/ 27425 (60ml)
Flergångspruta, används i hemmet
Obs! Rengöringsinstruktioner ska följas.

Enteral infart "Nutrisafe 2" utan ENFit (Vygon)

Sondmatsaggregat

För att använda Nestlés sondmatsaggregat i en Vygonsond krävs en mellankoppling som omvandlar Vygons säkerhetskoppling till ENFit. Mellankopplingen *medföljer inte* utan beställs separat. **OBS!** *Nutrisafe 2 används främst på neonatalavdelning och för vuxna patienter som får en nasojejunal sond, detta då nuvarande sond som används vid nasogastrisk sond är för kort.*



Nutrisafe 2-sond
(Vygon)



Adapter ENFit till NS2-sond
Artnr. 26326



Standard Spike-set (Nestlé) ENFit
Artnr. 26330

Enteral spruta

Alternativ 1. Vygons enteralsprutor "Nutrisafe" passar direkt i en Vygonsond.
Ingen adapter behövs:



Nutrisafe 2-sond
(Vygon)



Nutrisafe 2 (Vygon), enteralspruta
Artnr. 22649 (20ml) / 22650 (60ml)


Alternativ 2. Vygons enteralsprutor "Nutrifit" passar med ENFit och kan därför användas endast med Vygons adapter:



Nutrisafe 2-sond
(Vygon)



Adapter ENFit till NS2-sond
Artnr. 26326

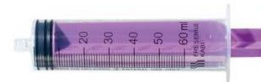

Nutrifit ENFit (Vygon), enteralspruta
Artnr. 26543 (20ml) / 26544 (60ml)

eller

Enteral ISAsaf Home (Mediplast), enteral flergångspruta
Artnr. 27424 (20ml) / 27425 (60ml)



Sammanställning av artikelnummer

Till enteral infart med ENFit/konform

Aggregat

26330 Sondmatningsaggregat till Compat Ella, Spike set (ENFit)

Spruta

26543 Nutrifit ENFit (Vygon), enteralspruta (20ml) ENFit

26544 Nutrifit ENFit (Vygon), enteralspruta (60 ml) ENFit

27424 Enteral ISAsaf Home (Mediplast), enteral flergångsspruta (20 ml) ENFit

27425 Enteral ISAsaf Home (Mediplast), enteral flergångsspruta (60 ml) ENFit

Adapter

26780 Lila adapter ENFit till konformad infart (50-pack)

Till enteral infart "Nutrisafe 2-sond" (Vygon) utan ENFit/konform

Spruta

22649 Nutrisafe 2 (Vygon), enteralspruta (20 ml) Vygons säkerhetskoppling

22650 Nutrisafe 2 (Vygon), enteralspruta (60 ml) Vygons säkerhetskoppling

Adapter

26326 Lila adapter mellan ENFit och Vygons säkerhetskoppling.
Med adaptern kan man beställa Nutrifit och Enteral ISAsaf Home.

23796 Lila adapter mellan konform och Vygons säkerhetskoppling

Övrigt

Ryggsäck till Compat Ella (både ryggsäck och bordsstativ krävs!)

26327 Bordsstativ till Compat Ella. Används som insats i ryggsäcken.

26328 Ryggsäck utan bordsstativ

Flexibaggle

16171 Compat Flexibaggle (500ml)