

**PRODUKTBLAD**



**Produktnamn:** nutrifit<sup>®</sup>

**Beskrivning:** Enteralsprutor flergångs med ENFit-koppling.

Art.nr	Storlek	Avd.förp (st)	Transp.förp (st)	Pall förp (st)
1012.018	1 ml LDT	100	2400	48000
1012.028	2,5 ml LDT	100	2000	40000
1012.058	5 ml LDT	100	1600	32000
1012.107	10 ml	100	1000	19000
1012.207	20 ml	80	800	15200
1012.607	60 ml	60	240	7200

**Material:** PP, syntetisk gummi. Latexfri och PVC-fri

**Övrig Information:** Kompatibel med ISO 80369-3. Kan rengöras och återanvändas till samma patient upp till 30 gånger (se rengöringsanvisning på nästa sida). Kan inte användas i sprutpump.

**Produkten är CE-märkt:** Ja

## RENGÖRINGSANVISNING

Följande process har validerats för rengöring och återanvändning av sprutor i upp till 30 cykler.

-Rengör sprutan omedelbart efter användning med varmt kranvatten (vid 50 °C). Dra ut och skjut in kolven flera gånger tills alla spår av näring eller läkemedel har försvunnit från insidan av sprutans spets, cylindern och kolven.

-Ta ut kolven ur cylindern och rengör dem noga var för sig i varmt kranvatten (vid 50 °C). Se till att alla spår av smuts avlägsnas från insidan av sprutans spets, cylindern och kolven.

-Skölj cylindern och kolven under kallvattenkranen och skaka av överflödigt vatten.

-Låt kolv och cylinder lufttorka innan de sätts ihop igen.