

PRODUKTOMRÅDE INKONTINENS

Absorberande produkter

Fixeringsprodukter

Hygienunderlägg och lakansskydd

Kateter

Urindropsamlare

Urinuppsamlingspåsar

Urin- och avföringsstoppande hjälpmedel

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

ABSORBERANDE HJÄLPMEDEL

Barn

Herr

Skydd för fixering i byxa

Skydd i byxform

Allt-i-ett-skydd

Allt-i-ett-byxa

Avföringsinkontinens

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande hjälpmedel för barn

- [Bambo Nature](#)
- [Liberio Comfort fit](#)
- [Muumi Baby](#)
- [Bambo Nature pants](#)
- [Muumi Baby Walker](#)
- [Dreamy Night Pants](#)
- [Sanifix med absorberande gren pojkar](#)
- [Rose](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för barn - engångs

Bambo Nature – [Abena](#)

Svanen-märkta Bambo Nature är en allt-i-ett blöja, framställd utan optiska vitmedel, parfym eller hudlotion. Blöjan har ett andningsbart spärrskikt, klätt med ett textilliknande material för att förhindra hudirritationer. Stående läckagebarriärer minskar risken för sidoläckage och kanaler i kärnan får snabbt bort vätskan från huden. Kardborreförslutningen kan öppnas, flyttas och återförslutas. Dermatologiskt testade samt certifierade av Astma och Allergi Förbundet.

Fakta	
Ytskikt	non-woven polypropen
Abs. skikt	Cellulosafloff, superabsorbent
Spärrskikt	Polyeten, polypropen
Resår	Elastan



Storlek	Sesamnummer	Abs kapacitet ml	Användarvikt kg	Antal/fp	Pris/st
4	31821	854	7-14	144	1,85
5	31822	868	12-28	132	1,98
6	31823	941	16+	120	2,15

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för barn - engångs

Libero Comfort – [Essity](#)

Libero Comfort är en mjuk och bekväm barnblöja, tillverkad i hudvänliga och flexibla material. Dubbla läckagebarriärer, bra passform runt benen, och en tunn och superabsorberande kärna gör produkten läckagesäker för dag och nattanvändning.

Blöjorna är lotionfria, dermatologiskt testade, Svanenmärkta och rekommenderade av Astma & Allergiförbundet. Fixeras med stretchbara kardborrfästen som kan öppnas, flyttas och återförslutas.

Fakta	
Ytskikt	non-woven polypropen
Abs. skikt	Cellulosaluff, superabsorbent
Spärrskikt	Polyeten
Resår	SBS, polyester, polyuretan



Storlek	Sesamnummer	Abs kapacitet ml	Användarvikt kg	Antal/fp	Pris/st
6	30281	937	13-20	176	1,94

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för barn - engångs

Muumi Baby – Gavea

Muumi Baby blöjor är ekologiska, mjuka, hudvänliga och har perfekt passform. De Svanenmärkta blöjorna tillverkas i södra Finland av ett familjeföretag i andra generationen och är utvecklade i samarbete med Allergi-, Hud- och Astmaförbundet. Blöjorna är dermatologiskt testade och innehåller inte parfymer, salvor, latex, formaldehyder eller ftalater som kan irritera känslig hud. Blöjorna tillverkas endast av rena, trygga råvaror och den 100 % klorfria cellulosan kommer från nordiska hållbart skötta skogar. Vid produktionen förorsakas inga utsläpp i miljön eller i vattendrag. Inget avfall uppstår, allt återanvänds eller förbränns till energi. Vid produktionen används endast vattenkraft, som är en förnybar energiform som inte förorsakar koldioxidutsläpp. Förpackningen är tillverkad av biologiskt nedbrytbart material och kan återanvändas som bioavfallspåse.

Fakta

Ytskikt	Non-woven polypropen
Abs. skikt	Cellulosafluff, superabsorbent
Spärrskikt	Polyeten
Resår	Elastan



Storlek	Sesamnummer	Abs kapacitet ml	Användarvikt kg	Antal/fp	Pris/st
4	31771	800	7-14 kg	138	1,99 kr
6	31772	950	12-24 kg	108	2,21 kr

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för barn - engångs

Bambo Nature Pants – [Abena](#)

Svanen-märkta Bambo Nature Pants är en allt-i-ett blöja i byxmodell, framställd utan optiska vitmedel, parfym eller fuktlotion. Blöjan har ett andningsbart spärrskikt klätt med ett textilliknande material för att förhindra hudirritationer. Stående läckagebarriärer minskar risken för sidoläckage och kanaler i kärnan får snabbt bort vätskan från huden. De elastiska sidorna går lätt att riva upp vid byte. Dermatologiskt testade samt certifierade av Astma och Allergi Förbundet.

Fakta	
Ytskikt	non-woven polypropen
Abs. skikt	Cellulosaflopp, superabsorbent
Spärrskikt	Polyeten, polypropen
Resår	Lycra



Storlek	Sesamnummer	Abs kapacitet ml	Användarvikt kg	Antal/fp	Pris/st
5	31824	922	12-18 kg	100	2,56 kr
6	31825	935	15+	90	2,76 kr

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel

VO Hjälpmedel

Absorberande produkter för barn - engångs

Muumi Baby Walker – Gavea

Muumi Baby blöjor är ekologiska, mjuka, hudvänliga och har perfekt passform. De Svanenmärkta blöjorna tillverkas i södra Finland av ett familjeföretag i andra generationen och är utvecklade i samarbete med Allergi-, Hud- och Astmaförbundet. Blöjorna är dermatologiskt testade och innehåller inte parfymer, salvor, latex, formaldehyder eller ftalater som kan irritera känslig hud. Blöjorna tillverkas endast av rena, trygga råvaror och den 100 % klorfria cellulosan kommer från nordiska hållbart skötta skogar. Vid produktionen förorsakas inga utsläpp i miljön eller i vattendrag. Inget avfall uppstår, allt återanvänds eller förbränns till energi. Vid produktionen används endast vattenkraft, som är en förnybar energiform som inte förorsakar koldioxidutsläpp. Förpackningen är tillverkad av biologiskt nedbrytbart material och kan återanvändas som bioavfallspåse.



Fakta	
Ytskikt	Non-woven polypropen
Abs. skikt	Cellulosaluff, superabsorbent
Spärrskikt	Polyeten
Resår	Elastan

Storlek	Sesamnummer	Abs kapacitet ml	Användarvikt kg	Antal/fp	Pris/st
7	31773	910	16-26 kg	102	2,97 kr

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för barn - engångs

Dreamy Night Pants – [Abena](#)

Bambo Dreamy Night Pants Girls och Boys är en högabsorberande byxskydd, som liknar vanliga underkläder för natten och för äldre barn. Skydden är anpassade för såväl pojkar som flickor. Längs med skydden går läckagebarriärer, som hindrar risken för sidoläckage. Skydden är också utrustade med kanaler och Top Dry för känsla av torrhet. Skydden innehåller superabsorbenter som snabbt absorberar vätskan samt minskar risken för oönskad lukt. Andningsbart spärrskikt, klätt med ett textilliknande material (non woven), förhindrar hudirritation och ger optimal komfort. Sidorna är av mjuk och elastisk nonwoven, som lätt går att riva upp när skyddet är förbrukat.

Fakta	
Ytskikt	Nonwoven polypropen
Abs. skikt	Cellulosamassa
Spärrskikt	Polyeten
Resår	Elastik av polyuretan, latexfri



Storlek	Sesamnummer	Abs kapacitet ml	Användarvikt kg	Antal/fp	Pris/st
4-7 Boy	31815	962	15-35 kg	60	5,51 kr
4-7 Girl	31814	962	15-35 kg	60	5,51 kr
8-15 Boy	31817	975	35-50 kg	60	6,79 kr
8-15 Girl	31816	975	35-50 kg	60	7,04 kr

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för barn - tvättbara

Sanifix med absorberande gren för pojkar– [Swereco](#)

Underkläder med absorberande gren som har hög kapacitet för maximal säkerhet. Ett alternativ till engångsprodukter. Tål att tvättas i vanlig hushållstvätt upp till 200 gånger utan att förlora passform och uppsugningsförmåga. Bör tvättas före första användning.

Fakta

Material	95% Bomull, 5% Spandex
Abs. skikt	70% Viskos, 30% polyester
Spärrskikt	Polyuretan
Tvättråd	90° C. Använd inte sköljmedel. Kan torktumlas. Låg temperatur.



Storlek	Sesamnummer	Abs kapacitet ml	Midjeomfång cm	Antal/fp	Pris/st
3-4 år	30158	150	45-55	1	48,94 kr
5-6 år	30159	150	50-60	1	48,94 kr
7-8 år	30160	150	55-66	1	48,94 kr
9-10 år	30161	150	60-71	1	48,94 kr
11-12 år	30162	150	71-80	1	48,94 kr

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för barn - tvättbara

Rose – [Heinex](#)

Tvättbar inkontinenstrosa med skyddande spärrskikt i grenen. Ska tvättas innan användning

Fakta

Material	92% Bomull, 8% Elastan
Abs. skikt	Viskos & Polyester
Spärrskikt	Polyuretan
Tvättråd	60° C, torktumlas i max 70° C



Storlek	Sesamnummer	Abs kapacitet ml	Midjeomfång cm	Antal/fp	Pris/st
3-4 år	31999	180	45-55	1	42 kr
5-6 år	32000	180	44-59	1	42 kr
7-8 år	32001	180	47-62	1	42 kr
9-10 år	32002	180	50-65	1	42 kr
11-12 år	32003	180	53-68	1	42 kr

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande hjälpmedel för män

- [Attends for men](#)
- [TENA men](#)
- [Abena Man](#)
- [Abri-Man Slipguard](#)
- [MoliCare Premium MEN](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – fixeras i byxa

Attends for men – [Attends](#)

Attends for men är avsett för män med droppinkontinens eller små urinläckage. Skydden innehåller superabsorbenter, Odour Protection, som ska minska risken för oönskad lukt. Attends for men är ett öppet skydd som appliceras över penis och pung. Fixeras med hjälp av tejp på utsidan i tätt sittande kalsong eller fixeringsbyxa



Fakta	
Ytskikt	non-woven Polypropen
Abs. skikt	Torrformerad cellulosa, superabsorbent
Spärrskikt	Polyeten och non-woven polypropen

Storlek	Sesamnummer	Abs kapacitet ml	Längd, cm	Bredd, cm	Antal/fp	Pris/st
1	30133	117	18	18,6	100	1,88 kr
2	30084	216	18	18,6	64	1,88 kr
3	31970	584	29	23	168	1,54 kr

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – fixeras i byxa

Tena Men – [Essity](#)

TENA inkontinensskydd för män finns i flera olika storlekar för små till medelstora urinläckage. Tack vare mjuk skumelastik i produktens sidor kupformas skyddet automatiskt för en läckagesäker passform. Skydden sitter säkert och diskret i vanliga åtsittande kalsonger och fixeras med en långsgående tejpremsa på produktens undersida. Superabsorbenter ger en snabb absorption och reducerar risken för dålig lukt. Samtliga skydd i TENA Men-serien är enstycksförpackade för hygienisk hantering och diskretion. Tena Men är nu även svanenmärkta, uppdateras från v. 33 2022 med ny förpackningsdesign.



Fakta

Ytskikt	non-woven Polypropen
Abs. skikt	Cellulosafloff, superabsorbent
Spärrskikt	Polyeten
Resårer	Polyisopren

Storlek	Sesamnummer	Abs kapacitet ml	Längd, cm	Bredd, cm	Antal/fp	Pris/st
Extra shield	31688	162	18	13,8	14	1,52 kr
Nivå 2	30312	501	27	23,6	20	1,65 kr
Nivå 3	31460	735	27	23,6	16	1,7 kr

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – fixeras i byxa

Abena Man – [Abena](#)

Abena Man Formula 0 & 2 ger skydd mot läckage genom unika, fickformade långsgående barriärer. Skyddet har mikropunkterat toppskikt, kanalsystem och Top Dry ger snabb spridning och absorption av vätskan. Omsluter penis och pung. Dermatologiskt testad. Skydden innehåller superabsorbenter, som snabbt absorberar och sprider vätskan samt minskar risken för oönskad lukt. Andningsbart spärrskikt, klätt med ett textilliknande material, förhindrar hudirritation och ger optimal komfort.



Fakta	
Ytskikt	Non-woven av polypropen
Abs. skikt	Cellulosamassa
Spärrskikt	Polyeten
Resårer	Elastan,

Storlek	Sesamnummer	Abs kapacitet ml	Längd, cm	Bredd, cm	Antal/fp	Pris/st
Formula 0	31812	335	19	22,4	240	1,03 kr
Formula 2	31813	700	29	23	180	1,27 kr

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter


Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – fixeras i byxa

Abri-Man Slipguard Premium – [Abena](#)

Abri-Man Slipguard, herrskydd som omsluter både penis och pung.
Andningsbart spärrskikt, klätt med ett textilliknande material.
Fixeras med tajt kalsong eller fixeringsbyxa.

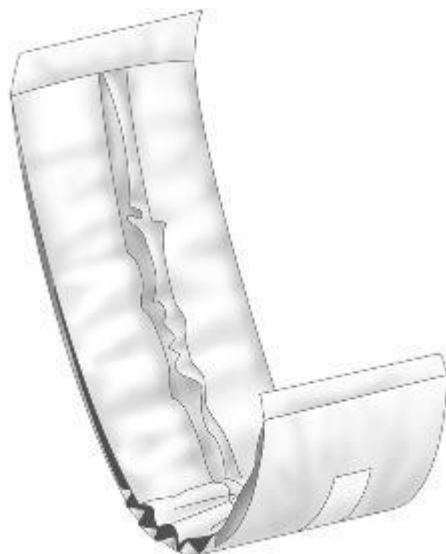

Fakta

Ytskikt	Nonwoven av polypropen
Abs. skikt	Cellulosamassa
Spärrskikt	Polyeten

Sesamnummer	Abs kapacitet ml	Längd, cm	Bredd, cm	Antal/fp	Pris/st
31645	856	40	8,5	100	2,34 kr

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – fixeras i byxa

MoliCare Premium MEN – [Hartmann](#)

MoliMed for men protect är avsett för män med medelstora urinläckage, Skyddet har trelagers absorptionsdyna med WhiteDry Plus, som ska leda undan vätskan och hålla huden torr samt minska risken för oönskad lukt. Läckagebarriärer finns längs hela skyddet. Spärrskiktet är klätt med non-woven, vilket ska förhindra prassel. Fixeras med hjälp av tejp på undersidan i tätt sittande kalsong eller fixeringsbyxa



Fakta

Ytskikt	non-woven polypropen
Abs. skikt	Cellulosafloff, superabsorbent
Spärrskikt	Polyeten

Absorption	Sesamnummer	Abs kapacitet ml	Längd, cm	Bredd, cm	Antal/fp	Pris/st
2 Droppar	30200	330	15	11,5	168	2,15

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Skydd för fixering i byxa

- [ABENA San](#)
- [Abena-Light](#)
- [Attends Soft](#)
- [TENA Lady](#)
- [Attends Contours Air Comfort](#)
- [TENA Comfort](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel

VO Hjälpmedel

Absorberande produkter för vuxna – fixeras i byxa

ABENA San – [Abena](#)

ABENA San är kroppsformade skydd mot urinläckage vid lätt till måttlig inkontinens. Kärnan med Top-Dry-teknik skapar snabb absorption och en torr yta. Produkten har full andningsförmåga och är utrustade med osynliga läckagebarriärer. Tillsammans hjälper dessa till att skydda huden och bibehålla naturlig pH-balans i huden.

Odörsystemet minskar risken för oönskad lukt. Dermatologiskt testad och tillverkad av FSC-certifierade material. Svanenmärkt.

Storlekar 1 – 4 har självhäftande tejp. Storlek 5 – 11 har inte självhäftande tejp.

Storlek	Sesamnummer	Abs kapacitet ml	Längd, cm	Bredd, cm	Antal/f p	Pris/st
1	30006	209	22	10	280	0,53
1A	30007	290	28	10	336	0,53
2	30008	377	26	10	252	0,60
3	30009	573	33	11	196	0,72
3A	31858	594	33	11	196	0,65
4	31859	775	44	20	252	0,87
5	31537	1127	54	28	144	1,51
6	31716	1554	63	30	102	1,75
7	31538	2134	63	36	12	1,98
8	31860	2482	63	36	84	2,26
11	31454	3283	73	37	64	2,82



Fakta	
Ytskikt	non-woven polypropylen
Abs. skikt	Cellulosafloff, superabsorbent
Spärrskikt	Polyeten

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – fixeras i byxa

Abena-Light – [Abena](#)

Abena Light är ett kroppsformat skydd med liggande läckagebarriärer, som minskar risken för sidoläckage. Skyddet innehåller superabsorbenter, som snabbt och jämnt sprider och absorberar vätskan samt minskar risken för oönskad lukt. Andningsbart spärrskikt, klätt med ett textilliknande material (non-woven), förhindrar hudirritation och ger optimal komfort. Fixeras enkelt med tejp i fixeringsbyxa eller tajt trosa.



Fakta

Ytskikt	non-woven polypropylen
Abs. skikt	Cellulosaluff, superabsorbent
Spärrskikt	Polyeten

Storlek	Sesamnummer	Abs kapacitet ml	Längd, cm	Bredd, cm	Antal/fp	Pris/st
Mini	31810	199	22	10	20	0,50
Extra Plus	31446	627	33	11	10	0,87
Super	31811	829	42	20	30	0,94

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – fixeras i byxa

Attends Soft – [Attends](#)

Attends Soft är ett anatomiskt utformat skydd med spärrskikt och textilt ytskikt. Superabsorbenter ska motverka uppkomst av oönskad lukt. Superabsorberande kärna med spridningsskikt för ökad läckagesäkerhet, torrhet och minskad lukt. De fem mindre skydden är enstycksförpackade. Fixeras med tejp på skyddets utsida i tätt sittande underkläder. I slutet av 2022 blir det en ny, miljövänlig förpackning innehållande minst 30% återvunnen plast och med Svanen- samt Oeko-Tex-certifieringarna tydligt uppmärka på förpackningen. Det har även tillkommit ett nytt releasepapper på produkterna med ännu tydligare användarinstruktion. Produkterna har fått ett extra mjukt ytskikt som nu är helt fritt från tryck.

Fakta

Ytskikt	Polypropylen
Abs. skikt	Cellulosafloff, superabsorbent
Spärrskikt	Polypropen, polyeten
Resårer	Polyuretan



Storlek	Sesamnummer	Abs kapacitet ml	Längd, cm	Bredd, cm	Antal/fp	Pris/st
1 Mini	30102	195	21,5	8	240	0,43
1 Mini Long	30099	228	27,5	8	192	0,46
2 Normal	30111	350	26,5	10,5	96	0,58
3 Extra	30112	495	32,5	12	80	0,76
3 Extra Plus	30100	650	36,5	13	120	0,92
4 Super	30124	849	38,5	14,5	138	1,01

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – fixeras i byxa

TENA Lady– [Essity](#)

TENA trosskydd och bindor ger trippelt skydd mot läckage, lukt och fukt. De hjälper användaren att hålla sig torr, säker och trygg varje dag och natt. Superabsorbenter ger en snabb absorption och reducerar risken för dålig lukt. Skydden har en kroppsformad design som ger en säker och bekväm passform. De mindre storlekarna har en absorberande kärna med superabsorbenter och ett ytskikt, SilkySoftness, som ger hög absorptionshastighet och bra återvätningsegenskaper. De större storlekarna har två absorberande kärnor och elastik i sidorna, vilket ger en torr yta och minskad risk för läckage. Mini, Mini Plus, Mini Plus Wing samt Extra Plus är enstycksförpackade. Skydden fixeras med en långsgående tejpresa på produktens undersida.



Fakta	
Ytskikt	non-woven polypropylen
Abs. skikt	Cellulosaluff, superabsorbenter
Spärrskikt	Polyetenfilm
Resårer	Polyuretan

Storlek	Sesamnummer	Abs kapacitet ml	Längd, cm	Bredd, cm	Antal/fp	Pris/st
Discreet Ultra Mini Plus	30326	126	26	8,1	144	0,44
Mini Plus	30320	231	25	10	160	0,61
Normal	30322	306	27	10,5	360	0,63
Extra	30323	531	34	12	240	0,80
Extra Plus InstaDry	30324	614	34	13	192	1,58
Super	30325	939	43	20	180	1,33

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – fixeras i byxa

Attends Contours Air Comfort – [Attends](#)

Attends Contours Air Comfort är avsett för medel till stora urin-/avföringsläckage. Spärrskiktet är täckt med non-woven för att undvika prassel och minimera risken för hudirritationer. Superabsorbenter minskar risken för oönskad lukt. Ett spridningsskikt av non-woven ökar absorptionshastigheten och yttorrheten. Har våtindikator. Fixeras med hjälp av fixeringsbyxa.



Fakta

Ytskikt	Non-woven polypropylen
Abs. Skikt	Cellulosaluff, superabsorbent
Spärrskikt	Polyeten, polypropen
Resårer	Polyuretan, polypropen

Storlek	Sesamnummer	Abs kapacitet ml	Längd, cm	Antal/fp	Pris/st
5	30101	1040	50	210	1,54
6	30091	1270	58	140	1,54
7	30092	1620	58	112	1,84
8	30093	2120	64,5	112	2,15
9	30094	2310	70	112	2,41
10	30103	2900	78,5	84	2,94

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – fixeras i byxa

TENA Comfort – [Essity](#)

TENA Comfort är avsett för medelstora till mycket stora urin-/avföringsläckage. Textilliknande material ventilerar värme och fukt, vilket minskar risken för hudirritationer och ger en ökad komfort. Superabsorbenter har en neutraliserande effekt på oönskad lukt. Anatomisk utformning med skålfomsbarriär. Har våtindikator. Används tillsammans med fixeringsbyxa



Fakta	
Ytskikt	Non-woven polyetylen
Abs. Skikt	Cellulosafloff, superabsorbent
Spärrskikt	Polyeten
Resårer	Polyisopren

Storlek	Sesamnummer	Abs kapacitet ml	Längd, cm	Antal/fp	Pris/st
Normal	30313	1128	52	126	1,40
Plus	30314	1643	63	92	1,68
Extra	30315	1844	63	80	2,04
Super	30316	2413	65	72	2,46
Maxi	30317	2985	65	56	2,95

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Skydd i byxform

- [TENA Silhouette](#)
- [Sanifix Herr](#)
- [Sanifix Dam](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – byxform

TENA Silhouette – [Essity](#)

TENA Silhouette är en absorberande engångstroša med inbyggda läckagebarriärer i kärnan och anatomisk passform. Innehåller superabsorbenter för att förebygga uppkomst av oönskad lukt. Sidosömmarna går att riva.



Fakta	
Ytskikt	non-woven
Abs. skikt	Cellulosafloff, superabsorbenter
Spärrskikt	Polyetenfilm
Resårer	Polyuretan

Storlek	Sesamnummer	Abs kapacitet ml	Längd, cm	Antal/fp	Pris/st
Silhouette M	30341	823	75-100	12	5,18
Silhouette L	30342	811	95-125	10	5,18

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – byxform

Sanifix Boxer med absorberande gren för herrar – [Swereco](#)

Sanifix Boxer är avsedd för män med droppinkontinens. Det är en tvättbar bomullsbyxa med absorberande gren och spärrskikt. Ska tvättas innan den tas i bruk för att aktivera absorptionen. Tål upp till cirka 200 tvättar.

Fakta	
Material	95% Bomull, 5% spandex
Abs. skikt	70% Viskos, 30% polyester
Spärrskikt	Polyuretan
Tvättråd	60°C - använd inte sköljmedel. Kan torktumlas vid låg temperatur.



Storlek	Sesamnummer	Höftvidd cm	Abs kapacitet ml	Antal/fp	Pris/st
S	30168	81-88	350	1	65,09
M	30169	91-97	350	1	65,09
L	30170	102-107	350	1	65,09
XL	30171	112-117	350	1	65,09
XXL	30172	122-132	350	1	65,09

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – byxform

Sanifix Dam med absorberande gren för damer– [Swereco](#)

Sanifix Dam är avsedd för kvinnor med små urinläckage. Det är en tvättbar bomullsbyxa med absorberande gren och spärrskikt. Ska tvättas innan den tas i bruk för att aktivera absorptionen. Tål upp till cirka 200 tvättar.

Fakta

Material	95% Bomull, 5% spandex
Abs. skikt	70% Viskos, 30% polyester
Spärrskikt	Polyuretan
Tvättråd	60°C - använd inte sköljmedel. Kan torktumlas vid låg temperatur.



Storlek	Sesamnummer	Höftvidd cm	Abs kapacitet ml	Antal/fp	Pris/st
S	30163	81-88	200	1	46,02
M	30164	91-97	200	1	46,02
L	30165	102-107	200	1	46,02
XL	30166	112-117	200	1	46,02
XXL	30167	122-132	200	1	46,02

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

ALLT-I-ETT-SKYDD

- [Attends Slip Regular](#)
- [Attends Adjustable](#)
- [TENA Slip](#)
- [Attends Flex](#)
- [TENA Flex](#)
- [ABENA Slip](#)
- [Abri-Wing](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – Allt-i-ett-skydd

Attends Slip Regular – [Attends](#)

Attends Slip är avsett för medelstora till mycket stora urin-/avföringsläckage. Spärnskiktet är klätt med non-woven. Skyddet har dubbla massakärnor och ett fördelningskikt som ökar torrhetskänslan. Innehåller superabsorbenter som minskar risken för oönskad lukt. Läckagebarriärer finns längs hela skyddet och bak. Skyddet har våtindikator och fixeras med återförslutningsbar kardborretejp. Finns i tre olika absorptionsnivåer.



Storlek	Sesamnummer	Höftvidd cm	Abs kapacitet ml	Antal/fp	Pris/st
8M	30088	80-110	1812	112	3,03
8L	30089	100-150	2138	112	3,51
9XS	30128	40-70	1498	128	2,74
9S	30126	50-85	1872	112	2,63
9M	30086	80-110	2040	112	3,03
9L	30087	100-150	2473	112	3,51
10S	30127	50-85	2214	112	2,63
10M	30125	80-110	2514	104	3,48
10L	30123	100-150	3175	52	4,28
10XL	30122	150-175	3260	56	4,61

Fakta	
Ytskikt	non-woven polypropen
Abs. Skikt	Cellulosafloff, superabsorbent
Spärnskikt	Polypropen, polyeten
Resårer	Polyuretan

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida


Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – Allt-i-ett-skydd

Attends Adjustable– [Attends](#)

Attends Adjustable är avsett för medelstora till mycket stora urin-/avföringsläckage. Spärnskiktet är klätt med non-woven. Skyddet har dubbla massakärnor och ett fördelningsskikt som ökar torrhetskänslan. Innehåller superabsorbenter som minskar risken för oönskad lukt. Läckagebarriärer finns längs hela skyddet och bak. Skyddet har våtindikator och fixeras med återförslutningsbar kardborretejp.

Fakta	
Ytskikt	non-woven polypropen
Abs. Skikt	Cellulosaluff, superabsorbent
Spärnskikt	Polypropen, polyeten
Resårer	Polyuretan

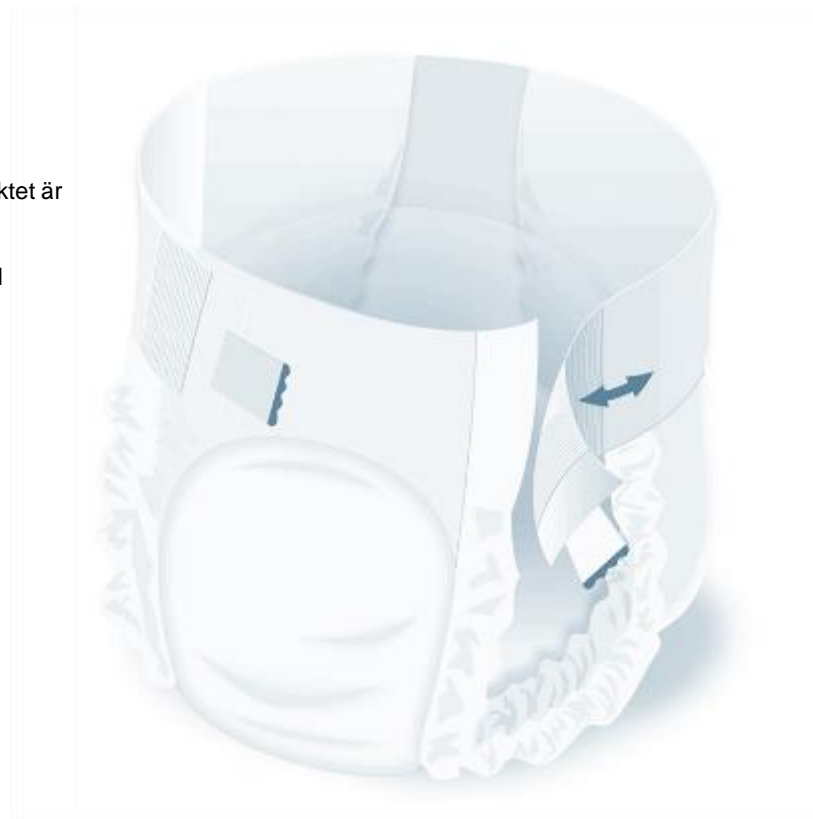

Storlek	Sesamnummer	Höftvidd cm	Abs kapacitet ml	Antal/fp	Pris/st
10 M	30109	80-110	2616	84	3,48
10 L	30110	100-150	3896	84	4,61

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – Allt-i-ett-skydd

TENA Slip – [Essity](#)

TENA Slip är ett mycket läckagesäkert och komfortabelt allt-i-ett skydd för medelstora till mycket stora urinläckage. Dubbla absorberande kärnor med superabsorbenter tillsammans med spridningsskiktet FeelDry™ gör att urinen sprids och absorberas effektivt. Ytan mot huden hålls torr vilket främjar en god hudhälsa. Vätskeavvisande läckagebarriärer, midjeelastik bak och hög elasticitet runt benen hjälper till att förhindra läckage. Mjuka textilliknande andningsbara material i hela produkten och sidopaneler helt i non-woven. Enkel hantering med kombinerad tejp och kardborre underlättar fixering och gör att skyddet enkelt att justera och återförsluta. Skyddet har Odour Neutralizer, våtindikator och tydlig färgmarkering (visar absorptionsnivå) finns för hjälp vid val av rätt produkt.



Storlek	Sesamnummer	Höftvidd cm	Abs kapacitet ml	Antal/fp	Pris/st
Plus XS	30290	50-75	1390	30	4,44 kr
Plus S	30291	55-85	1460	30	4,44 kr
Plus M	30293	70-120	2026	30	3,70 kr
Plus L	30294	90-145	2487	30	4,21 kr
Plus XL	31774	120-160	2468	30	5,36 kr
Super S	30298	55-85	1789	30	2,76 kr
Super M	31776	70-120	2475	28	4,10 kr
Super XL	30470	120-160	2950	28	4,47 kr
Maxi M	30296	70-120	3181	24	5,34 kr
Maxi L	30297	90-145	3696	22	4,84 kr
Maxi XL	31775	120-160	3926	24	5,34 kr
Ultima L	30292	90-145	4353	21	5,40 kr

Fakta

Ytskikt	non-woven polypropen, polyeten
Abs. Skikt	Cellulosafloff, superabsorbent
Spärrskikt	Polyetenfilm
Resårer	Polyisopren, polyuretan

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter


Absorberande produkter för vuxna – Allt-i-ett-skydd

Attends Flex – [Attends](#)

Attends Flex är avsett för medelstor till mycket stora urin/avföringsläckage. I grenpartiet finns ett insläpps- och spridningsmaterial QuickDry, vilket ska öka yttorrheten. Skyddet är anatomiskt utformat och har långsgående läckagebarriärer samt midjeresår fram och bak. Har våtindikator och fixeras med hjälp av återförslutbart höftbälte och kardborrband.

Fakta

Ytskikt	non-woven polypropen
Abs. Skikt	Cellulosaflopp, superabsorbent
Spärrskikt	Polyeten, non-woven polypropen
Resårer	Polyuretan

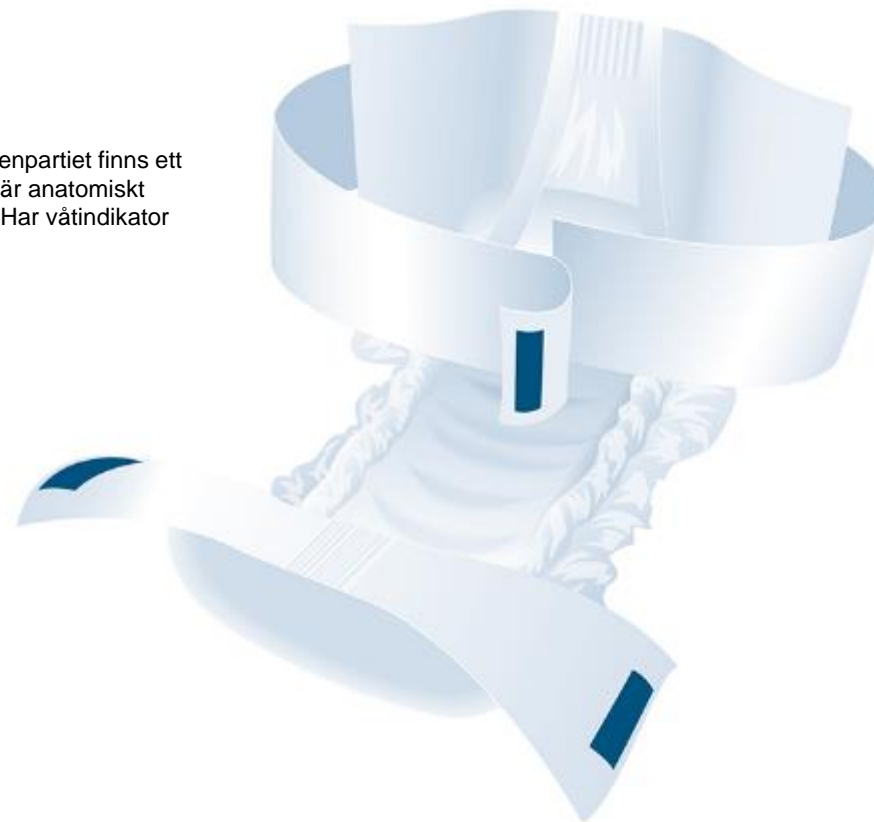

[Storlekar och annan information på nästa sida](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – Allt-i-ett-skydd

Attends Flex – [Attends](#)

Attends Flex är avsett för medelstor till mycket stora urin/avföringsläckage. I grenpartiet finns ett insläpps- och spridningsmaterial QuickDry, vilket ska öka yttorrheten. Skyddet är anatomiskt utformat och har långsgående läckagebarriärer samt midjeresår fram och bak. Har våtindikator och fixeras med hjälp av återförslutbart höftbälte och kardborrband.

Storlek	Sesamnummer	Höftvidd cm	Abs kapacitet ml	Antal/fp	Pris/st
8 S	31971	60-85	1548	28	3,62
8 M	31974	75-105	1892	28	3,81
8L	31976	85-125	2039	28	3,95
8 XL	31978	100-155	2419	26	4,39
9 S	31972	60-85	1774	26	3,62
9 M	31975	75-105	2203	26	4,39
9 L	31977	85-125	2427	26	4,50
9 XL	31979	100-155	2923	22	4,61
10 S	31973	60-85	2508	22	4,06
10 M	30471	70-105	3161	88	4,61
10 L	30473	85-125	3912	44	5,38
10 XL	30472	100-155	3918	80	5,16

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – Allt-i-ett-skydd

TENA Flex – [Essity](#)

TENA Flex är ett mycket läckagesäkert och bekvämt bältesskydd framförallt för vårdtagare som behöver hjälp vid byte. Ett unikt elastiskt höftbälte gör att produkten har hög elasticitet och bibehåller sin säkra passform under hela användningstiden, även vid lägesförändring. Höftbältet är stabilt, komfortabelt och mjukt, vilket gör att det inte rullar ihop sig utan sitter bekvämt för att undvika hudirritation. TENA Flex är ett mycket läckagesäkert skydd. Dubbla absorberande kärnor med superabsorbenter tillsammans med spridningsskiktet FeelDry gör att urinen sprids och absorberas effektivt. Ytan mot huden hålls torr vilket främjar en god hudhälsa. Produktens kroppsnära passform, benelastik och mjuka vätskeavvisande läckagebarriärer med dubbla elastiktrådar hjälper till att förhindra läckage. Skyddet har en luftig anatomisk design och textilliknande andningsbara material för hög komfort och god hudhälsa. Skyddet fixeras med kardborre direkt på bältet och kan enkelt justeras och återförslutas flera gånger. Samtliga TENA Flex har Odour Neutralizer och våtindikator.

Sommaren 2022 uppgaderas TENA Flex för ännu enklare hantering. Vid bältesöppningen finns en blå färgmarkering för att göra det enklare att hitta öppningen. Den unika elastiska panelen i bältet får ett grått mönster, med bibehållen elastisk funktion. Höftbältet blir vitt i stället för grått, men med samma funktion och kvalitet. Samtidigt får produkten en ny förpackningsdesignen där vi kommunicerar att produkterna är certifierade och miljömärkta med Svanen. Avdelningsförpackningen kommer att vara tillverkad av 40% återvunnet material.



Fakta

Ytskikt	non-woven polypropen, polyeten
Abs. Skikt	Cellulosafloff, superabsorbent
Spärrskikt	Polyeten, non-woven polypropen
Resårer	Polyeter, polyuretan, SBS, elasthan

[Storlekar och annan information på nästa sida](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – Allt-i-ett-skydd

TENA Flex – [Essity](#)

Storlek	Sesamnummer	Höftvidd cm	Abs kapacitet ml	Antal/fp	Pris/st
Normal M	30299	70-105	1335	102	3,36
Normal L	30300	85-120	1474	102	3,63
Plus S	30301	60-90	1542	90	2,97
Plus XL	30304	100-155	2541	90	5,22
Super M	30306	70-105	2248	90	4,26
Super L	30307	85-120	2492	90	5,04
Super XL	30308	105-155	3296	90	6,02
Maxi S	30309	50-90	2764	66	3,93
Maxi L	30463	85-120	3455	66	7,01
Maxi XL	30464	105-155	4735	63	6,36
Ultima S	31777	60-90	3202	60	5,90
Ultima M	31502	70-105	3576	60	4,88
TENA Flex förlängningsbälte	31702	Ger upp till 29 cm extra längd	-	120	2,69

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – Allt-i-ett-skydd

ABENA Slip – [Abena](#)

ABENA Slip är andningsbara och anatomiskt formade allt-i-ett-skydd mot läckage i samband med måttlig till kraftig inkontinens. Top-Dry-teknik för snabb absorption och torr yta även efter flera läckage. Barriärer och resårer ger 360-graders läckageskydd. Odörsystemet minskar risken för oönskad lukt. Elastisk kombitejp med dubbel tejpfunktion och gör det enkelt att justera skyddet. Vätindikator och rutsystem hjälper till att hitta produkt som har rätt absorptionsnivå. Dermatologiskt testad.



Fakta

Ytskikt	Polypropen
Abs. Skikt	Cellulosa
Spärrskikt	Polypropen
Resårer	Elastan

[Storlekar och annan information på nästa sida](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – Allt-i-ett-skydd

ABENA Slip – [Abena](#)

Storlek	Sesamnummer	Höftvidd cm	Abs kapacitet ml	Antal/fp	Pris/st
XS2 Premium	31843	50-60 cm	1688	32	2,42 kr
S2 Comfort	31841	60-85 cm	1499	28	2,52 kr
S2 Premium	31455	60-85 cm	2126	28	2,67 kr
M0 Premium	31842	70-110 cm	1712	26	2,82 kr
M1 Premium	31845	70-100 cm	2365	26	2,91 kr
M3 Premium	31846	70-110 cm	3009	22	3,45 kr
M4 Premium	31535	70-110 cm	3769	14	3,89 kr
L0 Premium	31844	100-150 cm	2673	26	3,35 kr
L2 Premium	31847	100-150 cm	3452	22	3,70 kr
L4 Premium	31848	100-150 cm	4333	12	4,29 kr
XL2 Premium	31849	110-170 cm	3660	20	3,92 kr
XL4 Premium	31536	110-170 cm	4593	12	4,48 kr
XXL1	31083	170-254	2250	40	18,23 kr

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter


Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – Allt-i-ett-skydd

Abri-Wing – [Abena](#)

Abri-Wing Premium för tung inkontinens är ett allt-i-ett skydd med bälte. Skyddet har stående läckagebarriärer som minskar risken för sidoläckage och skålformas med hjälp av långsgående resårer. Skyddet fixeras med höftbälte och kardborreband, som går att öppna, flytta och återförsluta. Superabsorbenter absorberar vätskan samt minskar risken för oönskad lukt. Andningsbart spärrskikt, klätt med textilliknande material för att förhindrar hudirritation. Nummer- och färgmarkering samt våtindikatorn.

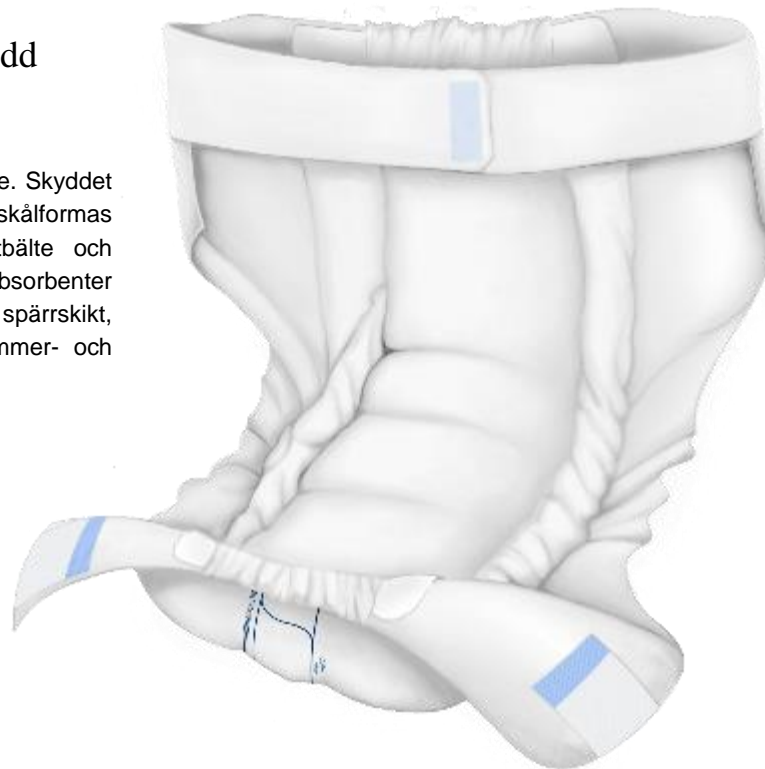

Fakta	
Ytskikt	Polypropen
Abs. Skikt	Cellulosa
Spärrskikt	Polypropen
Resårer	Elastan

Storlek	Sesamnummer	Abs Kapacitet	Höftmått	Antal/förp	Pris
Abri-Wing L3 Premium	31805	3398	90-135 cm	60	6,68 kr
Abri-Wing M4 Premium	31804	3850	70-110 cm	60	6,26 kr
Abri-Wing L4 Premium	31806	3921	90-135 cm	60	7,13 kr

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

ALLT-I-ETT-BYXA

- [Attends Pull-Ons](#)
- [TENA Pants](#)
- [MoliCare Premium Mobile](#)
- [ABENA Pants](#)

Föreskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – Allt-i-ett-byxa

Attends Pull-Ons – [Attends](#)

Attends PullOns är en absorberande engångsbyxa avsett för små till stora urin-/avföringsläckage. Har våtindikator, läckagebarriärer och non-wovenklätt spärrskikt. Skyddet kan tas av genom att riva sidosömmarna. Färgmarkering i resår visar produktens baksida (undantag storlek 5XS)



[Storlekar och annan information på nästa sida](#)

Fakta	
Ytskikt	non-woven polypropen, polyeten
Abs. Skikt	Cellulosaluff, superabsorbent
Spärrskikt	Polyeten, non-woven polypropen
Resårer	Polyeter, polyuretan, SBS, elastan

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – Allt-i-ett-byxa

Attends Pull-Ons – [Attends](#)

Storlek	Sesamnummer	Höftvidd cm	Abs kapacitet ml	Antal/fp	Pris/st
Discreet 3 M	31968	75-110	852	12	3,45 kr
Discreet 3 L	31969	95-125	956	10	3,91 kr
4 S	30113	60-90	1174	88	3,29 kr
4 M	30116	80-110	1190	88	2,96 kr
4 L	30119	100-140	1134	88	3,18 kr
4 XL	30098	130-170	1245	56	3,07 kr
6 XS	30083	45-60	1381	84	3,47 kr
6 S	30114	60-90	1467	72	2,52 kr
6 M	30117	80-110	1429	72	2,96 kr
6 L	30120	100-140	1478	72	3,18 kr
6 XL	30090	130-170	1493	72	3,07 kr
8 S	30115	60-90	2205	64	3,73 kr
8 M	30118	80-110	1880	64	3,12 kr
8 L	30121	100-140	1957	64	3,47 kr
8 XL	30097	130-170	2077	64	3,73 kr
10 M	31980	80-110	2225	14	4,13 kr
10 L	31981	100-140	2193	14	4,68 kr
10 XL	31982	130-170	2190	14	4,65 kr

[Förskrivnings-
information](#)[Leverantörs-
uppgifter](#)[Startsida](#)[Kontaktuppgifter](#)

Absorberande produkter för vuxna – Allt-i-ett-byxa

TENA Pants– [Essity](#)

TENA Pants är ett säkert, bekvämt och diskret byxskydd för medelstora till mycket stora urinläckage och är mycket lämpligt för uppegående vårdtagare. Benelastik tillsammans med mjuka och höga läckagebarriärer som sluter tätt mot huden gör skyddet både bekvämt och läckagesäkert. Dubbla absorberande kärnor med superabsorbenter tillsammans med spridningsskiktet FeelDry gör att urinen sprids och absorberas effektivt. Ytan mot huden hålls torr, vilket främjar en god hudhälsa.

TENA Pants är gjorda av mjuka, andningsbara material vilket ger ett mycket bekvämt och hudvänligt skydd. Midjeresåren (elastiska trådar som även går ner över absorptionskärnan) ger en kroppsnära passform vilket gör produkten mycket bekväm, diskret och säker under hela användningstiden.

TENA Pants har Odour Neutralizer, våtindikator och färgad trådelastik i bakre linningen visar absorptionsnivå.



Fakta

Ytskikt	Non-woven polyeten
Abs. Skikt	Cellulosaluff, superabsorbent
Spärrskikt	Polyetenfilm
Resårer	Polyuretan

[Storlekar och annan information på nästa sida](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – Allt-i-ett-byxa

TENA Pants– [Essity](#)

Storlek	Sesamnummer	Höftvidd cm	Abs kapacitet ml	Antal/fp	Pris/st
Discreet M	30331	75-100	804	96	3,23
Discreet L	30335	95-125	816	80	3,30
Normal S	31780	65-85	1113	69	2,82
Normal M	30329	80-110	1077	72	2,79
Normal L	30330	100-135	1116	72	3,21
Normal XL	31781	120-160	1138	90	3,75
Plus XL	30334	120-160	1420	48	5,30
Super S	30336	65-85	2006	48	4,06
Extra M	31782	80-110	1563	116	3,16
Extra L	31783	100-135	1639	80	3,80

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – Allt-i-ett-byxa

MoliCare Premium Mobile – [Hartmann](#)

MoliCare Premium Mobile i byxmodell är avsett för små till stora urin-/avföringsläckage. Har läckagebarriärer, våtindikator och non-wovenklätt spärrskikt. Skyddet kan tas av genom att riva sidosömmarna.



Fakta

Ytskikt	Non-woven polypropen
Abs. Skikt	Cellulosafloff, superabsorbent
Spärrskikt	Polyeten, non-woven polypropen
Resårer	Lycra

[Storlekar och annan information på nästa sida](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – Allt-i-ett-byxa

MoliCare Premium Mobile – [Hartmann](#)

Storlek	Sesamnummer	Höftvidd cm	Abs kapacitet ml	Antal/fp	Pris/st
5 droppar S	30257	60-90	941	56	2,99
6 droppar XS	30251	45-70	1361	56	3,16
6 droppar S	30252	60-90	1475	56	3,16
6 droppar XL	30255	130-170	2140	56	5,25
8 droppar S	30261	60-90	1791	56	3,43
8 droppar L	30263	100-150	2279	56	4,28
8 droppar XL	30260	130-170	2421	56	5,25
10 droppar M	31865	80-120	2626	42	4,28
10 droppar L	31549	100-150	2613	56	4,28
10 droppar XL	31758	130-170	2757	56	5,25

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – Allt-i-ett-byxa

ABENA Pants – [Abena](#)

ABENA Pants är vårt utbud av engångsbyxor som kan bäras som vanliga underkläder, med absorptionsnivåer anpassade till en rad olika behov. Produkterna är tillverkade i extra mjukt material med hög andningsförmåga för bekväm användning. Den högeffektiva kärnan med Top-Dry-teknik skyddar och vårdar huden genom att hålla det exponerade området torrt och behagligt även läckage. Odörsystemet minskar risken för oönskad lukt. Vätindikator.



Fakta

Ytskikt	Nonwoven av polypropen
Abs. Skikt	Cellulosamassa
Spärrskikt	Polyeten
Resårer	Elastan

[Storlekar och annan information på nästa sida](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – Allt-i-ett-byxa

ABENA Pants – [Abena](#)

	Sesamnummer	Abs kapacitet	Höftmått	Antal/förp	Pris
Junior XS2	31747	1425	55 - 80 cm	14	2,25 kr
M0 Premium	31807	1123	80 - 110 cm	14	3,02 kr
L0 Premium	31808	1085	100 – 140 cm	14	3,21 kr
XL1 Premium	31839	1483	130 – 170 cm	14	3,43 kr
S1 Premium	31835	1690	60 - 90 cm	14	2,96 kr
M1 Premium	31836	1552	80 - 110 cm	14	3,21 kr
L2 Premium	31837	1924	100 - 140 cm	14	3,56 kr
XL2 Premium	31840	1824	130 -170 cm	14	3,61 kr
M3 Premium	31484	2353	80 – 110 cm	14	3,53 kr
L3 Premium	31838	2348	100 - 140 cm	14	3,72 kr
XL3 Premium	31809	2886	130 – 170 cm	14	3,83 kr

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

AVFÖRINGSINKONTINENS

- [Sanisoft Mini Kol](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Absorberande produkter för vuxna – Allt-i-ett-skydd

Skydd med kol – [Swereco](#)

Specialskydd för små analläckage. Effektivt kolfilter eliminerar all lukt i 3-5 timmar. Med vingar för bättre fixering och bättre skydd mot läckage. Finns som extra lång med vingar och kort utan vingar.



Fakta	
Ytskikt	Non-woven polypropen
Abs. Skikt	Termobunden massa med superabsorbenter, viskos med kol
Spärrskikt	Polyeten

Modell	Sesamnummer	Abs kapacitet ml	Längd, cm	Bredd, cm	Antal/fp	Pris/st
Saniline C Normal	30137	83	22,5	8,5	168	3,47
Saniline C maxi med vingar	32405	143	30,2	15	120	4,31

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

FIXERINGSPRODUKTER

- [Sanifix Standard, utan ben](#)
- [Sanifix Standard, med ben](#)
- [Abri-Fix Leaf Super](#)
- [Abri-Fix Pants Super med ben](#)
- [Uni Fix Light, utan ben](#)
- [Uni Fix Light, med ben](#)
- [Fixeringsbyxa för barn](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Fixeringsprodukter

Sanifix Standard, utan ben– [Swereco](#)

Sanifix Standard är en byxa som är avsedd för fixering av inkontinensskydd. Tål cirka 25 tvättar.

Fakta

Material	96% Polyester, 4% spandex – Öko-Tex-märkt material
Tvättråd	60°C - torktumling vid låg temperatur

Storlek	Sesamnummer	Midjemått cm	Lårvidd cm	Antal/fp	Pris/st
S	31926	60-100	35-50	5	1,64 kr
M	31928	70-110	40-55	5	1,64 kr
L	31930	80-120	45-60	5	1,64 kr
XL	31932	90-130	55-70	5	1,79 kr
XXL	31934	100-140	65-80	5	1,81 kr
XXXL	31936	120-160	75-90	5	2,18 kr
XXXXL	31937	140-170	85-100	5	2,18 kr



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel

VO Hjälpmedel



Kommunförbundet Skåne



Fixeringsprodukter

Sanifix Standard, med ben- [Swereco](#)

Sanifix Standard är en byxa som är avsedd för fixering av inkontinensskydd. Tål cirka 25 tvättar.

Fakta

Material	96% Polyester, 4% spandex – Öko-Tex-märkt material
Tvättråd	60°C - torktumling vid låg temperatur

Storlek	Sesamnummer	Midjemått cm	Lårvidd cm	Antal/fp	Pris/st
S	31925	60-100	35-50	5	2,06 kr
M	31927	70-110	40-55	5	2,11 kr
L	31929	80-120	45-60	5	2,18 kr
XL	31931	90-130	55-70	5	2,18 kr
XXL	31933	100-140	65-80	5	2,21 kr
XXXL	31935	120-160	75-90	5	2,21 kr



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Fixeringsprodukter

Abri-Fix Leaf Super – [Abena](#)

Abri-Fix Leaf Super är en elastisk fixeringsbyxa utan ben som förenar egenskaper från korttidsbyxor och bomullsbyxor. Byxan är försedd med stabiliseringszoner. Storleksmarkering i midjeresåren. Byxan finns i två färger. Tvätthanvisning: 60°, lätt torktumling, ca 50 tvättar.

Fakta	
Material	97 % polyamid, 3 % elasthan
Tvättråd	60°C – lätt torktumling

Storlek	Sesamnummer	Höftmått cm	Midjemått cm	Antal/fp	Pris/st
XS	31830	60-90	60-80	3	12,60 kr
S	31831	70-110	65-90	3	13,59 kr
M	31832	80-130	70-100	3	14,57 kr
L	31833	90-150	80-100	3	15,94 kr
XL	31834	100-170	90-120	3	17,75 kr
XXL	31827	110-175	105-135	3	22,32 kr
XXXL	31828	120-180	115-145	3	23,18 kr



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Fixeringsprodukter

Abri-Fix Pants Super med ben – [Abena](#)

Abri-Fix Pants Super är en fixeringsbyxa med ben i ett mjukt tätstickat och behagligt material. Byxan är försedd med stabiliseringszoner och är färgmarkerade i midjresåren där även tvättnvisning framgår.

Fakta

Material	97 % polyester, 3 % elastan
Tvättråd	60°C - torktumling vid låg temperatur

Storlek	Sesamnummer	Höftmått cm	Midjemått cm	Antal/fp	Pris/st
XS	31850	65-95	55-90	3	3,24 kr
S	31851	75-105	65-100	3	3,33 kr
M	31852	80-120	70-110	3	3,42 kr
L	31853	90-130	75-120	3	3,51 kr
XL	31854	95-145	80-130	3	3,64 kr
XXL	31855	105-155	85-140	3	3,79 kr
XXXL	31856	110-165	100-150	3	4,83 kr
XXXXL	31857	130-175	120-165	3	5,26 kr



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Fixeringsprodukter

Uni Fix Light, utan ben – [Heinex](#)

Uni Fix Light är en mjuk bomullsbyxa som är avsedd för fixering av inkontinensskydd. Tål cirka 100 tvättar. Byxan har storleksmarkering i midjeresåren.

Fakta

Material	95% Bomull, 5% lycra
Tvättråd	90°C – lätt torktumling



Storlek	Sesamnummer	Midjemått cm	Lårvidd cm	Antal/fp	Pris/st
XS	30174	56-79	<30	1	24,00 kr
S	30175	60-85	<32	1	24,00 kr
M	30176	64-89	<35	1	24,00 kr
L	30177	70-95	<38	1	24,00 kr
XL	30178	76-101	<41	1	25,00 kr
XXL	30179	82-107	<44	1	25,00 kr
XXXL	30180	88-150	<47	1	25,00 kr

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel

VO Hjälpmedel



Kommunförbundet Skåne



Fixeringsprodukter

Uni Fix Light, med ben – [Heinex](#)

Uni Fix Light är en mjuk bomullsbyxa som är avsedd för fixering av inkontinensskydd. Tål cirka 100 tvättar. Byxan har storleksmarkering i midjeresåren.



Fakta

Material	95% Bomull, 5% lycra
Tvättråd	90°C – lätt torktumling

Storlek	Sesamnummer	Midjemått cm	Lårvidd cm	Antal/fp	Pris/st
XS	30181	60-90	<39	1	24,00 kr
S	30182	72-97	<41	1	24,00 kr
M	30183	76-101	<43	1	24,00 kr
L	30184	80-105	<45	1	24,00 kr
XL	30185	90-115	<50	1	25,00 kr
XXL	30186	100-125	<55	1	25,00 kr
XXXL	30187	110-145	<60	1	25,00 kr
XXXXL	30188	120-165	<65	1	26,00 kr

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel

VO Hjälpmedel

Fixeringsprodukter

Barnbyxa Fix- [Heinex](#)

Fixeringsbyxa för barn.

Fakta	
Material	92% Bomull, 8% elastan
Tvättråd	Tål cirka 150 tvättar i 90-95 grader. Torktumlas 60-70 grader. Inget mjukmedel. Ej kemtvätt. Krymper max 10 % efter första tvätt.

Storlek	Sesamnummer	Antal/fp	Pris/st
15 – 25 kg	32008	1	22,00 kr
22 – 30 kg	32009	1	22,00 kr



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

HYGIENUNDERLÄGG OCH LAKANSSKYDD

- [Attends cover Dri plus](#)
- [Cellcomfort](#)
- [Tvättbara Lakansskydd](#)
- [Absorba](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Hygienunderlägg, engångs

Attends cover Dri plus – [Attends](#)

Attends Cover Dri Plus är ett hygienunderlägg avsett att användas i säng eller stol som komplement till inkontinensskydd där risk för läckage finns. Innehåller superabsorbenter och Odour Protection, som ska minska risken för uppkomst av dålig lukt. Absorptionsytan är lagd i ett hexagonmönster med korta kanaler, som ska begränsa spridningen av urin. Spärrskiktet av friktionsplast förhindrar genomvättning och ska hålla skyddet på plats. Storleksmarkering finns på undersidan.



Fakta

Ytskikt	Non-woven polypropen
Abs.skikt	Cellulosaluff, superabsorbent
Spärrskikt	Polyeten

Storlek	Sesamnummer	Antal/fp	Pris/st
60x60 cm	30095	200	1,03
60x90 cm	30096	200	1,33

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Lakansskydd, engångs

Cellcomfort – [Cellcomb](#)

Cellcomfort är ett komplement till inkontinensskydd, där risk för läckage föreligger. Bäddskyddet består av ett absorptionskikt av mjuk non-woven, ett spärrskikt av polyetenfilm som stoppar läckage till underlag och spärrkanter av vax längst långsidorna, som förhindrar läckage i sidled. Spärrskiktet har trycket "Undersida" för att visa användaren vilken sida som ska vändas nedåt mot sängen. Det är ett hållbart skydd med mycket hög dragstyrka i såväl torrt som vått tillstånd. Samlar man ihop hela produkten i händerna från kortsidan är skyddet så starkt att det går att förflytta en vuxen människa i det.

Fakta			
Abs.skikt	Viskos		
Spärrskikt	Polyeten		
Storlek	Sesamnummer	Antal/fp	Pris/st
80x160 cm	30466	75	5,18



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Lakansskydd, flergångs

Tvättbart lakansskydd – [Tjugohundra18](#)

Lakansskyddet är av högabsorberande material med ett spärrskikt som "andas" kroppsvärmen, men är ändå helt vätsketätt. Skyddet är laminerat vilket gör det starkt och resulterar även i en slät bäddyta, vilket minskar risken för t.ex. trycksår. Lakansskyddet är färgkodat för att brukare/personal lätt ska kunna avgöra vilken sida som ska vara upp respektive ner i sängen (anvisning finns på tvättdapp). Lakansskyddet har bäddflikar som bäddas under madrassen och gör att skyddet ligger på plats i sängen.



Fakta	
Abs.skikt	Polyester, Rayon
Spärrskikt	Polyuretan
Undersida	Polyester
Tvättråd	90°C

Benämning	Typ	Storlek	Sesamnummer	Antal/fp	Pris/st
Jenny	Bomull	190x85 cm	31769	3	44,78
Jens	Polyester	190x85 cm	31770	3	40,26

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel

VO Hjälpmedel

Hygienunderlägg, flergångs

Absorba – [Swereco](#)

Absorba är ett tvättbart hygien-/sittunderlag. Underlägget är laminerat och avsett att användas på tygklädda stolar, soffor m m som komplement till inkontinensskydd, där risk för läckage finns. Skyddet ska tvättas innan det tas i bruk för att aktivera absorptionen. Enligt tillverkaren kan skyddet tvättas 200 gånger i hushållstvätt med bibehållen kvalitet på spärrskiktet. Placera den ljusblå sidan mot stolen.

Fakta	
Spärrskikt	Polyester
Abs.skikt	Polyester 65 %, rayon 35 %
Spärrskikt	Polyuretanfilm
Undersida	Polyester
Tvättråd	Max 90°C utan sköljmedel. Torktumling på låg värme.

Storlek	Sesamnummer	Antal/fp	Pris/st
45x45 cm	30134	4	18,51



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

KATETRAR

Tappningskatetrar

Tillbehör till tappningskatetrar

Kvarliggande katetrar

Tillbehör till kvarliggande katetrar

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

TAPPNINGSKATETRAR

- [Tappningskater, nelaton](#)
- [HomeCath, nelaton](#)
- [LoFric, nelaton](#)
- [SpeediCath Standard, nelaton](#)
- [LoFric Primo, nelaton](#)
- [SpeediCath Compact, nelaton](#)
- [SpeediCath Flex](#)
- [LoFric Sense](#)
- [SpeediCath Compact Male, nelaton](#)
- [LoFric Origo, nelaton](#)
- [LoFric Hydro-kit, nelaton](#)
- [LoFric, tiemann](#)
- [SpeediCath Standard, tiemann](#)
- [Lofric Origo, tiemann](#)
- [Lofric Primo, tiemann](#)
- [IQ-Cath](#)
- [SpeediCath Eve](#)
- [Lofric Elle](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Tappningskateter med nelatonspets, utan glidmedel


Tappningskateter – [Medig](#)

Denna tappningskateter med Nelatonspets är avsedd att användas vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Gel ska användas vid införandet.

Fakta

Material	PVC-fri plast
----------	---------------

Sesamnummer	Storlek, Charrier (Ch)	Längd	Antal/fp	Pris/st
31922	10	18 cm	100	1,91
31923	12	18 cm	100	1,91
31924	14	18 cm	100	1,91
31916	06	40 cm	100	1,91
31917	08	40 cm	100	1,91
31918	10	40 cm	100	1,91
31919	12	40 cm	100	1,91
31920	14	40 cm	100	1,91
31921	16	40 cm	100	1,91

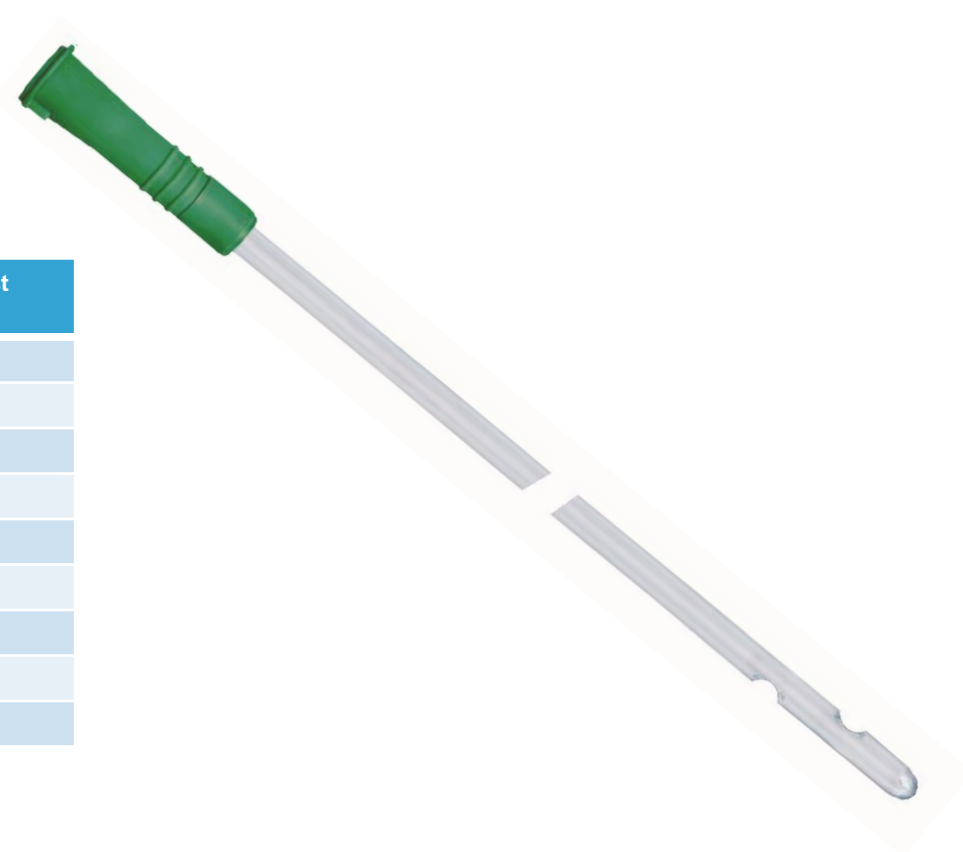[Förskrivnings-
information](#)[Leverantörs-
uppgifter](#)[Startsida](#)[Kontaktuppgifter](#)

Tappningskateter med nelatonspets, hydrofil

HomeCath – [Dolema](#)

HomeCath hydrofil tappningskateter är avsedd att användas vid tömning av urinblåsan enligt RIK metoden. Katetern blöts i vatten (förpackningen fylls med kranvatten) som efter 30-40 sekunder är färdig att användas. Inget annat glidmedel behövs.

Fakta

Material	Ftalatfritt PVC
Ytskikt	PVP K90



Sesamnummer	Storlek, Charrier	Längd	Antal/fp	Pris/st
31872	10	15 cm	40	9,20 kr
31870	12	15 cm	40	9,20 kr
31871	14	15 cm	40	9,20 kr
31873	06	20 cm	40	9,20 kr
30402	08	20 cm	40	9,20 kr
30403	10	20 cm	40	9,20 kr
30392	12	20 cm	40	9,20 kr
30393	14	20 cm	40	9,20 kr
30394	16	20 cm	40	9,20 kr
31874	10	30 cm	40	9,20 kr
31875	12	30 cm	40	9,20 kr
30400	08	40 cm	40	9,20 kr
30395	10	40 cm	40	9,20 kr
30396	12	40 cm	40	9,20 kr
30397	14	40 cm	40	9,20 kr
30398	16	40 cm	40	9,20 kr
30399	18	40 cm	40	9,20 kr
30401	20	40 cm	40	9,20 kr

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Tappningskateter med nelatonspets, hydrofil

LoFric – [Wellspect HealthCare](#)

LoFric hydrofil tappningskateter med nelatonspets är avsedd för att användas vid tömning av urinblåsan med RIK-metoden. Katetern blöts i vatten (förpackningen fylls med vatten) och är färdig att användas. Inget annat glidmedel behövs.



Fakta	
Material	POBE
Ytskikt	PVP



Sesamnummer	Storlek, Charrier (Ch)	Längd	Antal/fp	Pris/st
30357	10	15 cm	120	9,35 kr
30358	12	15 cm	120	9,35 kr
30359	14	15 cm	120	9,35 kr
30350	06	20 cm	120	9,35 kr
30352	08	20 cm	120	9,35 kr
30353	10	20 cm	120	9,35 kr
30354	12	20 cm	120	9,35 kr
30355	14	20 cm	120	9,35 kr
30356	16	20 cm	120	9,35 kr
30351	10	30 cm	120	9,35 kr
31889	12	30 cm	120	9,35 kr
30343	08	40 cm	120	9,35 kr
30344	10	40 cm	120	9,35 kr
30345	12	40 cm	120	9,35 kr
30346	14	40 cm	120	9,35 kr
30347	16	40 cm	120	9,35 kr
30348	18	40 cm	120	9,35 kr
30349	20	40 cm	120	9,35 kr

Tappningskateter med nelatonspets, hydrofil

SpeediCath Standard – [Coloplast](#)

SpeediCath hydrofil tappningskateter är avsedd att användas vid tömning av urinblåsan enligt RIK metoden. SpeediCath är klar att användas direkt. Varje kateter är förpackad och ligger i en isoton koksaltlösning. Inget annat glidmedel behövs.

Sesamnummer	Storlek, Charrier (Ch)	Total Längd	Effektiv Längd	Antal/fp	Pris/st
30063	06	20 cm	16 cm	30	12,25 kr
30064	08	20 cm	16 cm	30	12,25 kr
30065	10	20 cm	16 cm	30	12,25 kr
30066	12	20 cm	16 cm	30	12,25 kr
30067	14	20 cm	16 cm	30	12,25 kr
30068	16	20 cm	16 cm	30	12,25 kr
30072	10	30 cm	26 cm	30	12,25 kr
30073	12	30 cm	26 cm	30	12,25 kr
30053	08	39 cm	35 cm	30	12,25 kr
30054	10	39 cm	35 cm	30	12,25 kr
30055	12	39 cm	35 cm	30	12,25 kr
30056	14	39 cm	35 cm	30	12,25 kr
30057	16	39 cm	35 cm	30	12,25 kr
30058	18	39 cm	35 cm	30	12,25 kr



Fakta

Material	Polyuretan
Ytskikt	PVP

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontak

Generell
information

Tappningskateter med olivspets, hydrofil

SpeediCath Flex – [Coloplast](#)

SpeediCath Flex är förpackad i vätska och klar att använda direkt. Kateterns fuktighet i form av det unika hydrofila ytskiktet och den jämna övergången till de polerade kateterögonen bidrar till att kateteriseringen bli skonsam för urinröret. SpeediCath Flex är PVC-fri och ftalatri.

Med den mjuka olivformade tippen är det enkelt att centrera katetern i urinrörsmynningen. Tillsammans med den flexibla delen och den smidiga katetern blir införandet enkelt och navigeringen genom urinrörets böjda form varsam och säker.

Sesamnummer	Storlek, Charrier (Ch)	Total Längd	Effektiv Längd	Antal/tp	Pris/st
30992	10	44 cm	33 cm	30	16,91
30993	12	44 cm	33 cm	30	16,91
30994	14	44 cm	33 cm	30	16,91
30995	16	44 cm	33 cm	30	16,91

Fakta

Material	Polyuretan, polypropen, polyeten
Ytskikt	PVP



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Tappningskateter med nelatonspets, hydrofil

LoFric Primo – [Wellspect HealthCare](#)

LoFric Primo är en hydrofil tappningskateter som är avsedd att användas vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Katetern är förpackad med vattenbehållare och införingshjälpmedel. Vattenbehållaren töms och väter katetern före kateteriseringen. Inget annat glidmedel behövs.

Sesamnummer	Storlek, Charrier (Ch)	Längd	Antal/fp	Pris/st
31890	10	15 cm	120	10,15 kr
31891	12	15 cm	120	10,15 kr
31892	14	15 cm	120	10,15 kr
30371	08	20 cm	120	10,15 kr
30372	10	20 cm	120	10,15 kr
30373	12	20 cm	120	10,15 kr
30374	14	20 cm	120	10,15 kr
30365	08	40 cm	120	10,15 kr
30366	10	40 cm	120	10,15 kr
30367	12	40 cm	120	10,15 kr
30368	14	40 cm	120	10,15 kr
30369	16	40 cm	120	10,15 kr
30370	18	40 cm	120	10,15 kr



Fakta	
Material	POBE
Ytskikt	PVP



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Tappningskateter med nelatonspets, hydrofil

SpeediCath Compact – [Coloplast](#)

SpeediCath Compact hydrofil tappningskateter är avsedd att användas av flickor och kvinnor vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Förpackningen innehåller steril koksaltlösning och består av två hylsor varav den ena används som handtag vid införandet. Inget annat glidmedel behövs.

Fakta	
Material	Polyuretan
Ytskikt	PVP

Sesamnummer	Storlek, Charrier (Ch)	Total Längd	Effektiv Längd	Antal/fp	Pris/st
30069	10	14 cm	7 cm	30	16,14
30070	12	14 cm	7 cm	30	16,14
30071	14	14 cm	7 cm	30	16,14



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Tappningskateter med nelatonspets, hydrofil

SpeediCath Compact Male – [Coloplast](#)

SpeediCath Compact Male hydrofil tappningskateter är avsedd att användas av män vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Förpackningen ligger förpackad i koksaltlösning och är klar att användas direkt. Det är en kateter i teleskopform med en kateter i Ch12 och en stadigare del i Ch 18.

Fakta	
Material	Polyuretan
Ytskikt	PVP

Sesamnumm er	Storlek, Charrier (Ch)	Total Längd	Effektiv Längd	Antal/fp	Pris/st
30074	12/18	34 cm	30 cm	30	16,91



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Tappningskateter med nelatonspets, hydrofil

LoFric Sense– [Wellspect HealthCare](#)

LoFric Sense hydrofil tappningskateter är avsedd att användas av flickor och kvinnor vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Varje kateter ligger förpackad med en integrerad koksaltlösning som aktiveras genom ett lätt tryck på förpackningen. Inget annat glidmedel behövs. Kateterdelen är 10 cm utan handtag.

Fakta	
Material	POBE
Ytskikt	PVP

Sesamnummer	Storlek, Charrier (Ch)	Längd	Antal/fp	Pris/st
30375	10	15 cm	120	15,75
30376	12	15 cm	120	15,75
30377	14	15 cm	120	15,75



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Tappningskateter med nelatonspets, hydrofil

LoFric Origo– [Wellspect Healthcare](#)

LoFric Origo hydrofil tappningskateter är avsedd att användas av män vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Varje kateter ligger förpackad med en integrerad koksaltlösning som aktiveras genom ett lätt tryck på förpackningen. Inget annat glidmedel behövs. Med handtag för bättre grepp. Vikbar till fickformat

Fakta	
Material	POBE
Ytskikt	PVP

Sesamnummer	Storlek, Charrier (Ch)	Längd	Antal/fp	Pris/st
31900	08	30 cm	120	16,00
30383	10	30 cm	120	16,00
30384	12	30 cm	120	16,00
30385	10	40 cm	120	16,00
30386	12	40 cm	120	16,00
30387	14	40 cm	120	16,00
30388	16	40 cm	120	16,00
30389	18	40 cm	120	16,00



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Tappningskateter med nelatonspets, hydrofil

LoFric Hydro-Kit – [Wellspect Healthcare](#)

LoFric Hydro-kit är en hydrofil tappningskateter med integrerad påse som är avsedd att användas vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden och uppsamling av urinen. Katetern är förpackad i påsen med vattenbehållare och införingshjälpmedel. Vattenbehållaren töms och väter katetern före kateterisering. Urinen rinner ner i urinuppsamlingspåsen. Inget annat glidmedel behövs.

Fakta	
Material	POBE
Ytskikt	PVP

Sesamnummer	Storlek, Charrier (Ch)	Längd	Antal/fp	Pris/st
30381	08	20 cm	40	18
30382	12	20 cm	40	18
30378	10	40 cm	40	18
30379	12	40 cm	40	18
30380	14	40 cm	40	18



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Tappningskateter med tiemannspets, hydrofil

LoFric – [Wellspect Healthcare](#)

LoFric hydrofil tappningskateter med Tiemannspets är avsedd att användas vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Den böjda Tiemannspetsen är lämplig främst när anatomiska hinder i urinröret föreligger. Katetern blöts i vatten (förpackningen fylls med kranvatten) som efter 30 sekunder är färdig att använda. Inget annat glidmedel behövs.

Fakta	
Material	POBE
Ytskikt	PVP

Sesamnummer	Storlek, Charrier (Ch)	Längd	Antal/fp	Pris/st
30360	10	40 cm	30	9,35
30361	12	40 cm	30	9,35
30362	14	40 cm	30	9,35
30363	16	40 cm	30	9,35
30364	18	40 cm	30	9,35



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Tappningskateter med tiemannspets, hydrofil

SpeediCath Standard – [Coloplast](#)

SpeediCath hydrofil tappningskateter är avsedd att användas vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Den böjda Tiemannspetsen är lämplig främst när anatomiska hinder i urinröret föreligger. SpeediCath är klar att användas direkt. Varje kateter är förpackad och ligger i en isoton koksaltlösning. Inget annat glidmedel behövs.

Fakta	
Material	Polyuretan
Ytskikt	PVP

Sesamnummer	Storlek, Charrier (Ch)	Total Längd	Effektiv Längd	Antal/fp	Pris/st
30059	10	39 cm	35 cm	30	12,71
30060	12	39 cm	35 cm	30	12,71
30061	14	39 cm	35 cm	30	12,71
30062	16	39 cm	35 cm	30	12,71



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel

VO Hjälpmedel



Kommunförbundet Skåne



Tappningskateter med tiemannspets, hydrofil

LoFric Origo– [Wellspect HealthCare](#)

LoFric Origo hydrofil tappningskateter är avsedd att användas av män vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Den böjda Tiemannspetsen är lämplig främst när anatomiska hinder i urinröret föreligger. Varje kateter ligger förpackad med en integrerad koksaltlösning som aktiveras genom ett lätt tryck på förpackningen. Inget annat glidmedel behövs. Med handtag för bättre grepp. Vikbar till fickformat

Fakta	
Material	POBE
Ytskikt	PVP

Sesamnummer	Storlek, Charrier (Ch)	Längd	Antal/fp	Pris/st
31901	10	40 cm	30	16
30390	12	40 cm	30	16
30391	14	40 cm	30	16
31902	16	40 cm	30	16
31903	18	40 cm	30	16



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Tappningskateter med tiemannspets, hydrofil

LoFric Primo– [Wellspect HealthCare](#)

LoFric Primo hydrofil tappningskateter är avsedd att användas av män vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Den böjda Tiemannspetsen är lämplig främst när anatomiska hinder i urinröret föreligger. Varje kateter ligger förpackad med en integrerad koksaltlösning som aktiveras genom ett lätt tryck på förpackningen, Inget annat glidmedel behövs. Med handtag för bättre grepp. Vikbar till fickformat

Fakta	
Material	POBE
Ytskikt	PVP

Sesamnummer	Storlek, Charrier (Ch)	Längd	Antal/fp	Pris/st
31893	12	40 cm	120	10,15
31894	14	40 cm	120	10,15
31895	16	40 cm	120	10,15



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel


VO Hjälpmedel

Tappningskateter med rundad spets

IQ-Cath – [Dolema](#)

Fakta	
Material	PVC

Sesamnummer	Storlek, Charrier (Ch)	Längd	Med/utan vätska	Antal/fp	Pris/st
31884	10	20 cm	Utan	30	27,50 kr
31885	12	20 cm	Utan	30	27,50 kr
31886	14	20 cm	Utan	30	27,50 kr
31887	10	30 cm	Utan	30	27,50 kr
31888	12	30 cm	Utan	30	27,50 kr
31876	10	40 cm	Utan	30	27,50 kr
31877	12	40 cm	Utan	30	27,50 kr
31878	14	40 cm	Utan	30	27,50 kr
31879	16	40 cm	Utan	30	27,50 kr
31880	10	40 cm	Med	30	32,50 kr
31881	12	40 cm	Med	30	32,50 kr
31882	14	40 cm	Med	30	32,50 kr
31883	16	40 cm	Med	30	32,50 kr

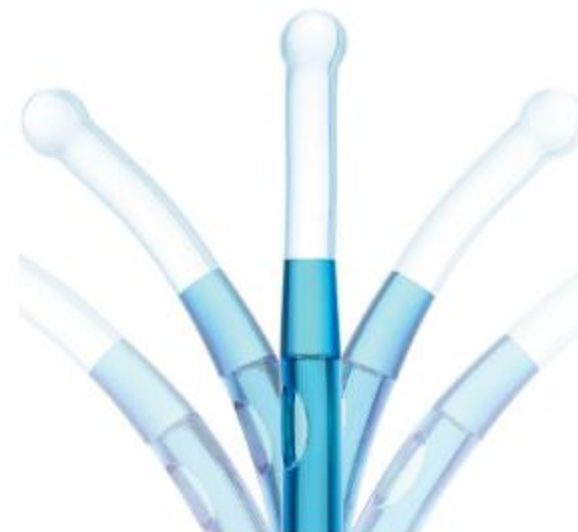

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Tappningskateter med nelatonspets, hydrofil

SpeediCath Eve– [Coloplast](#)

SpeediCath Eve hydrofil tappningskateter är avsedd att användas av flickor och kvinnor vid tömning av urinblåsan enligt RIK-metoden. Förpackningen innehåller steril koksaltlösning och består av två hylsor varav den ena används som handtag vid införandet. Inget annat glidmedel behövs.

Katetern öppnas enkelt och snabbt genom att vrida handtaget och sedan dra rakt upp.

Den trekantiga formen ger ett bra grepp om katetern vid öppning liksom användning. Vid behov kan katetern återförslutas och kasseras direkt eller vid senare tillfälle.

Fakta	
Material	Polyuretan
Ytskikt	PVP

Sesamnummer	Storlek, Charrier (Ch)	Total Längd	Effektiv Längd	Antal/fp	Pris/st
30051	12	14 cm	8 cm	30	16,91
30052	14	14 cm	8 cm	30	16,91



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Tappningskateter med nelatonspets, hydrofil

LoFric Elle – [Wellspect HealthCare](#)

Hydrofil kateter för kvinnor avsedd att användas vid intermittent kateterisering av urin - klar att använda direkt. Med vinklat handtag - för bra grepp och hygien eftersom katetern aldrig behöver vidröras. Går att koppla till vanliga uppsamlingspåsar eller förlängningsslang.

Fakta	
Material	POBE
Ytskikt	PVP

Sesamnummer	Storlek, Charrier (Ch)	Längd	Antal/fp	Pris/st
31897	10	10 cm	30	16,5
31898	12	10 cm	30	16,5
31899	14	10 cm	30	16,5



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

TILLBEHÖR TILL TAPPNINGSKATETER

- [Förlängningsslang till tappningskateter](#)
- [OptiLube](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Tillbehör till kateter

Förlängningsslang till kateter – [OneMed](#)

Förlängningsslangen är avsedd som tillbehör till tappningskatetrar för att förlänga räckvidden.

Slangen är 105 cm och utrustad med

konnekter inkl lock i båda ändarna. Passar på

de vanligt förekommande tappningskatetrarna

på marknaden.

Fakta

Material	DEHP-fri PVC
----------	--------------



Sesamnummer	Längd	Antal/fp	Pris/st
30469	106 cm	20	3,6 kr

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel

VO Hjälpmedel



Kommunförbundet Skåne



Tillbehör till kateter

OptiLube – [Mediplast](#)

Vattenlöslig glidgel

Fakta

Innehåll Glycerin, polyetylen, glykol, natriumhydroxid, metylester, propylester, vatten



Sesamnummer	Storlek	Antal/fp	Pris/st
30453	5 g	48	8,75
30451	10 g	30	10,60
30452	42 g	12	19,50

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Inkontinenshjälpmedel

Senast redigerad 2024-02-15 av Eric Donaldson

KVARLIGGANDE KATETER

- [Kateter, nelaton](#)
- [Supra Cath, öppen](#)
- [Kateter, tiemann](#)
- [BioCath, nelaton](#)
- [BIP Foley, nelaton](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Kvarliggande kateter med nelatonspets, silikon

Silikonkateter – [Mediq](#)

Kvarliggande urinkateter ska i första hand användas vid urinretention och endast i undantagsfall vid inkontinens. Inneliggandetid anpassas individuellt upp till 12 veckor. Gel ska användas vid införandet. Ballongen fylls med 10 % glycerinlösning som finns i den bipackade 10 ml sprutan, vilket ska minska vätskediffusionen. Säkerställ att ballongen är tömd innan katetern dras.

Sesamnummer	Storlek, Charrier (Ch)	Längd	Antal/fp	Pris/st
30426	12	23 cm	5	22,93 kr
30427	14	23 cm	5	22,93 kr
30428	16	23 cm	5	22,93 kr
30429	18	23 cm	5	22,93 kr
31648	6	30 cm	5	40,30 kr
31910	8	30 cm	5	40,30 kr
31911	10	30 cm	5	40,30 kr
30419	12	40 cm	5	22,93 kr
30420	14	40 cm	5	22,93 kr
30421	16	40 cm	5	22,93 kr
30422	18	40 cm	5	22,93 kr
30423	20	40 cm	5	22,93 kr
30424	22	40 cm	5	22,93 kr
30425	24	40 cm	5	22,93 kr

Fakta

Material

Silikon



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter


Startsida

Kontaktuppgifter

Kvarliggande kateter med öppen spets, silikon

Supra Cath – [Mediq](#)

Supracath kvarliggande kateter med öppen spets ska i första hand användas vid urinretention och endast i undantagsfall vid inkontinens. Den kan även användas som suprapubiskateter. Inneliggandetid anpassas individuellt upp till 12 veckor. Gel ska användas vid införandet. Ballongen fylls med 10 % glycerinlösning (Silflate) vilket minskar vätskediffusionen. Säkerställ att ballongen är tömd innan katetern dras.

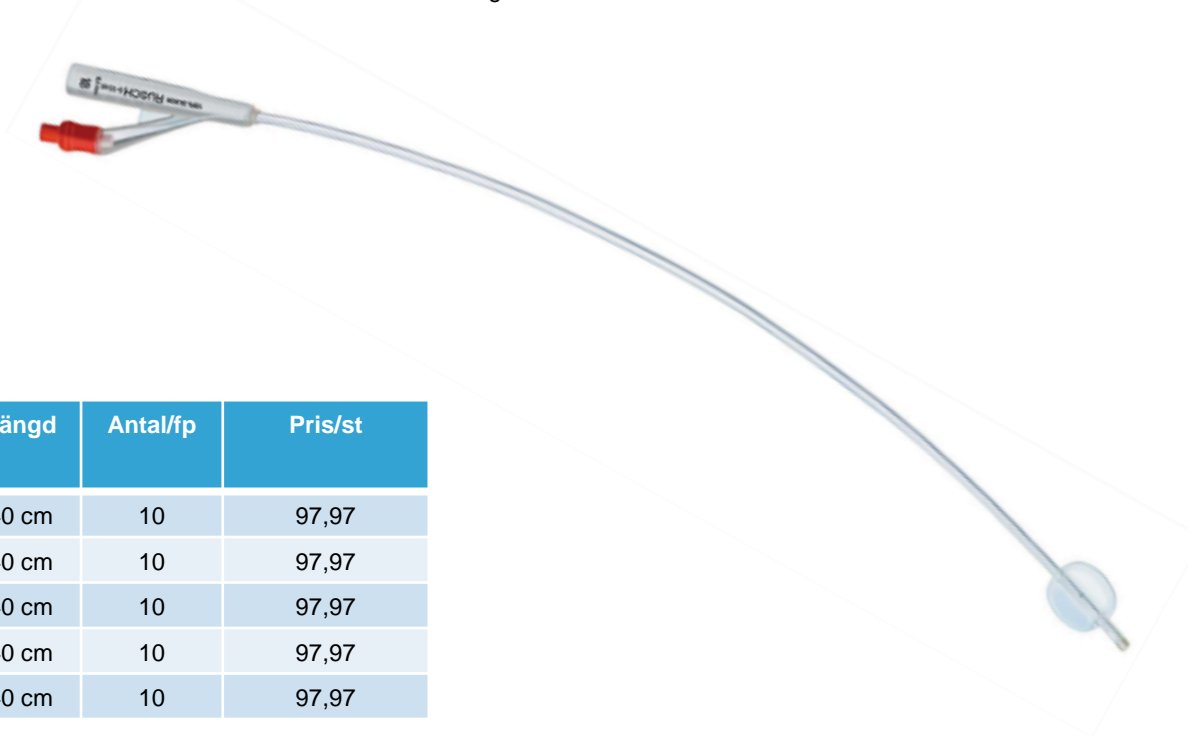

Fakta

Material	Silikon
----------	---------

Sesamnummer	Storlek, Charrier (Ch)	Längd	Antal/fp	Pris/st
30414	12	40 cm	10	97,97
30415	14	40 cm	10	97,97
30416	16	40 cm	10	97,97
30417	18	40 cm	10	97,97
30418	20	40 cm	10	97,97

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Kvarliggande kateter med tiemannspets, silikon

Silikonkateter – [Mediq](#)

Kvarliggande urinkateter med Tiemannspets ska i första hand användas vid urinretention och endast i undantagsfall vid inkontinens. Inneliggandetid anpassas individuellt upp till 12 veckor. Gel ska användas vid införandet. Ballongen fylls med 10 % glycerinlösning som finns i den bipackade 10 ml sprutan. Glycerinet gör att diffusionen genom ballongen minskar. Den böjda spetsen är lämplig främst när anatomiska hinder i urinröret föreligger.

Sesamnummer	Storlek, Charrier (Ch)	Längd	Antal/fp	Pris/st
30430	12	41 cm	5	78,78 kr
30431	14	41 cm	5	78,78 kr
30432	16	41 cm	5	78,78 kr
30433	18	41 cm	5	78,78 kr
30434	20	41 cm	5	78,78 kr
30435	22	41 cm	5	78,78 kr

Fakta

Material	Silikon
----------	---------



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter



Särskilda riktlinjer för förskrivning


Kvarliggande kateter med nelatonspets, latex

BioCatch – [BARD Norden](#)

BioCath kvarliggande urinkateter är av hydrogel belagd latex och ska endast användas när kateter av silikon inte fungerar, tex när patienten har grus i urinblåsan eller om det finns behov av extra lång kateter. Kuffas med sterilt vatten. Diameter på innerlumen en storlek mindre än motsvarande storlek på silikonkateter.

Fakta

Material	Latex
----------	-------

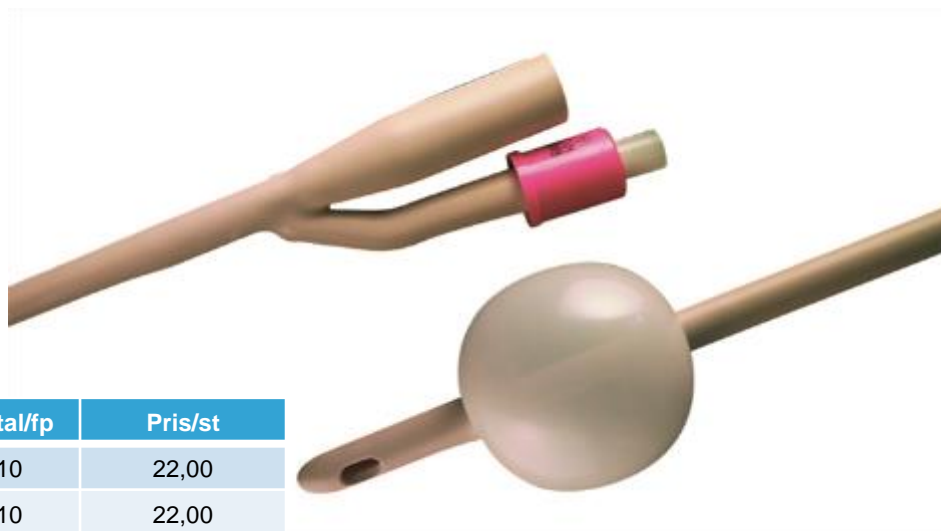

Sesamnummer	Storlek, Charrier (Ch)	Längd	Antal/fp	Pris/st
30189	12	43 cm	10	22,00
30190	14	43 cm	10	22,00
30191	16	43 cm	10	22,00
30192	18	43 cm	10	22,00

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Kvarliggande kateter med nelatonspets, silikon



Särskilda riktlinjer för förskrivning

BIP Foley – Bactiguard

BIP Foley-katetern är belagd med infektionsförebyggande ytskikt av ädelmetaller som minskar tillväxten av bakterier och förebygger kateterrelaterade infektioner och andra bakterierelaterade problem. Katetern har även ett hydrofilt ytskikt för minskad friktion.

Aktivera hydrogelen genom att förvåta katetern med sterilt vatten eller vattenbaserad gel. Fyll ballongen med hjälp av en spruta med luerspets och den mängd glycerinlösning som anges på katetern. Glycerinet gör att diffusionen genom ballongen minskar.

Glycerinspruta ingår ej.

Fakta	
Material	Silikon
Ytskikt	Guld, silver, palladium

Sesamnummer	Storlek, Charrier (Ch)	Längd	Antal/fp	Pris/st
30918	12	40 cm	10	138,00
30919	14	40 cm	10	138,00
30920	16	40 cm	10	138,00
30921	18	40 cm	10	138,00
30922	20	40 cm	10	138,00



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

TILLBEHÖR TILL KVARLIGGANDE KATETER

- [Förfylld spruta med glycerinlösning](#)
- [Flexi-Trak kateterfixering](#)
- [FreeFlow, kateterventil](#)
- [Kateterventil](#)
- [Koppling för luerspruta](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Tillbehör till kvarliggande kateter

Förfylld spruta med glycerinlösning – [Codan Triplus](#)

Förfylld spruta används för kuffning av ballong till kvarliggande urinkateter av silikon. Kateterns ballong fylls med lösningen för att minska diffusionen genom ballongen. Sprutan rymmer 10 ml och är sterilförpackad.

Fakta

Material	90 % Sterilt vatten, 10 % glycerin
----------	------------------------------------

Sesamnummer	Antal/fp	Pris/st
31984	25	3,45



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter


Startsida

Kontaktuppgifter

Tillbehör till kvarliggande kateter

Tube Flexi kateterfixering – [AST Medical](#)

Tube Flexi är avsedd för fixering av kvarliggande urinkateter. Den kan öppnas och återförslutas flera gånger. FlexiTrak kan sitta upp till fem dygn.

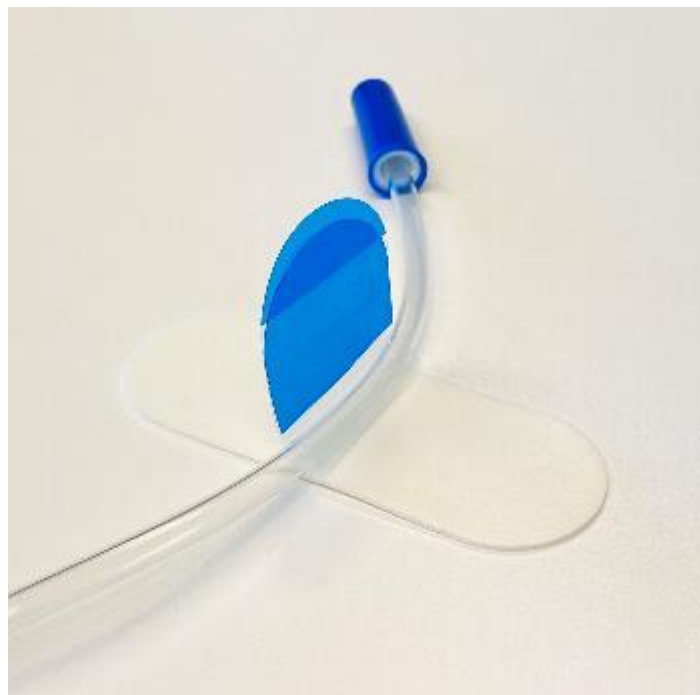

Fakta

Material	Polyuretan, akrylat
----------	---------------------

Sesamnummer	Antal/fp	Pris/st
32377	50	6,00

Tillbehör till kvarliggande kateter

Kateterventil Qufora – [OneMed](#)

- Qufora kateterventil är sterilpackad i styck i peel-pack
- Alla ventiler levereras med 4 cm slang
- Kopplingen passar till alla på marknaden förekommande katetrar, bempåsar och sängpåsar.



Fakta

Material	PP, PE, POM/LLDPE, slang i silikon
----------	------------------------------------

Sesamnummer	Antal/fp	Pris/st
-------------	----------	---------

32348	30	10,5
-------	----	------

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Tillbehör till kvarliggande kateter

Teleflex kateterventil – [Mediq](#)

Kateterventil som ger en större rörelsefrihet, mer frihet och komfort. Användandet av urinuppsamlingspåse är inte längre nödvändigt. Teleflex kateterventil är en diskret ventil som är ansluten till konan på din kateter och gör det möjligt att enkelt och snabbt tömma blåsan. Bytes efter ca 7 dagar.



Fakta

Material	Silikon och polypropylen
----------	--------------------------

Sesamnummer	Antal/fp	Pris/st
31912	10	7,80

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel

VO Hjälpmedel

Tillbehör till kvarliggande kateter

Koppling för luerspruta – [Vygon](#)

Koppling som används för att kunna spola kateter med hjälp av en spruta med luerfattning.

Fakta

Material	Polykarbonat
----------	--------------



Sesamnummer	Antal/fp	Pris/st
30010	30	9,85

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

URINDROPPSAMLARE

- [Conveen Security +](#)
- [Conveen Optima](#)
- [Conveen Security + med häftstrip](#)
- [Conveen, latex](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Urindroppssamlare - självhäftande

Conveen Security + – [Coloplast](#)

Conveen Security+ urindroppssamlare används av män med urinläckage eller som har svårt att hinna till toaletten. Urindroppssamlaren placeras över ollonet, rullas ut och applikatoren tas bort. Alla urindroppssamlare är knickfria vilket säkerställer att urinen rinner fritt i alla lägen. För att underlätta appliceringen är urindroppssamlaren försedd med ett pårullningsstrip och en applikator. Applikatoren har färgkod efter storlek (omkrets) och finns i två längder. Mätsticka kan beställas från leverantören. Bör bytas en gång per dygn.

Fakta

Material	SEBS, silikonoxid
----------	-------------------

Sesamnummer	Längd	Omkrets	Diameter	Antal/fp	Pris/st
30038	50 mm	70 mm	21 mm	30	10,76
30039	50 mm	80 mm	25 mm	30	10,76
30040	50 mm	90 mm	30 mm	30	10,76
30041	50 mm	105 mm	35 mm	30	10,76
30032	82 mm	70 mm	21 mm	30	11,02
30033	82 mm	80 mm	25 mm	30	11,02
30034	82 mm	90 mm	30 mm	30	11,02
30035	82 mm	105 mm	35 mm	30	11,02
30036	82 mm	125 mm	40 mm	30	11,02



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Urindroppssamlare - självhäftande

Conveen Optima – [Coloplast](#)

Conveen Optima urindroppssamlare används av män med urinläckage eller som har svårt att hinna till toaletten. Urindroppssamlaren placeras över ollonet och rullas ut. Alla urindroppssamlare är knickfria vilket säkerställer att urinen rinner fritt i alla lägen. För att underlätta appliceringen är urindroppssamlaren försedd med en dubbelstrip. Urindroppssamlaren är enstycksförpackad, vilken är färgmarkerad efter storlek. Mätsticka kan beställas från leverantören. Bör bytas en gång per dygn. Levereras i fickpack

Fakta

Material	Silikon
Häftämne	Akrylpolymer

Sesamnummer	Längd	Omkrets	Diameter	Antal/fp	Pris/st
30047	55 mm	70 mm	21 mm	30	12,30
30048	55 mm	80 mm	25 mm	30	12,30
30049	55 mm	90 mm	30 mm	30	12,30
30050	55 mm	105 mm	35 mm	30	12,30
30042	85 mm	80 mm	25 mm	30	12,30
30043	85 mm	85 mm	28 mm	30	12,30
30044	85 mm	90 mm	30 mm	30	12,30
30045	85 mm	105 mm	35 mm	30	12,30
30046	85 mm	125 mm	40 mm	30	12,30



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Urindroppssamlare – ej självhäftande

Conveen Security+ med häftstrip – [Coloplast](#)

Conveen Security+ urindroppssamlare med häftstrip är avsedd att användas av män med urininkontinens. Urindroppssamlaren fixeras med hjälp av en häftremsa som medföljer förpackningen. Häftremsan appliceras direkt på penis, används i hela sin längd och kan läggas omlott. Mätsticka kan beställas av leverantören. Latexfri.

Fakta

Material	SEBS
Häftämne	Curagard

Sesamnummer	Längd	Omkrets	Diameter	Antal/fp	Pris/st
30013	82 mm	80 mm	25 mm	30	9,53
30014	82 mm	90 mm	30 mm	30	9,53
30015	82 mm	105 mm	35 mm	30	9,53
30016	82 mm	125 mm	40 mm	30	9,53

Sesamnummer	Längd	Bredd	Antal/fp	Pris/st
Extra häftstrip				
30019	113 mm	16 mm	20	4,10



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Urindroppssamlare - självhäftande

Conveen urindroppssamlare, latex – [Coloplast](#)

Conveen självhäftande urindroppssamlare är avsedd att användas av män vid urininkontinens. För fixering finns en häfttrand på insidan. Urindroppssamlaren är försedd med en applikator och pårullningsstrip. Mätsticka kan beställas från leverantören.

Fakta

Material	Latex
Häftämne	Akrylat

Sesamnummer	Längd	Omkrets	Diameter	Antal/fp	Pris/st
30030	105 mm	70 mm	20 mm	90	7,18
30027	105 mm	80 mm	25 mm	90	7,18
30028	105 mm	90 mm	30 mm	90	7,18
30029	105 mm	105 mm	35 mm	90	7,18
30031	105 mm	125 mm	40 mm	90	7,18



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

URINUPPSAMLINGSPÅSAR

- [Benpåse](#)
- [A2 Sängpåse](#)
- [P-Bag](#)
- [A3 Sängpåse, tömbar](#)
- [Conveen Security +](#)
- [Conveen Active](#)
- [Conveen Fixeringsband](#)
- [Legfix](#)
- [Netti Byxben](#)
- [Netti Underbensfäste](#)
- [Urinpåsehängare](#)
- [Urinflaska med lock](#)
- [Blåsskölningsvätska](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel

VO Hjälpmedel



Kommunförbundet Skåne



Urinuppsamlingspåsar - engångs

Benpåse Qufora – [OneMed](#)

Fakta

Material Påse i PVC, kopplingar av PP, PE, PVC, POM/LLDPE, slang i silikon.

Sesamnummer	Volym	Slanglängd	Antal/fp	Pris/st
32342	750 ml	10 cm	25	3,80



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel

VO Hjälpmedel

Urinuppsamlingspåsar - engångs

Benpåse Qufora – [OneMed](#)

Fakta

Material Påse i PVC, koppling i PE, PP och POM/LLDPE

Sesamnummer	Volym	Slanglängd	Antal/fp	Pris/st
32344	1500 ml	10 cm	25	3,65
32345	1500 ml	35 cm	25	3,74
32343	1500 ml	110 cm	25	4,79



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Urinuppsamlingspåsar - engångs

P-bag – [Mediq](#)

P-bag urinuppsamlare är avsedd för kvinnor och män som har svårt att komma till toaletten. Den har utvecklats för stående, sittande eller liggande bruk och består av tratt och påse. Tratten har handtag och är löstagbar/reglerbar och avsedd att användas flera gånger. Påsen har backventil, kan användas flera gånger och töms med hjälp av rivmarkering. En förpackning innehåller en tratt och 10 påsar.

Fakta

Material Polyeten, LDPE/HDPE

Sesamnummer	Volym	Antal/fp	Pris
30437	1500 ml	10 påsar/1 tratt	125,00



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Urinuppsamlingspåsar - tömbar

Benpåse Qufora – [OneMed](#)

Fakta

Material Påse i PVC, koppling i PE, PP och POM/LLDPE.

Sesamnummer	Volym	Slanglängd	Antal/fp	Pris/st
32346	2000 ml	110 cm	25	5,05



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Urinuppsamlingspåsar - tömbar

Conveen Security+ urinpåse, PVC-fri – [Coloplast](#)

Conveen Security+ urinuppsamlingspåse är avsedd för personer som använder kvarliggande urinkateter eller urindroppssamlare. Påsen töms med hjälp av en monterad klämma. Nattetid kan påsen kopplas till sängpåse. Kan enligt leverantören sitta upp till 7 dygn, men byts oftare om behov föreligger. Bärs på lår eller vad med lämplig fixering alternativt hängs på stol eller säng med lämplig upphängningsanordning.

Fakta

Material Polyeten, non-woven/polyester, polypropen, ABS-plast

Sesamnummer	Volym	Slanglängd	Slang	Antal/fp	Pris/st
30025	350 ml	30 cm	Fast	30	9,12
30037	500 ml	6 cm	Fast	30	9,58
30021	500 ml	30 cm	Fast	30	9,58
30023	500 ml	50 cm	Fast	30	9,58
30024	350 ml	30 cm	Avklippbar	30	9,12
30020	500 ml	30 cm	Avklippbar	30	8,61
30022	500 ml	50 cm	Avklippbar	30	8,61
30026	750 ml	50 cm	Avklippbar	30	8,60
30018	1500 ml	90 cm	Avklippbar	10	8,61



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Urinuppsamlingspåsar - tömbar

Conveen Active för män – [Coloplast](#)

Benpåsen Conveen Active är en tömbar diskret urinuppsamlingspåse, avsedd för aktiva män som använder urindroppssamlare och har lätt till måttlig urininkontinens. Fixeringsbandet är integrerat med påsen och slangen. Påsen placeras på insidan av låret och kopplas ihop med en urindroppssamlare.

Sesamnummer	Längd	Volym	Antal/fp	Pris/st
32200	7 cm	250 ml	10	15,45 kr



[Förskrivnings-
information](#)

[Leverantörs-
uppgifter](#)

[Startsida](#)

[Kontaktuppgifter](#)

Urinuppsamlingspåsar - fixering

Conveen fixeringsband – [Coloplast](#)

Conveen fixeringsband består av kardborrfäste och resårband med knappar och är avsett att användas för uppfästning av Conveen Security+ urinuppsamlingspåse och Conveen 1500 ml urinuppsamlingspåse. Fixeringsbandet består av ett bredare band som ska placeras överst på påsen och ett smalare band som placeras vid botten. Kardborrfästen möjliggör individuell fixering

Fakta				
Material	Polyamid, elastomer, polyester			
Tvåtråd	60°C - kardborren ska vara sluten			
Sesamnummer	Längd	Bredd	Antal/fp	Pris/st
30017	600 mm	25/35 mm	2	18,45



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Urinuppsamlingspåsar - fixering

ProSense Legfix – Tjugohundra18

Fixeringsfickan passar alla förekommande urinuppsamlingspåsar på marknaden, både tömbara och slutna urinpåsar.

Passar för både vänster eller höger ben, samt underben.

Storleksmarkering visas med färgade trådar. Håller cirka 25 tvättar.

Fakta	
Material	Elastiskt garn
Tvättråd	60 °C

Sesamnummer	Storlek	Färgmarkering	Benöppning (cm)	Antal/fp	Pris/st
31764	S	Gul	24-39	3	10,04 kr
31765	M	Blå	36-55	3	10,23 kr
31766	L	Brun	40-70	3	11,77 kr
31767	XL	Grön	65-95	3	13,62 kr



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Urinuppsamlingspåsar - fixering

Netti Byxben – [Hartmann](#)

Netti Byxben i bomull används för fixering av slutna eller tömbara urinuppsamlingspåsar. Byxbenet finns för vänster eller höger lår, har resår i alla kanter och ett brett midjeband av bomullsresår som knäpps med knappar.

Fakta	
Material	Bomull
Tråd	Polyester
Resår	Polyester, lycra, bomull
Tvättråd	90°C – tål torktumling. Kan tvättas 50 – 100 gånger

Storlek	Sesamnummer	Midjemått	Antal/tp	Pris/st
Vä S	30223	80 cm	1	140,61 kr
Hö S	30233	80 cm	1	140,61 kr
Vä M	30224	90 cm	1	140,61 kr
Hö M	30234	90 cm	1	140,61 kr
Vä L	30225	100 cm	1	140,61 kr
Hö L	30235	100 cm	1	140,61 kr
Vä XL	30226	116 cm	1	140,61 kr
Hö XL	30236	116 cm	1	140,61 kr



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Urinuppsamlingspåsar - fixering

Netti Underbensfäste – [Hartmann](#)

Netti Underbensfäste i bomull används för fixering av tömbara eller slutna urinuppsamlingspåsar. Underbensfästet är särskilt lämpligt för sittande personer och fixeras med resår på vaden. En extra medföljande resår kan knäppas genom en ögla över knäet för att avlasta vaden och förhindra stasning hos användare som sitter mycket.

Fakta	
Material	Bomull, polyester, lycra
Tvättråd	95°C – kan torktumlas

Sesamnummer	Antal/fp	Pris/st
30227	1	140,61 kr



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Urinuppsamlingspåsar - tillbehör

Urinpåsupphängare Qufora – [OneMed](#)

Fakta

Material Polypropylen

Sesamnummer	Antal/fp	Pris/st
-------------	----------	---------

32347	5	6,50
-------	---	------



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Urinuppsamlingskärl

Urinflaska med lock – [Swereco](#)

Urinflaskan är avsedd för män som har svårt att komma till toaletten. Flaskan är försedd med lock och graderad i 100 ml intervall upp till 1000 ml. Används flera gånger och rengörs med diskmedel och vatten. Tål värmedesinficering upp till 90°C. Extralock kan beställas separat.

Fakta

Material	Polyeten
----------	----------

Sesamnummer	Volym	Antal/fp	Pris/st
30135	1000 ml	1	18,45
Extra lock			
30411		1	5,61



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel

VO Hjälpmedel

Spolvätska för katetrar

Urotainer – [B Braun](#)

Fakta	
Material	PET, PE, PP+SEBS, PP (PVC-fri)

Sesamnummer	Benämning	Volym	Styrka	Pris/st
31792	Urotainer Solutio R	100 ml	6 %	49,00 kr
31790	Urotainer Twin Solutio R	2 * 30 ml	6 %	44,00 kr
31791	Urotainer Suby G	100 ml	3,23 %	49,00 kr
31789	Urotainer Twin Suby G	2 * 30 ml	3,23 %	44,00 kr



För kommunala förskrivare ska observeras att förskrivningar av denna produkt i Sesam LMN faktureras förskrivande enhet. Produkten finns även i KVG som landstingssubventionerad

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Spolvätska för katetrar

Urotainer Polihexanid – [B Braun](#)

Fakta

Material	PET, PE, PP+SEBS, PP (PVC-fri)
----------	--------------------------------

Sesamnummer	Benämning	Volym	Styrka	Pris/st
32340	Uro-Tainer Polihexanid 0,02 %	100 ml	0,02 %	49,00 kr



För kommunala förskrivare ska observeras att förskrivningar av denna produkt i Sesam LMN faktureras förskrivande enhet. Produkten finns även i KVG som landstingssubventionerad

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

URIN- OCH AVFÖRINGSSTOPPANDE HJÄLPMEDEL

- [Peristeen lavemangssystem](#)
- [Qufora IrriSedo Mini och konsystem](#)
- [Qufora IrriSedo Klick](#)
- [Navina](#)
- [Peristeen Analpropp](#)
- [Diveen](#)
- [Contrelle](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter



Särskilda riktlinjer för förskrivning

Urin- och avföringsstoppande hjälpmedel

Peristeen Plus lavemangssystem – [Coloplast](#)

Peristeen vattenlavemang är avsett att användas av personer som behöver tömma tarmen med hjälp av tarmsköljning. Systemet består av en kontrollenhet med pump, vattenpåse och rektalkateter. Alla delar är anpassade för personer med nedsatt handfunktion. Vattenpåsen kan stå på golvet och flytta med hjälp av handtaget. Rektalkatetern fixeras med ballong i tarmen så att händerna är fria under tarmsköljningen. Tillbehörssatset innehåller 15 rektalkatetrar och en vattenpåse. Fixeringsbandet kan användas för fixering av kontrollenheten på, till exempel, låret. Latexfri.

Obs! Kontakta Coloplasts representant vid första förskrivningstillfället!

Fakta

Material PVC, polykloropen, PVP, PU, ABS, PE, PC



[Mer beställningsinformation på nästa sida](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter



Särskilda riktlinjer för förskrivning

Urin- och avföringsstoppande hjälpmedel

Peristeen Plus lavemangssystem – [Coloplast](#)

Peristeen vattenlavemang är avsett att användas av personer som behöver tömma tarmen med hjälp av tarmsköljning. Systemet består av en kontrollenhet med pump, vattenpåse och rektalkateter. Alla delar är anpassade för personer med nedsatt handfunktion. Vattenpåsen kan stå på golvet och flytta med hjälp av handtaget. Rektalkatetern fixeras med ballong i tarmen så att händerna är fria under tarmsköljningen. Tillbehörssetet innehåller 15 rektalkatetrar och en vattenpåse. Fixeringsbandet kan användas för fixering av kontrollenheten på, till exempel, låret. Latexfri.

Obs! Kontakta Coloplasts representant vid första förskrivningstillfället!

Produkt	Sesamnummer	Pris/st
System standard (1 kontrollenhet, 2 rektalkatetrar, 1 vattenpåse, 2 fixeringsband inkl necessär)	32047	666,25
System standard (1 kontrollenhet, 2 rektalkatetrar, 1 vattenpåse, 2 fixeringsband exkl necessär)	32089	645,75
System small (1 kontrollenhet, 2 rektalkatetrar, 1 vattenpåse, 2 fixeringsband inkl necessär)	32052	666,25
System small (1 kontrollenhet, 2 rektalkatetrar, 1 vattenpåse, 2 fixeringsband exkl necessär)	32090	645,75
Peristeen Plus System Kona (1 kontrollenhet, 2 konkatetrar, 1 vattenpåse med skruvlock, 1 slang, 2 fixeringsband, 1 necessär)	32055	691,88
Peristeen Plus System Kona (1 kontrollenhet, 2 konkatetrar, 1 vattenpåse med skruvlock, 1 slang, 2 fixeringsband)	32056	671,38
Tillbehörsset standard (15 rektalkatetrar, 1 vattenpåse)	32048	1435
Rektalkateter standard (10 st rektalkatetrar)	32049	91,23
Extraslangar (2 st extraslangar)	32051	30
Fixeringsband (2 st fixeringsband)	32050	76,88
Tillbehörsset small (15 rektalkatetrar, 1 vattenpåse)	32053	1435
Rektalkateter small (10 st rektalkatetrar)	32054	91,23
Tillbehörsset Kona (15 konkatetrar, 1 vattenpåse)	32057	1531,35

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel

VO Hjälpmedel

Urin- och avföringsstoppande hjälpmedel

Colotip – [Coloplast](#)

Stomikon för irrigation. Tvättas med mild tvållösning.



Sesamnummer	Antal/fp	Pris/st
31117	4	36,80

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Urin- och avföringsstoppande hjälpmedel

Qufora IrriSedo Mini samt konsystem – [OneMed](#)

Ett lättanvänt system för rektal irrigation. Rymmer 90 ml vatten.
Kon för engångsbruk med hydrofil beläggning som aktiveras vid kontakt med vatten.



Särskilda riktlinjer för förskrivning

Fakta		
Del	Huvudsakligt material	Mjukgörare
Kon	Polyuretan, PVP	-
Pump	PVC	TOTM, DOTP
Förlängningsslang	PVC	DOTP

Produkt	Sesamnummer	Antal/fp	Pris/st
Qufora IrriSedo Minisystem	31349	1 pump, 15 koner	845
Qufora IrriSedo Minisystem	31350	1 pump, 30 koner	1350
Förlängningsslang	31348	15 st	669
Tillbehörsset	31686	15 st	845
Konsystem set med 15 koner Qufora IrriSedo	31687	1 st	1290



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel

VO Hjälpmedel



Kommunförbundet Skåne



Urin- och avföringsstoppande hjälpmedel

Qufora IrriSedo Klick – [OneMed](#)



Särskilda riktlinjer för förskrivning

Fakta		
Del	Huvudsakligt material	Mjukgörare
Kon	PVC	TOTM och DOTP
Pump	PVC	TOTM och DOTP
Rektalballong	TPE	-

Produkt	Sesamnummer	Antal/fp	Pris/st
Qufora IrriSedo Klick startset	31867	1	905,00 kr
Qufora IrriSedo Klick rektalballongkatetrar	31869	10	115,00 kr
Qufora IrriSedo Klick slang	31866	1	214,00 kr
Qufora IrriSedo Klick månadsset	31868	1	1 695,00 kr



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Inkontinenshjälpmedel

Senast redigerad 2024-02-15 av Eric Donaldson

Urin- och avföringsstoppande hjälpmedel



Särskilda riktlinjer för förskrivning

Navina – [Wellspect Healthcare](#)

Navina Systems™ från Wellspects HealthCare har utvecklats för att hjälpa vuxna och barn över 3 år som lider av avföringsinkontinens, kronisk förstoppning och/eller tidskrävande tarmkötsel. Användaren kan vara rullstolsburen och/eller ha nedsatt motorisk funktion i händerna. Genom att tillföra vatten till nedre delen av tjocktarmen (kolon) kan man stimulera de peristaltiska musklerna i tarmen till att tömma tjocktarmen och ändtarmen (rektum). Barn ska utföra TAI (trans anal irrigation) i vuxens sällskap, tills dess sjukvårdspersonal bedömer att barnet klarar att genomföra TAI på egen hand.

- Rådgör alltid med sjukvårdspersonal som är specialiserade på TAI innan du använder Navina Systems
- Navina Systems ska endast användas så som det beskrivs i bruksanvisningen.
- Navina Systems ska endast användas av en och samma person.
- Navina rektalkateter regular, är endast för vuxna.
- Navina rektalkateter small, från 3 år
- Navina Systems.



[Systemdelar och fakta på nästa sida](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter



Urin- och avföringsstoppande hjälpmedel

Navina – [Wellspect Healthcare](#)

Produkt	Sesamnummer	Antal/fp	Pris/st
Navina Classic Regular	31904	1 Navina Classic-kontrollenhet, 1 Vattenbehållare, 1 Vattenslangset, 2 Rektalkatetrar Regular, 1 Navina väska, 1 Tillbehörsset (Endast för vuxna)	695
Navina Rektalkateterset Regular	31084	10 st	95,20
Navina Slangset	31087	1 slang till kateter/kona, 1 slang till vattenbehållaren	64
Navina Tillbehörsset	31088	2 greppringar, 1 nackband, 1 fästrem, 1 fästklämma	70

Produkt	Sesamnummer	Antal/fp	Pris/st
Navina Rektalkateterset Regular	31084	10 rektalkatetrar = 1 fp (Endast för vuxna)	870
Navina Förbrukningsset Regular	31085	1 vattenbehållare, 15 rektalkatetrar (Endast för vuxna)	1450
Navina Smart-system Regular	31086	1 kontrollenhet med laddare och laddningskabel, 1 vattenbehållare, 1 vattenslangset, 2 rektalkatetrar Regular, 1 tillbehörsset, 1 Navina-väska (Endast för vuxna)	2700
Navina Vattenslangset	31087	1 slang till kateter/kona, 1 slang till vattenbehållaren	48
Navina Tillbehörsset	31088	2 greppringar (1 vertikal, 1 horisontell), 1 nackband, 1 fästrem, 1 fästklämma till Navina Smartkontrollenheten	10
Navina Förbrukningsset Small	31437	1 vattenbehållare, 15 rektalkatetrar (Från 3 år)	1450
Navina Smart-system Small	31438	1 Navina Smart-kontrollenhet med laddare och laddningskabel, 1 vattenbehållare, 1 vattenslangset, 2 rektalkatetrar Small, 1 tillbehörsset, 1 Navina-väska (Från 3 år)	2700
Navina Förbrukningsset Kona	31439	1 vattenbehållare, 15 konor (Från 3 år)	1700
Navina Smart-system Kona	31440	1 kontrollenhet med laddare och laddningskabel, 1 vattenbehållare, 1 vattenslangset, 2 konor, 1 tillbehörsset, 1 Navina-väska (Från 3 år)	2800
Navina Rektalkateterset Small	31441	10 rektalkatetrar = 1avd fp (Från 3 år)	870

[Bild och delarnas innehåll på nästa sida](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Urin- och avföringsstoppande hjälpmedel

Navina – [Wellspect Healthcare](#)



Särskilda riktlinjer för förskrivning

Fakta Vattenslangset

Huvudsaklig råvara	TPE
Storlek	120 cm
Hållbarhet	6 månader alt 100 användningstillfällen

Fakta Vattenbehållare

Huvudsaklig råvara	TPE
Storlek	1,5 Liter
Hållbarhet	1 månad alt 15 användningstillfällen

Fakta Kontrollenhet Classic

Huvudsaklig råvara	PVC
Hållbarhet	6 månader alt 100 användningstillfällen

Fakta Kontrollenhet Smart

Huvudsaklig råvara	PC/ABS
Hållbarhet	2 år alt 400 användningstillfällen

Fakta Engångskateter/kona

Huvudsaklig råvara	TPE
Storlekar kateter	Regular/Small
Storlek kona	En storlek
Hållbarhet	Engångs



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Urin- och avföringsstoppande hjälpmedel

Navina – Fecal Incontinence Insert – [Wellspect HealthCare](#)

Navina Fecal Incontinence Insert är avsedd att användas för hantering av avföringsläckage på grund av avföringsinkontinens. Analproppen är utformad för att sättas in av användaren själv för att täta och förhindra läckage av avföring från ändtarmen. Kan användas i 24 timmar.



Storlek	Sesamnummer	Total Längd	Effektiv Längd	Antal/fp	Pris/st
Standard	32351	94 mm	60 mm	30	48
Large	32368	100 mm	67 mm	30	48

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Urin- och avföringsstoppande hjälpmedel

Diveen – [B Braun](#)

Diveen är avsedd för kvinnor med ansträngningsinkontinens. Appliceras vaginalt med eller utan hjälp av en applikator och avser att förhindra eller minska risken för ofrivilligt urinläckage. Normala toalettbesök kan uträttas med bågen applicerad. Bågen kan användas hela dagen och återanvändas ytterligare en gång. Utprovning av rätt storlek och utförlig användarinstruktion ska föregå förskrivningen.

Fakta	
Material - Diveen	TPV
Material - Utdragstråd	PE
Material - Applikator	LDPE & HDPE

Storlek	Sesamnummer	Antal/fp	Pris/st
S	31700	5	59
S	31698	15	57
M	31701	5	59
M	31699	15	57



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Urin- och avföringsstoppande hjälpmedel

Contrelle kontinensbåge - [Codan Triplus AB](#)

Contrelle kontinensbåge är en effektiv och säker lösning som hjälper många kvinnor till ett bättre liv. Kontinensbågen är ett vaginalt hjälpmedel för engångsbruk. Den är lätt att sätta in och ta ut. Den kan användas upp till 16 timmar och behöver inte tas ut vid toalettbesök. Vid menstruation bör den bytas var 4-6:e timma. Tampong skall inte användas tillsammans med kontinensbågen. Bågen kan användas tillfälligt vid större påfrestning, t ex vid gymnastik eller idrottsutövande. Kontinensbågen är anatomiskt utformad för att passa mot blåshals och rektum. Applikatorn (införingsstaven) av plast används för att föra in bågen i slidan på ett enkelt och hygieniskt sätt. Applikatorn är för flergångsbruk. Efter rengöring med tvål och vatten kan den användas igen.

Utprovningssat för bedömning av storlek. Kontinensbågen finns i tre storlekar.

Fakta	
Båge	Polyuretanskum
Snöre	Polyester
Applikator	Polypropylen

Storlek	Sesamnummer	Antal/fp	Pris/st
1	30193	30	46,65
2	30194	30	46,65
3	30195	30	46,65

Sesamnummer	Benämning
32205	Contrelle® Utprovningssat stl. 1, 2 och 3, påse



Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

SKYDDSBYXA VID BAD

- [Netti Combi Aqua](#)
- [Badkläder](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Skyddsbyxa vid bad

Netti Combi Aqua – [Hartmann](#)

Netti Combi Aqua är en badbyxa avsedd för personer med inkontinens. Produkten bygger på två enheter, en innerbyxa och en ytterbyxa. Innerbyxans resår i midja och benöppningar är belagd med silikonsträngar för att sluta tätt mot huden. Ytterbyxan absorberar inte vätska och förstärker därigenom innerbyxans tätning. Inkontinensskydd bör användas vid behov. Skölj båda byxorna noga efter bad. Innerbyxan kan vid behov tvättas i 95°C och ytterbyxan i 60°C. Båda byxorna kan torktumlas, undvik dock höga temperaturer. Kan användas upp till cirka 100 bad.



Fakta

Material innerbyxa	Polyuretan med polyester på utsidan
Material ytterbyxa	80 % Tactel microfiber, 20 % lycra
Tvättråd innerbyxa	95°C - torktumling på låg temperatur
Tvättråd ytterbyxa	60°C - torktumling på låg temperatur

[Storlekar och annan information på nästa sida](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel

VO Hjälpmedel



Kommunförbundet Skåne



Skyddsbyxa vid bad

Netti Combi Aqua – [Hartmann](#)



Storlek	Sesamnummer	Innerbyxa		Ytterbyxa		Antal/fp	Pris/st
		Midjemått	Benomfång	Midjemått	Benomfång		
Barn 1	30239	37-51 cm	20-28 cm	44-60 cm	20-32 cm	1	495,00 kr
Barn 2	30240	42-56 cm	26-36 cm	48-70 cm	23-36 cm	1	495,00 kr
Dam 1	30237	52-85 cm	30-52 cm	50-86 cm	26-54 cm	1	495,00 kr
Dam 2	30242	57-95 cm	35-58 cm	56-96 cm	28-60 cm	1	495,00 kr
Dam 3	30244	62-105 cm	40-64 cm	62-106 cm	32-66 cm	1	495,00 kr
Dam 4	30246	67-110 cm	45-70 cm	66-120 cm	36-80 cm	1	495,00 kr
Dam 5	30248	72-120 cm	50-76 cm	66-120 cm	36-80 cm	1	495,00 kr
Herr 1	30238	52-85 cm	30-52 cm	50-86 cm	26-54 cm	1	495,00 kr
Herr 2	30243	57-95 cm	35-58 cm	56-96 cm	28-60 cm	1	495,00 kr
Herr 3	30245	62-105 cm	40-64 cm	62-106 cm	32-66 cm	1	495,00 kr
Herr 4	30247	67-110 cm	45-70 cm	66-120 cm	36-80 cm	1	495,00 kr
Herr 5	30249	72-120 cm	50-76 cm	66-120 cm	36-80 cm	1	495,00 kr

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Skyddsbyxa vid bad

Badkläder – [Swereco](#)

Badkläder som är unika på grund av att de är designade för att hålla tätt vid både avförings- och urininkontinens. Swereco kan erbjuda ett omfattande sortiment av inkontinensprodukter, däribland badkläder för personer med inkontinensproblem. För uppdatering av era befintliga pärmar kontakta oss så skickar vi en ny med prover, eller så skickar vi produktblad digitalt. Vi bokar gärna besök av produktspecialist om det önskas.



[Storlekar och annan information på nästa sida](#)

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Skyddsbyxa vid bad

Badkläder – [Swereco](#)

Typ	Sesamnummer	Pris/st
Badshorts med snörning i midjan strl. S	31961	599,50
Badshorts med snörning i midjan strl. M	31962	599,50
Badshorts med snörning i midjan strl. L	31963	599,50
Badshorts med snörning i midjan strl. XL	31964	599,50
Badshorts med snörning i midjan strl. XXL	31965	599,50
Tvådelad baddräkt, stl. 36, cherry/svart	32077	761,91
Tvådelad baddräkt, stl. 38, cherry/svart	32078	761,91
Tvådelad baddräkt, stl. 40, cherry/svart	32079	761,91
Tvådelad baddräkt, stl. 42, cherry/svart	32080	761,91
Tvådelad baddräkt, stl. 44, cherry/svart	32081	761,91
Tvådelad baddräkt, stl. 46, cherry/svart	32082	761,91
Tvådelad baddräkt, stl. 48, cherry/svart	32083	761,91
Tvådelad baddräkt, stl. 50, cherry/svart	32084	761,91
Tvådelad baddräkt, stl. 52, cherry/svart	32085	761,91

Typ	Sesamnummer	Pris/st
Badshorts med snörning i midjan, manet 3-4 år	31938	572,25
Badshorts med snörning i midjan, manet 5-6 år	31939	572,25
Badshorts med snörning i midjan, manet 7-8 år	31940	572,25
Badshorts med snörning i midjan, manet 9-10 år	31941	572,25
Badshorts med snörning i midjan, manet 11-12 år	31942	572,25
Badshorts med snörning i midjan, manet 13-14 år	31943	572,25
Badshorts med snörning i midjan, manet 15-16 år	31944	572,25
Baddräkt halterneck rosa 3-4 år	31945	433,82
Baddräkt halterneck rosa 5-6 år	31946	433,82
Baddräkt halterneck rosa 7-8 år	31947	433,82
Baddräkt halterneck rosa 9-10 år	31948	433,82
Baddräkt halterneck rosa 11-12 år	31949	433,82
Baddräkt halterneck rosa 13-14 år	31950	433,82
Baddräkt halterneck rosa 15-16 år	31951	433,82

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Förskrivningsinformation

Notera att produkter i den här katalogen är förskrivningsbara. Det innebär att produkten knyts till en patient och levereras hem till patienten. Kostnadsansvaret ligger på förskrivande enhet.


Förskrivningar ska göras i Sesam LMN.

Behöriga förskrivare loggar in med sitt SIHTS-kort.

Kundservice
Telefon 0770-11 11 00
LMNsupport@skane.se

OneMed Service AB distribuerar inkontinenshjälpmedel i hela Skåne, via PostNord.

Vid andra frågor gällande förskrivning, exempelvis förskrivning utanför sortiment, vem får förskriva eller vad förskrivningsprocessen innebär rekommenderas: <https://vardgivare.skane.se/patientadministration/bestall-produkter-och-tjanster/inkontinensportalen/>

Vissa produkter är markerade med en stjärna i katalogen.  Markeringen innebär att särskild kompetens, till exempel uroterapeut, specialisläkare inom urologi eller gynekologi, är nödvändig för att kunna bedöma behov, göra utprovning samt informera patienten om hantering av produkten. Förskrivning ska därför ske i samråd med ovan nämnda kompetensen.

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel

VO Hjälpmedel



Kommunförbundet Skåne



Leverantör	Telefon	Mail	Webplats
Abena	0733-600825	annf@abenaab.se	www.abenaab.se
Attends	0380-47583	hanna.andersson@attindas.com	www.attends.se
BARD Norden	042-400 01 63	christin.zorn@crbard.com	www.crbard.com
B Braun	0721-99 76 54	barbro.nilsson@bbraun.com	www.bbraun.se
Cellcomb	0761-64 72 53	monica.hindstrom@cellcomb.com	www.cellcomb.com
CODAN Triplus	0300-356 67	lk@codanriplus.se	www.codanriplus.se
Coloplast	0300-332 99	mail@coloplast.com	www.coloplast.se
ConvaTec	020-21 22 22	convatec.kundservice@convatec.com	www.convatec.com
Dolema	0709-14 16 60	karin.eriksson@dolema.com	www.dolema.com
Gavea	0720 47 08 50	info@gavea.se	www.gavea.se
Hartmann	0371-58 74 00	info@hartmann.se	www.hartmann.se
Heinex	0733-66 62 30	phg@heinex.se info@heinex.se	www.heinex.se
Mediplast	040-671 23 21	therese.segerstein@mediplast.com	www.mediplast.se
Mediq		anna.hansson@mediq.com	www.mediq.se
OneMed	0725-62 18 00	anna-rita.marzo@onemed.com	www.onemed.se
Swereco	08 – 850 00 52 40	order@swereco.com	www.swereco.com
Essity	073 - 065 15 60	Glenn.sjovall@essity.se	www.tena.nu
Wellspect	031-376 40 20	sweorder@wellspect.com	www.wellspect.se
Vygon	070-436 86 20	jonas.larsson@vygon.se	www.vygon.se
Tjugohundra18	0703-320737	kerstin@prosense.se	

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter

Psykiatri, Habilitering och Hjälpmedel

VO Hjälpmedel



Produktfrågor Region Skåne

Är du förskrivare inom landstinget och har frågor om sortimentet, vänd dig till:

Allmänna frågor

Eric Donaldson, Sortiments- och avtalsledare

sortimenthjm.hoh@skane.se 040-6753389

Frågor om produkter för barn:

Anna Karin Undrén, Uroterapeut

AnnaKarin.Undren@skane.se

Frågor om katetrar:

Malin Kvarnerup

Malin.kvarnerup@skane.se 0702-170004

Carina Svensson

Carina.svensson@skane.se 0732-57000

Frågor om lätt-inko-produkter:

Johanna Sjögren, Uroterapeut, sjukgymnast

johanna.sjogren@skane.se 040-33 35 23

Produktfrågor Skånes kommuner

Är du förskrivare i någon av Skånes kommuner och är i behov av rådgivning eller har frågor sortimentet, vänd dig i första hand till representant för aktuell produkts företag. Har du andra frågor om avtal eller övrigt; kontakta en av nedstående:

Ann-Chatrine Ewald, MAS Svedala.

ann-chatrine.ewald@svedala.se

Annika Atterlid Ohlsson

annika.atterlid.ohlsson@hoor.se

Förskrivnings-
information

Leverantörs-
uppgifter

Startsida

Kontaktuppgifter