

OMHÄNDERTAGANDE AV KLINISKA TUMÖRPROVER FÖR TRANSPORT TILL KLINISK GENETIK

- Transport** Kliniska tumörprover för genetik analys vid Klinisk genetik skickas med intern transport.
- Ofixerade tumörbiopsier, mellannålsbiopsier och finnålsaspirat** Ofixerade tumörbiopsier, mellannålsbiopsier och finnålsaspirat läggs i sterilt rör som fylls till åtminstone hälften med steril fysiologisk koksaltlösning. Provet skickas sedan snarast med intern transport. Om provet inkommit sent på dagen (efter sista transport), kan det stå i koksaltlösning i rumstemperatur eller kylskåp till nästföljande morgon. Provet ska medföljas av remiss (vanligtvis kopia av den remiss som medföljt tumörprovet till Klinisk patologi, kopian ska märkas med ”Klinisk genetik”) med uppgift om patientens namn, födelsenummer, inremitterande läkare och avdelning samt klinisk frågeställning.
- FPPE-prov** FPPE-prov läggs i sterilt rör och skickas sedan snarast med intern transport. Om provet blivit färdigt sent på dagen (efter sista transport), kan det stå i rumstemperatur till nästföljande morgon. Provet ska medföljas av remiss med uppgift om patientens namn, födelsenummer inremitterande läkare och avdelning, samt klinisk frågeställning.
- Extraherat DNA** Extraherat DNA skickas i därför avsett rör snarast efter extraktion med intern transport. Om provet blivit färdigt sent på dagen (efter sista transport) kan det stå i kylskåp till nästföljande morgon. Provet ska medföljas av remiss med uppgift om patientens namn, födelsenummer inremitterande läkare och avdelning, samt klinisk frågeställning.
- Kontakt** Vid frågor angående provhanteringen, vänligen kontakta Klinisk genetik, tel. 046-17 33 68 (provmottagningen).
- Hänvisning** **Provtagningsanvisningar** och länk till **remisser** finns tillgängliga på ”Analysportalen”: www.analysportalen-labmedicin.skane.se.