

Råd och stöd vid användande av provtagningsset för mikrobiologisk diagnostik

För pinnprov till odling och direktpåvisning av bakterier och jästsvamp ska eSwab med ROSA eller BLÅ kork användas.

Endast för analyser på remiss **Mikrobiologi** eller remiss **Multiresistenta bakterier/Hygien**. Undantaget analys för Chlamydia trachomatis/Gonokocker och Mycoplasma genitalium som har speciella provtagningsset. Se Analysportalen för respektive analys.

Det finns tre varianter av eSwab provtagningsset, alla rören innehåller flytande Amies' medium, det är pinnstorleken som skiljer:

- ROSA KORK med pinne för svalg, sår, MRB, genital- och faecesodling
- BLÅ KORK med pinne för nasofarynx och uretra
- BLÅ KORK med pediatrik pinne för nasofarynx på små barn

Provpinnen ska inte vara kvar i röret när det skickas in till laboratoriet. Se speciell anvisning i Analysportalen för respektive analys där dessa provset används.

Art nr 24433



Art nr 24432



Art nr 24431



För pinnprov till virologisk diagnostik (viruspåvisning) ska Σ -VCM-rör med RÖD kork användas

Endast för analyser under rubrik Viruspåvisning på remiss **Serologi/Virologi**, samt snabb-PCR Influenza/RS på remiss **Mikrobiologiska snabbtest**.
Se Analysportalen för respektive analys.

Det finns tre slags Σ -VCM provtagningsset att välja mellan, alla rören innehåller VCM-medium och har RÖD kork:

- **STANDARD TIP:**
för provtagning från hud, slemhinna och svalg
- **MINI TIP + STANDARD TIP (DUO SWAB):**
för provtagning från nasofarynx och svalg
- **ULTRA FINE TIP (PEDIATRISK):**
för provtagning från nasofarynx på små barn

Pinnen ska vara kvar i provröret när det skickas in till laboratoriet.

STANDARD TIP Art nr 25481



MINI TIP + STANDARD TIP (DUO SWAB) Art nr 27 556



ULTRA FINE TIP (PEDIATRISK) Art nr 25483

