

Likvorprov – praktisk handledning

Analyssortiment och fullständiga anvisningar finns i Analysportalen.

Likvorprov – praktisk handledning finns under Råd & Stöd www.skane.se/labmedicin.

• Provtagningsmateriel:

Sterila plaströr av polypropen, **art nr 25188**, kort 5 mL rör med transparent kork. Används för kliniskt kemiska- och patologi/cytologianalyser samt till biobank mm.

Sterila plaströr av polystyren, **art nr 7302**, långt 10 mL rör med vit kork. Används till mikrobiologiska analyser.

Transfixrör Nordic Biosite, **art nr TF-CSF-5**, 5 mL rör med orange kork. Används till hematopatologiska analyser.

- **Märkning av rör:** Märk rör för analyser till kliniskt kemiska analyser med streckkodsetiketterna som återfinns på remiss. Övriga rör märks med streckkodsetikett som innehåller uppgifter om namn och personnummer, provtagningsdatum och tid samt provmaterial. Märk rören så att det framgår i vilken ordning de har tagits.

- **Transport och förvaring:** Transportera rören i rumstemperatur till närmsta Laboratoriemedicin Bas inom 30 minuter.

Prover för cytologisk undersökning transporteras direkt till laboratorium för Klinisk patologi Lund inom 60 minuter.

Ring 046-17 34 14 för att meddela att prov är på väg. Prov förvaras i kylskåp vid eventuell väntan på transport.

Prov ska vara laboratoriet tillhanda för analys mån-fre kl 08.00-15.30 (utförs ej helgdagar). Rörpost får inte användas.

Portion/ Rör nr	Analyser på respektive rör	Remiss	Minsta volym/ analys	Volym per rör	Rör till likvorprov art nr	Rör till blodprov
1	Pneumokock-antigen, snabbtest	Mikrobiologiska snabbtest	0,2 mL			
	Glukos Laktat	Csv (Likvor)	0,2 mL	1 mL*	25188	Glukoskvot: Fluorid- citratrör, rosa kork
	Erythrocyter (vid misstänkt stickblödning)		0,3 mL			
2	Odling****	Mikrobiologi	0,5 mL	1 mL	7302	
	Direktmikroskopi		0,2 mL			
3	Celler	Csv (Likvor)	0,6 mL	1 mL**	25188	
	Albumin, Protein		0,4 mL			
4	Spektrofotometri	Csv (Likvor)	1 mL	1 mL**	25188 Ljusskyddas!	Li-heparinrör, ljusgrön kork
Extra	Meningit/encefalit-panel	Serologi/Virologi	0,5 mL	1 mL**	7302	
Extra	Serologi - Borrelia - Syfilis	Serologi/Virologi	0,25 mL/ analys	1 mL***	7302	SST-rör, gul kork
Extra	Mykobakterier	Mikrobiologi	0,5 mL	1 mL	7302	
Extra	Svampodling		0,5 mL			
	Svamp-DNA (18S)	Mikrobiologi	0,25 mL	1 mL	7302	
	Cryptokock-antigen		0,25 mL			
Extra	Bakterie-DNA (16S)	Mikrobiologi	0,5 mL	1 mL	7302	
Extra	Borrelia-DNA	Mikrobiologi	0,5 mL	1 mL	7302	
Extra	Likvor till frysning i biobank, Klinisk mikrobiologi	Serologi/Virologi	1 mL	1 mL***	25188	SST-rör, guldgulkork
Extra	IEF Albuminkvot	Csv (Likvor)	0,6 mL	1 mL**	25188	SST-rör, guldgulkork
Extra	Aminosyror	Kemi, Laboratorieremiss, Allmän	0,2 mL	1 mL**	25188	Na-heparinrör, blå kork alt. EDTA microtainer lila kork
Extra	Likvor till frysning,	Kemi, Laboratorieremiss, Allmän	1 mL	1 mL**	25188	
Extra	Alzheimermarkörer (Tau, Fosfo-tau, β-Amyloid, β-Amyloid-kvot)	Mölnadal (Neurokemi)	1 mL	1 mL	25188	
Extra	Cytologi	Cytologi	1 mL	1 mL	25188	
Extra	Flödescytometri	Patologi-hematopatologi	1 mL	1 mL	Transfixrör TF-CSF-5	

Resterande material sparas på laboratoriet för eventuellt kompletterande analyser. *1 vecka i kyl, ** 2 månader i frys,
*** tillsvidare i frys och **** Vid misstanke om bakterieell meningit överväg att, utöver sterilt rör för odling (art nr 7302), spruta
1 mL likvor i en pediatrik blododlingsflaska. Bifoga remiss Mikrobiologi.