







Guide undersökningshandskar i nitril

	Användningsområde	Genombrottstider
 <p>Selefa Sense Längd 24 cm Texturerade fingertoppar</p>	<ul style="list-style-type: none">· Patient- och tandvård· Städning	LIV Des +72 (etanol) <10 min DAX Ytdesinfektion+ (isopropanol) Ej testad Formaldehyd Ej testad
 <p>Abena Classic Längd 24 cm Mikrotexturerade fingertoppar</p>	<ul style="list-style-type: none">· Patient- och tandvård· Provtagning· Städning· Ytdesinfektion	LIV Des +72 (etanol) 10 min DAX Ytdesinfektion+ (isopropanol) <31 min Formaldehyd 37 % <240 min
 <p>Evercare Satin x-long Längd 29 cm Texturerade fingertoppar</p>	<ul style="list-style-type: none">· Patient- och tandvård· Cytostatika- och antibiotikahantering· Analys- och provtagningsarbete· Städning· Ytdesinfektion	LIV Des +72 (etanol) 15 min DAX Ytdesinfektion+ (isopropanol) 69 min Formaldehyd 37 % >480 min
 <p>Evercare Safe x-long Längd 29 cm Texturerade fingertoppar Kraftig</p>	<ul style="list-style-type: none">· Patient- och tandvård· Cytostatika- och antibiotikahantering· Analys- och provtagningsarbete· Diskning och rengöring av instrument· Städning· Ytdesinfektion	LIV Des +72 (etanol) 15 min DAX Ytdesinfektion+ (isopropanol) 47 min Formaldehyd 37 % >480 min
 <p>Abena Excellent Låg Derma Längd 24 cm och 29 cm Texturerade fingertoppar Ej standardhandske</p>	<ul style="list-style-type: none">· Patient- och tandvård· Städning· Rekommenderas vid kontaktallergi för gummikemikalier	LIV Des +72 (etanol) 2 min DAX Ytdesinfektion+ (isopropanol) <22 min Formaldehyd 37 % <60 min
 <p>Evercare Lime Längd 24 cm Släta fingertoppar Ej standardhandske</p>	<ul style="list-style-type: none">· Patient- och tandvård· Provtagning· Städning· Rekommenderas vid kontaktallergi för gummikemikalier	LIV Des +72 (etanol) <10 min DAX Ytdesinfektion+ (isopropanol) Ej testad Formaldehyd 37 % <10 min

När ska jag använda handskar?

Använd alltid handskar vid:

- Risk för kontakt med blod, urin, avföring eller andra kroppsvätskor,
- hantering av de flesta kemikalier,
- beredning och administrering av vissa läkemedel t ex cytostatika,
- rengöring av instrument.

Överdriven användning av handskar ökar risken för hudbesvär. Använd handskar enbart när det behövs och inte längre tid än nödvändigt.

Välj rätt handske för det arbete du utför och de kemikalier du arbetar med. Se mer information under handskrekommendation.

Hur använder jag handskar?

- Efter tvätt och desinfektion ska händerna vara helt torra före handsken tas på handen.
- Kasta handsken direkt efter användning.
- Desinfektera aldrig handskarna. Desinfektionsmedel förstör den skyddande funktionen
- Handskar blir förorenade utanpå och sprider smitta på samma sätt som den obehandskade handen.
- Berör inte omväxlande smutsigt och rent, även om du använder handskar. Byt handskar mellan olika vårdmoment.
- Byt alltid handskar mellan patienter.

Så här tar du på och av handsken

Ta PÅ handsken



1. Sprita av händerna enligt regler för basal hygien.



2. Ta ut en handske från originalförpackningen genom att, om möjligt, ta tag i handskens krage.



3. Håll handsken i kragen med ena handen och för ner fingrar och tumme från den andra handen i handsken.



4. Dra upp handsken över handleden och undvik samtidigt att fingerspetsarna penetrerar handsken.



5. Ta ut nästa handske från förpackningen med den handskfria handen på samma sätt som tidigare, genom att ta tag om kragen.



6. Håll handsken i kragen med den handskförsedda handen och dra på handsken upp över handleden.

Ta AV handsken



1. Ta tag om utsidan av kragen med motsatt handskförsedd hand och dra av handsken.



2. Håll den avtagna handsken i handskförsedd hand.



3. Glid in med fingrarna på den oklädda handen under kragen på den kvarvarande handskens krage.



4. Dra av den andra handsken över den första handsken.



5. Släng handskarna i lämpligt avfallskärl.



6. Sprita av händerna enligt regler för basal hygien.